

Badestuhl

Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG).

Garantie

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleissteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand.
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber. Beachten Sie das zulässige Benutzergewicht.
- Bitte nutzen Sie den Badestuhl nur für den vorgesehenen Einsatzbereich.
- Bitte verwenden Sie den Badestuhl nicht als Tritthocker.
- Benutzen Sie den Badestuhl nur auf geraden und rutschsicheren Flächen.
- Stellen Sie die Teleskoprohre immer auf die gleiche Höhe ein.
- Nicht einseitig belasten! – sich nur senkrecht auf beiden Armlehnen abstützen.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim Aufstellen des Badestuhls sich nicht die Finger oder andere Körperteile einklemmen.

3. Beschreibung und technische Daten

Produkt Beschreibung

Der Badestuhl besitzt alle Standard-Voraussetzungen eines regulären Badestuhls und dient dem Benutzer als Sitzhilfe während des Duschens. Durch die Pulverbeschichtung ist der Stuhl korrosionsbeständig.

Technische Daten:

Badestuhl	302060	302061
Materialien	Stahl + Kunststoff	Alluminium + PUR weich
Gesamthöhe	65,5 - 75,5 cm	65,5 - 75,5 cm
Gesamtbreite	53,5 cm	53,5 cm
Gesamttiefe	44,5 cm	44,5 cm
Sitzmaße (Breite x Tiefe)	44 x 39 cm	44 x 39 cm
Sitzhöhe (einstellbar)	46 - 56 cm	46 - 56 cm
Armlehnen-Höhe	19,5 cm	19,5 cm
Gesamtgewicht	5,4 kg	5,1 kg
Max. Benutzergewicht	100 kg	100 kg

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Rückenlehne.

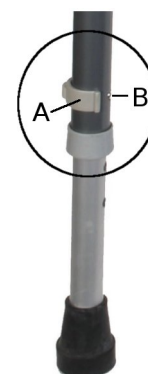


Abbildung des Typenschildes (*nicht* originales Beispiel)

4. Bedienungsanleitung

Einstellung der gewünschten Sitzhöhe.

- Der Stuhl ist richtig eingestellt, wenn der Benutzer auf dem Stuhl sitzt und beide Füße auf dem Boden stehen
- Greifen Sie den **Clip (A)** zwischen Zeigefinger und Daumen
- und ziehen ihn heraus
- Stellen Sie das Teleskoprohr auf die gewünschte Höhe ein
- Drücken Sie den **Clip (A)** in das vorgesehene **Loch (B)**
- Stellen Sie die anderen Teleskoprohre auf die gleiche Höhe ein
- Während der Benutzung bitte keine Verstellungen vornehmen



5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiss. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmässigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

6. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

7. Konformitätserklärung

Die Firma

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

erklärt hiermit, dass das Produkt **Badestuhl 302060 und 302061** in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte, Anhang I vom 14 Juni 1993**

Der Verantwortliche:

Name: Lars Nygaard
Stellung: Geschäftsführer
Firma: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark

Skanderborg, den 10.02.2007

.....
Datum



.....
Unterschrift