

# Attrezzo montagomme 211500

## istruzioni d'uso



**MOBILEX A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca  
[www.mobilex-care.com](http://www.mobilex-care.com)

## Importante!

**Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso. Seguite sempre scrupolosamente le istruzioni contenute, in particolare gli avvisi per la sicurezza.**

**Per ulteriori chiarimenti potete rivolgervi al Vs. rivenditore di fiducia oppure direttamente alla Mobilex A/S:**

**Mobilex A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca

telefono: +45 87 93 22 20  
telefax +45 87 93 17 77  
e-mail: [info@mobilex-care.com](mailto:info@mobilex-care.com)

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto di qualità controllata Mobilex®

---

## 1. Avvisi generali

### Garanzia

il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. La garanzia decade se il prodotto non è usato correttamente e/o in modo improprio. La garanzia non copre la normale usura, se non derivante da un difetto di fabbricazione e non copre i costi di trasporto.

## 2. Avvisi per la sicurezza


- ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare il prodotto, abbiano cura di leggere attentamente questo manuale
- difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia
- usare il prodotto solo per l'uso consentito e solo se in perfetto stato.
- non effettuate modifiche o riparazioni. Se il prodotto presentasse dei difetti o danni, avvisate immediatamente il Vs. rivenditore.

### 3. Descrizione e contenuto

Il montagomme Mobilex 211500 è stato concepito e costruito come attrezzo per facilitare ed accelerare il montaggio degli anelli in poliuretano (coperture piene da 4" a 26") e può così contribuire ad un notevole risparmio di tempo.


#### contenuto della fornitura:

descrizione	immagine	pezzi
morsa blocca-cerchione con maniglia	A	1
tubo con aletta di fissaggio	B	1
tubo di sostegno	C	1
leva con maniglia	D	1
supporto mobile con "pinne di pescecane", 1 piccola, 1 grande	E	2
4 perni per ruote con perno a rilascio rapido e 1 boccola per ruote a montaggio fisso	F	5
1+1 bullone bloccaruota (per ruote da 4" a 8")	G	2
2 viti (40 mm) fissaggio morsa, 3 viti (12 mm) per il bloccaggio del supporto mobile, 1 coppia (6 mm) per il tubo con maniglia	H	7

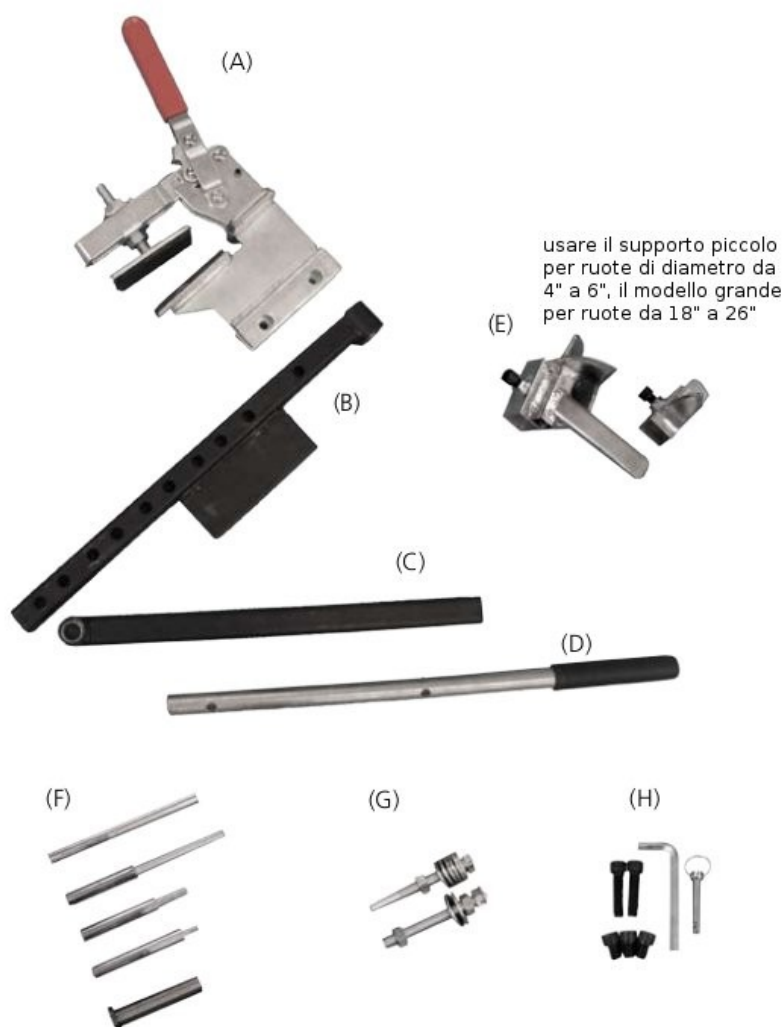

## 4. Montaggio ed uso

### descrizione delle parti:

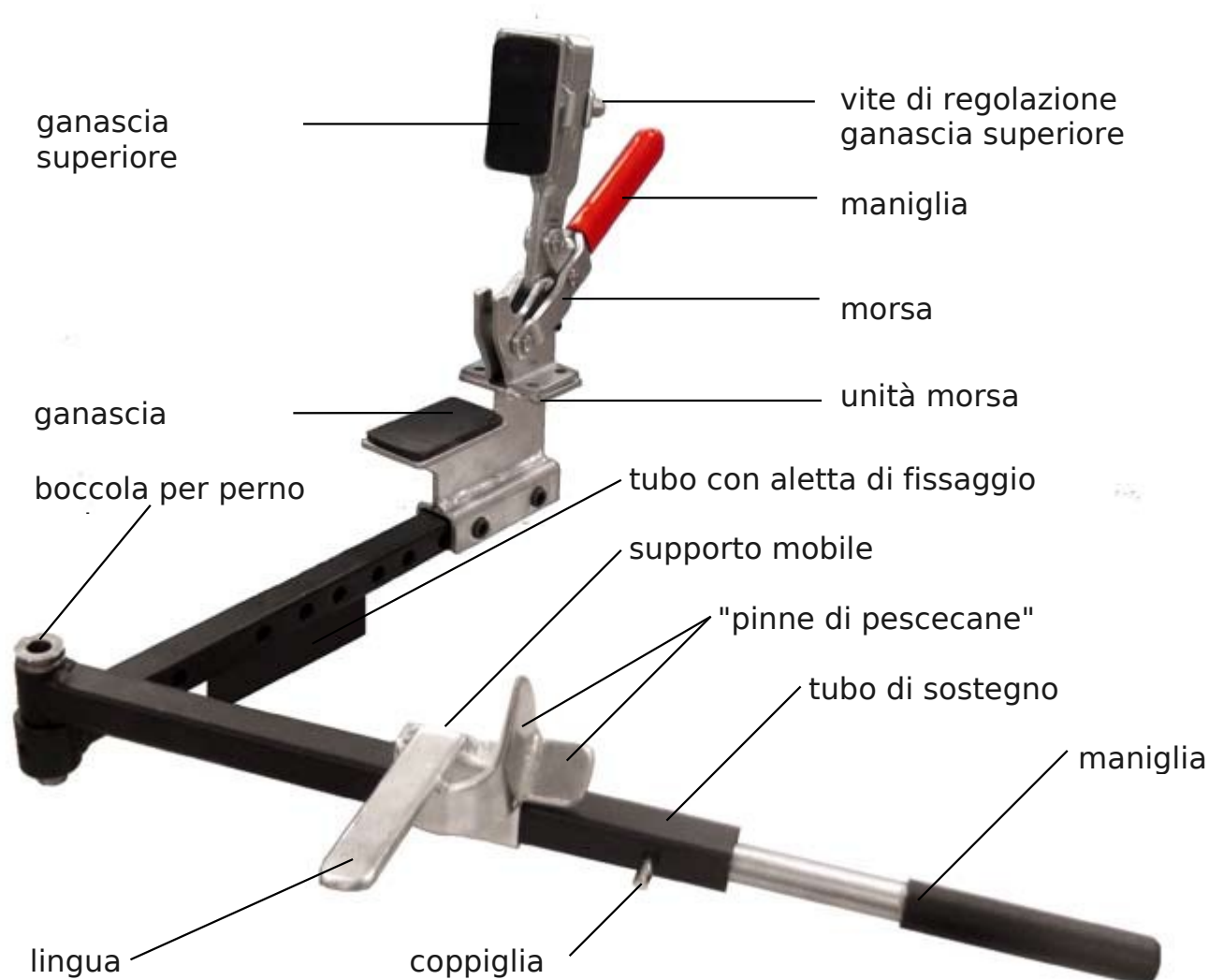

### assemblaggio dell'attrezzo:

1. l'attrezzo montagomme deve essere montato in maniera stabile: stringere l'aletta del tubo di fissaggio in una morsa fissa o avvitare l'aletta al piano di lavoro
2. inserire l'unità morsa sul tubo di fissaggio e bloccarla con le viti nella posizione desiderata, in dipendenza della misure dei copertoni da montare
3. poggiare il tubo di sostegno sul tubo di fissaggio in modo che i fori per la boccola corrispondano (il bordo largo in ottone in alto) e congiungere i due tubi con la boccola (F)
4. inserire il supporto mobile (grande per ruote da 18" a 26", piccolo per ruote da 4" a 16"). **NB**: la punta della pinna deve mostrare verso l'alto e la pinna piatta verso l'esterno (vedi immagine sopra)
5. inserire il tubo con la manopola nel tubo di sostegno e bloccarlo nella posizione desiderata con la coppiglia
6. l'attrezzo montagomme è assemblato e pronto per l'uso

## modalità d'uso:



**1.** per facilitare il montaggio spruzzare o insaponare copertone e cerchione con sapone di montaggio. Posizionare il supporto mobile sul tubo di sostegno in modo che il cerchione poggi sulla lingua ed aderisca internamente alla pinna



**2.** posizionarsi davanti all'attrezzo come nella foto, in modo che la morsa si trovi alla vostra sinistra. Inserire per un breve tratto il copertone sul cerchione. Adattare la distanza tra le ganasce della morsa alla larghezza del cerchione



**3.** bloccare il cerchione, con il copertone inserito, nella morsa e posizionare il copertone sul supporto mobile in modo che la "pinna di pescecane" alta si trovi tra copertone e cerchione, in modo da poter "guidare" il copertone sul cerchione



**4.** dopo aver adattato la distanza tra le ganasce, per bloccare la ruota nella morsa, spingere la maniglia in direzione della ruota fino a portarla in posizione verticale



**5.** girare lentamente il tubo di sostegno con la leva in senso orario facendo slittare il copertone sul cerchione. Porre molta attenzione che il copertone si posizioni correttamente



**6.** girando con la leva controllare continuamente che il copertone si inserisca correttamente nel cerchione. Eventualmente tornare indietro lentamente con la leva e ripetere l'operazione



**7.** il copertone è montato. Controllate un'ultima volta che il copertone sia montato correttamente sul cerchione



**8.** afferrare e sollevare la ruota con due mani, in modo da sfilare la pinna del supporto mobile dalla ruota



**9.** lavoro ultimato!

## **4. Pulizia e manutenzione**

Pulite l'attrezzo ad intervalli regolari. Anche se costruito con materiali di alta qualità, l'attrezzo durante l'uso è soggetto ad un certo logoramento, controllate perciò regolarmente in corretto funzionamento delle singole parti.

## **5. Smaltimento**

Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle oasi ecologiche.

*Mobilex A/S  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca  
info@mobilex-care.com*