


**Attrezzo montagomme mod. MBX 2115001  
Manuale d'uso e manutenzione**

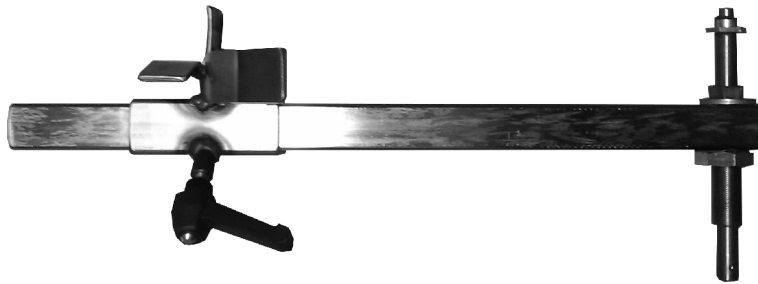

**MOBILEX A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca  
www.mobilex-care.com

## 1. Introduzione

Gentile cliente,

ha acquistato un prodotto di qualità Mobilex e ne siamo particolarmente felici. Questo manuale contiene una descrizione dettagliata del prodotto nonché informazioni importanti per il suo corretto utilizzo. Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente questo manuale e di osservare scrupolosamente tutte le istruzioni contenute, in particolare le note relative alla sicurezza per poter garantire sempre un uso sicuro ed efficiente del prodotto.

Nota: Nell'intento di migliorare sviluppiamo continuamente i nostri prodotti e pertanto ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti senza ulteriore preavviso.

### Destinazione d'uso

Il montagomme MBX 211501 è un attrezzo per facilitare ed accelerare il montaggio degli anelli in poliuretano (coperture piene da 20" a 28").

In caso di ulteriori domande La preghiamo di rivolgersi al Suo rivenditore o direttamente a Mobilex:

#### Mobilex A/S

Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca


Telefono: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex-care.com

### Note per la sicurezza

- ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare il prodotto, abbiano cura di leggere attentamente questo manuale
- difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia
- usare il prodotto solo per l'uso consentito e solo se in perfetto stato.
- non effettuate modifiche o riparazioni. Se il prodotto presentasse dei difetti o danni, avvisate immediatamente il Vs. rivenditore

### Descrizione del prodotto

L'attrezzo montagomme MBX 211501 è stato concepito e costruito come attrezzo per facilitare ed accelerare il montaggio degli anelli in poliuretano (coperture piene da 20" a 28") e può contribuire ad un notevole risparmio di tempo.

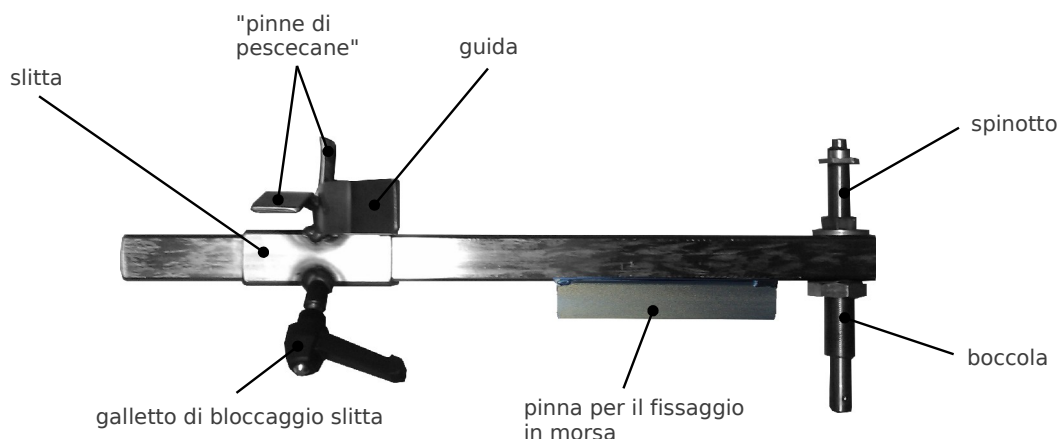


### Assemblaggio

L' attrezzo montagomme MBX 211501 è fornito già assemblato

## Modalità d'uso



1. fissate l'attrezzo nella morsa ed inserite la ruota con lo spinotto nella boccia situata sull'attrezzo

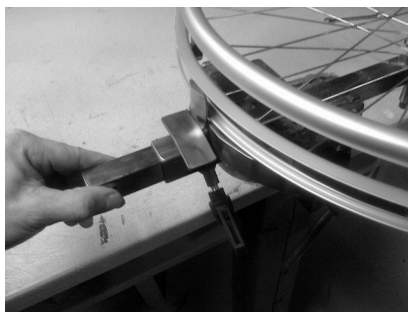

2. regolate le "pinne di pescecane" in modo che la pinna verticale poggia leggermente sul cerchione



3. ponete il copertone sul cerchione ed inseritelo nella gola del cerchione il più lungo possibile. Fate attenzione che la pinna verticale si inserisca tra cerchio e copertone



4. girate a mano la ruota fino al punto d'inizio da dove siete partiti girando. Il copertone sarà ora montato sul cerchione



5. estraete ora la ruota verso l'alto facendo uscire la pinna verticale dell'attrezzo tra copertone e cerchio

## Manutenzione

Normale sporcizia sulle parti metalliche ed in plastica possono essere rimosse con detergenti convenzionali. Nonostante la costruzione solida e l'uso di materiali durevoli anche il prodotto Mobilex è soggetto ad usura. Si raccomanda quindi di fare controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato.

## Smaltimento del prodotto

Il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici ma deve essere portato all'agenzia comunale per la gestione dei rifiuti.

## Garanzia

Mobilex A/S offre per tutti i prodotti commercializzati una garanzia contro difetti di materiale o difetti di costruzione per la durata del periodo di garanzia legale prevista dai rispettivi paesi nei quali è commercializzato il prodotto. Mobilex A/S non può essere responsabilizzata per danni derivanti da un uso improprio o da riparazioni e/o modifiche non professionalmente eseguite nonché per danni causati da negligenza ed usura o da alterazioni di componenti da parte dell'utente o di terzi. In questi casi si estingue la marcatura CE e di conseguenza la responsabilità e garanzia Mobilex per il prodotto.

La garanzia non copre i costi di trasporto nonché crediti per il mancato uso del prodotto durante il periodo di riparazione. Inoltre la garanzia non copre danni derivanti dalla non ottemperanza o mancata comprensione di questo manuale.