

Anti-Dekubitus-Matratze

Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktgesetz (MPG).

Garantie

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleissteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

2. Sicherheitshinweise

- dieses System ist nur zur Dekubitusprophylaxe
- dieses Produkt ist nur für die Druckentlastung von Patienten durch Wechseldruck vorgesehen und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden
- beachten Sie vor Verwendung der Wechseldruckmatratze in einem Pflegebett die Bedienungsanleitung und Vorschriften des Pflegebettherstellers. benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand.
- nehmen Sie keine konstruktiven Veränderungen vor und tauschen sie selbst keine Teile aus. Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden oder Reparaturen nötig sind, kontaktieren Sie bitte umgehendst Ihren Händler
- benutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
- sorgen Sie dafür, dass diese Anleitung von allen Personen, die das Produkt verwenden, auch sorgfältig gelesen wird. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen.

3. Beschreibung

Diese Wechseldruckmatratze dient der Dekubitusprophylaxe und wird mit einer Wechseldruckpumpe auf einer normalen Matratze eingesetzt. Die Wechseldruckmatratze hat 2 Luftzellensätze, die abwechselnd mit Luft gefüllt und wieder entleert werden. Somit verändern sich die Druckpunkte auf den im Bett liegenden Patienten und verhindern ein Wundliegen.

4. Installation

- Legen Sie die Wechseldruckmatratze so auf das Bett, dass die Schläuche Richtung Fussende liegen.
- Legen Sie ein Laken über die Matratze, um direkten Hautkontakt zu vermeiden.
- Hängen Sie die Pumpe mit Hilfe der Haken am Fussende auf.
- Verbinden Sie die Schläuche der Wechseldruckmatratze mit der Wechseldruckpumpe.
- Prüfen Sie und stellen Sie sicher, dass die Verbindungsschläuche nicht geknickt oder unter die Matratze geschoben und richtig am CPR-Ventil angeschlossen sind.
- Stecken Sie den Stecker in eine 220V Steckdose. (Die Steckdose muss geerdet sein.)

Hinweis: Ziehen Sie den Stecker, wenn die Wechseldruckmatratze nicht gebraucht wird!

5. Bedienung

Hinweis: Benutzen Sie keine anderen Pumpen, da die Wechseldruckmatratze auf einen bestimmten Druck ausgerichtet ist und sonst bei zu hohem Druck platzen könnte.

- Schalten Sie die Wechseldruckpumpe über den grünen Ein/Aus-Schalter ein. Zunächst leuchtet die gelbe Lampe für „Unterdruckwarnung“. Nachdem die Wechseldruckmatratze mit Luft gefüllt ist, erlischt die gelbe und die grüne Lampe leuchtet. Der Patient kann jetzt plaziert werden.
- Stellen Sie über den Druckwahlschalter den gewünschten Auflagedruck ein. Abhängig vom Körpergewicht ist der Druck so einzustellen, dass zwischen Körper und einer entleerten Kammer 2-fingerbreit Platz verbleibt. Lassen Sie sich von Ihrem Fachhändler/Therapeuten beraten!
- Wenn abnormaler Druck festgestellt wird, leuchtet die gelbe Lampe. Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse korrekt sind oder kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

6. Wartung und Pflege

Matratze und Wechseldruckpumpe in regelmässigen Abständen reinigen bzw. desinfizieren. Keine Dampfreinigung! Gerät nicht ins Wasser tauchen! Eine Desinfektion des Systems ist in regelmässigen Abständen und bei Benutzerwechsel durchzuführen. Der Bezug kann bei 30 Grad in der Waschmaschine gewaschen und bei 50 Grad im Trockner getrocknet werden. Nach der Reinigung muss die Wechseldruckmatratze an einem sonnengeschützten Ort getrocknet werden.

7. Lagerung

Lagern Sie die Wechseldruckpumpe mit locker zusammengerollten Schläuchen und Netzkabel und die aufgerollte Matratze (nicht falten) an einem trockenen und vor Staub geschützten Ort.

8. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müll-entsorgungsstelle gebracht werden.

9. Konformitätserklärung

Die Firma **Mobilex A/S**
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

erklärt hiermit, dass das Produkt **Anti-Dekubitus-Matratze 270001, 270002 und 270012** in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte, Anhang I vom 14 Juni 1993**

Lars Nygaard
Geschäftsführer
Mobilex A/S, Skanderborg



Skanderborg, am 05.03.2007

Zusammenfassungstabelle der Mobilex Tubular Anti-Dekubitusmatratzen:

Art.Nr.	Serie	Material	Maße	Pumpe	CE
270001	418 E	Nylon	10 x 80 x 190 cm	ATS005	93/42
270002	516 E	Nylon / PU	13 x 90 x 190 cm	ATS005	93/42
270012	820 E	Nylon	20 x 80 x 190 cm	ATS005	93/42