

Mobilex druckentlastende Matratzen 418E - 516E - 820Z Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns sehr. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

Zweckbestimmung

Diese Matratze dient zur Vorbeugung von Druckgeschwüren. Die Wirkung dieser Matratze funktioniert über 2 Zonen die abwechselnd mit Luft gefüllt und entleert werden. Dadurch variiert die punktuelle Druckbelastung am Körper, was wiederum das Risiko einer Blockierung der Blutgefäße oder des Gewebes minimiert.

Diese Matratze kann vorbeugend oder zur Behandlung von Druckgeschwüren (Dekubitus) des 1. und 2. Grades verwendet werden (Norton). Die Matratze darf nicht bei Patienten mit Knochenbrüchen oder mit Beschädigungen am Rückgrat angewendet werden.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
- Benutzen Sie das Produkt nur unter Aufsicht wenn es in der Nähe von Kindern oder psychisch labilen Menschen verwendet wird
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern
- Kontrollieren Sie die Düsen an der Pumpe auf Verstopfungen
- Die Pumpe muss an eine Wand-Steckdose angeschlossen werden

3. Funktionsbeschreibung

- Legen Sie die Matratze flach auf das Bett. Die druckentlastende Luftmatratze sollte auf einer Schaumstoffmatratze liegen.
- Decken Sie die Luftmatratze mit einem Laken ab, so daß kein Kontakt zwischen Haut und Matratze besteht.
- Hängen Sie die Pumpe an das Fußende des Bettes und beachten sie daß die Pumpe daran gut festhängt.
- Verbinden Sie die Luftschläuche der Matratze mit der Pumpe. Achten sie auch hier auf einen festen Sitz der Schläuche an der Pumpe.
- Verbinden Sie den Netzstecker mit einer wandmontierten Steckdose mit Erdung.
- Schalten Sie die Pumpe ein indem sie den Kippschalter am oberen Teils des Pumpengehäuses betätigen.
- Wenn sie die Pumpe nicht benützen, trennen Sie sie vom Netz indem sie den Stecker ziehen.
- Es dauert ca. 10 Min. bis die Matratze komplett gefüllt ist. Der Luftdruck der von der Pumpe erzeugt wird kann eingestellt werden, indem man am Regelknopf am oberen Teil der Pumpe dreht. Der Pumpendruck ist korrekt eingestellt, wenn man in Höhe des Gesäß des Patienten mit eine Hand unter die Luftmatratze fährt und dabei den Patienten kaum fühlen kann.

Handhabung beim Transport

Die Matratze kann für den Transport entleert und zusammengefaltet werden

Optionen / Zubehör

Für diesen Typ Matratze ist kein weiteres Zubehör verfügbar

4. Technische Daten:

Matratze	418E	516E	820E
Abmessungen (H x B x L)	10 x 80 x 190 cm	13 x 90 x 190 cm	20 x 83 x 190 cm
Max. Belastbarkeit	100 kg	100 kg	100 kg

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich an der Unterseite der Pumpe

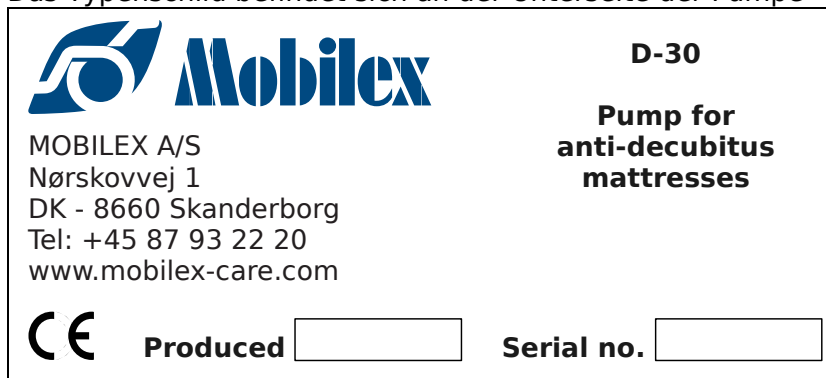


Abbildung des Typenschildes (*nicht* originales Beispiel)

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen lassen sich mit mildem Seifenwasser entfernen. Es dürfen keine stark basischen Reinigungsmittel oder steife Bürsten oder scharfe Gegenstände verwendet werden. Die Matratze kann auch mit einer 95% Alkohollösung gereinigt werden.

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

6. Allgemeine Problembhebungen

Problem	Lösungsvorschlag
Die Pumpe funktioniert nicht	Kontrollieren Sie ob die Pumpe ans Stromnetz angeschlossen ist und eingeschaltet ist.
Die Matratze füllt sich nicht	Kontrollieren Sie den Anschluss der Luftschläuche an die Pumpe. Wenn die Schläuche richtig angeschlossen sind und fest sitzen, kontrollieren Sie ob etwas den Luftfluss behindert oder die Schläuche abgeknickt sind.
Die Pumpe lärmt	Sollte die Pumpe außergewöhnlichen Lärm erzeugen, zeugt das von Abnutzung. Bitte kontaktieren Sie ihren Händler.

7. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

8. Garantie

Mobilex A/S gewährt auf alle vertriebenen Produkte eine Garantie gegen Material- oder Produktionsfehler für die Dauer der in den jeweiligen Ländern gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeit. Mobilex A/S übernimmt keine Gewährleistung für Schäden die aus unsachgemäßer oder nicht fachgerechter Montage und/oder Reparatur, durch Vernachlässigung und Verschleiß, sowie durch Veränderungen von Baugruppen durch den Benutzer oder Dritte entstanden sind. In diesen Fällen erlischt die CE Kennzeichnung und die Produkthaftung.

Die Garantie deckt keine Transportkosten sowie Schadensersatzansprüche die auf Nicht-Nutzung des Produktes während der Reparaturzeiten zurückzuführen sind. Des weiteren besteht keine Gewährleistung für Schäden die aus Nichtbeachtung oder Missverständnissen dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Bei Entdecken von Material oder Produktionsfehlern setzen Sie sich bitte sofort mit ihrem Händler oder direkt mit Mobilex A/S in Verbindung.

9. Konformitätserklärung (CE)

Die Firma Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Dänemark erklärt hiermit, dass das Produkt

Druckentlastende Matratzen 418E - 516E - 820Z mit Pumpe D-30

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des EU Rates 93/42/EWG**
für Medizinprodukte, Anhang I vom 14 Juni 1993

Lars Nygaard
Geschäftsführer
Mobilex A/S



.....
Unterschrift

Skanderborg, am 27.04.2010