

Materasso antidecubito

Istruzioni d'uso e manutenzione



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca
www.mobilex-care.com

Importante!

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso. Seguite sempre scrupolosamente le istruzioni contenute, in particolare gli avvisi per la sicurezza.

Per ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi al Vs. rivenditore di fiducia oppure direttamente alla Mobilex A/S:

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

telefono: +45 87 93 22 20
telex: +45 87 93 17 77
e-mail: info@mobilex-care.com

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto di qualità controllata Mobilex®

1. Avvisi generali

Marchio CE

questo prodotto soddisfa le norme comunitarie della direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici (vedi sezione 8 - dichiarazione di conformità)

Garanzia

il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. La garanzia decade se il prodotto non è usato correttamente e/o in modo improprio. La garanzia non copre la normale usura, se non derivante da un difetto di fabbricazione e non copre i costi di trasporto.

2. Avvisi per la sicurezza

- Ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare il prodotto, abbiano cura di leggere attentamente questo manuale ed i dati riportati sull'etichetta del prodotto
- difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia
- Usare il prodotto solo per l'uso consentito e solo se in perfetto stato.
- Non effettuate modifiche o riparazioni. Se il prodotto presentasse dei difetti o danni, avvisate immediatamente il Vs. rivenditore.

3. Descrizione

Questo materasso a pressione alternante è adatto alla profilassi antidecubito. Il materasso antidecubito va posato sopra al materasso normale e deve essere usato con una pompa a pressione alternante. Il materasso contiene due serie di celle areate, che la pompa gonfierà o sgonfierà in alternanza. Ciò permette di alternare i punti di pressione sul degente, in modo da evitare la creazione di ferite da decubito.

4. Installazione

- ponete il materasso sul letto, in modo che i tubi stiano dalla parte dei piedi
- ricoprite il materasso con un lenzuolo per evitare un contatto diretto con la pelle
- appendete la pompa con i suoi ganci al lato inferiore del letto
- collegate i tubi del materasso alla pompa
- controllate accuratamente che i tubi non presentino piegature e non passino sotto il materasso. Controllate che siano allacciati correttamente anche alla valvola CPR
- inserite la spina di corrente in una presa a 220V (la presa di corrente deve avere un contatto a terra).

Avviso: togliete la spina dalla presa, se il materasso non viene usato!

5. Uso

Avviso: non usate pompe diverse da quella fornita, dato che il materasso antidecubito è tarato su una pressione specifica e potrebbe danneggiarsi o esplodere, se collegato ad una pompa inadatta.

- accendete la pompa con l'interruttore verde (acceso/spento). Inizialmente si accenderà la spia gialla per "sottopressione". Dopo che il materasso si sarà riempito d'aria, la spia gialla si spegnerà e si accenderà la spia verde. Il paziente può distendersi sul materasso.
- regolate la pressione desiderata con la manopola di regolazione. In dipendenza del peso del paziente la pressione dovrà essere regolata a modo che tra una camera sgonfia ed il corpo del paziente rimanga uno spazio di ca. 3 cm. Il vostro terapeuta o rivenditore sarà in grado consigliarvi.
- se la pressione è fuori norma, si accenderà la spia gialla. Controllate che tutti gli allacciamenti siano corretti o contattate il vostro rivenditore di fiducia.

6. Pulizia e manutenzione

Ad intervalli regolari pulite e disinfettate il materasso e la pompa. Non usate vapore! Non immergete il materasso o la pompa nell'acqua! Una disinfezione totale del sistema è da effettuarsi ad intervalli regolari o a cambio utente. La fodera del materasso può essere lavata in lavatrice a 30° ed asciugata nell'asciugatore a 50°. Dopo la pulizia il materasso deve asciugarsi in un posto protetto dal sole.

7. Deposito

Immagazzinate la pompa con i tubi e cavi leggermente avvolti, assieme al materasso arrotolato (non piegato!) in un posto asciutto e protetto dalla polvere.

8. Smaltimento

Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle oasi ecologiche.

9. Dichiarazione di conformità

la ditta **Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Danimarca**, dichiara che il prodotto

**materasso antidecubito serie 418 E (cod. 270001),
serie 516 E (cod. 270002) e serie 820 E (cod. 270012)**

è costruito in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE:

**direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
appendice I, concernente i dispositivi medici**

Lars Nygaard
amministratore delegato
Mobilex A/S, Skanderborg



Skanderborg, li 10/03/2005

Tabella riassuntiva materassi antidecubito ad inserti Mobilex:

codice	serie	materiale	dimensioni	pompa	CE
270001	418 E	Nylon	10 x 80 x 190 cm	ATS005	93/42
270002	516 E	Nylon / PU	13 x 90 x 190 cm	ATS005	93/42
270012	820 E	Nylon	20 x 80 x 190 cm	ATS005	93/42