

BRUGERVEJLEDNING FOR EASY AIR ANTI-DECUBITUS MADRAS OG PUMPE

Denne pumpe er designet til at minimere risikoen for tryksår ved patienter der er sengeliggende. Ved skiftevis at fylde og tømme luftkamrene i madrassen ændres trykket på patienten og muliggør derfor også bedre luftcirkulation.

Installation:

1. Placer madrassen fladt på sengen. Slangerne til pumpen skal være i fodenden.
2. Dæk madrassen med et lagen for at undgå direkte kontakt med huden.
3. Hæng pumpen i fodenden og kontroller at den hænger stabilt.
4. Forbind slangerne fra madrassen med pumpens rør. Kontroller at de sidder godt fast.

NB: Kontroller at slangerne ikke er snoet således at luften ikke kan cirkulere. Hvis det er en madras af 400- eller 500-serien skal det kontrolleres at CPR-ventilen er tilsluttet korrekt.

CPR-funktionen muliggør øjeblikkelig tømning af madrassen.

5. Tilslut pumpen til 220V. Stikket bør have jord-forbindelse.
6. Tænd for pumpen på kontakten på pumpens højre side.

NB: Når pumpen ikke anvendes bør man slukke også på kontakten.

Anvendelse:

Advarsel: Der må ikke anvendes andre pumper til madrassen, idet madrassen er udviklet til et bestemt lufttryk som ikke må overskrides. Hvis dette finder sted risikeres punktering af madrassen.

Advarsel: Undlad at forsøge at reparere pumpen. Overlad dette til forhandleren.

1. Når lampen (4) for normalt tryk lyser grønt indikerer det at trykket er oppe på det ønskede niveau. Patienten kan nu placeres på madrassen. Samtidig vil lampen for lavt tryk (5) blive slukket. Det tager normalt ca. 30-45 minutter.
2. Check med hånden under patientens bagdel at der er tilstrækkeligt tryk på madrassen, således at patienten ikke er i kontakt med underlaget. Der skal være mellem 25 og 40 mm.

NB: Når trykket falder til et unormalt lavt niveau vil lampen (5) for lavt tryk blive tændt. Check i dette tilfælde om alle tilslutninger sidder korrekt. Hvis problemet fortsætter skyldes problemet sandsynligvis en utæthed i madrassen. Kontakt forhandleren for reparation.

Rengøring:

1. Pumpen må ikke udsættes for vand, men kan aftørres med en fugtig klud med et mildt vaskemiddel.
2. Tør betrækket over med en fugtig klud med et mildt vaskemiddel.
3. Blodpletter fjernes med en 1:9 Klorid opløsning. Pletterne vædes og tørrer i minimum 10 minutter, hvorefter der tørres efter med en ren, fugtig klud.
4. Top-betrækket (400- og 500-serien) lægges i desinficerende væske i den nødvendige tid.
5. Derefter vaskes betrækket ved maximum 30 grader i en vaske maskine.
6. Betrækket tørres derefter ved maximum 50 grader.
7. Madrassen sprayeres med desinficerende væske og skal først tørres af efter den nødvendige inkubationstid. Ved 400- og 500-serien afmonteres luftcellerne og der sprayeres fra alle sider.
8. Derefter tørres madrassen i fri luft i skygge.

Lagring af madrasser:

Rul madrassen sammen fra fod- mod hovedenden.

Madrassen må ikke foldes.

Vedligeholdelse:

Check madrassen for tegn på slid og huller.

Check at slangerne er forbundet.

Check at slangerne er intakte og at der ikke er revner.