

Mobilex trykflastningsmadras 250E Montage- og brugervejledning



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danmark
www.mobilex-care.com

1. Indledning

Kære kunde,

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet og vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vores produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

Formålsbeskrivelse

Formålet med dette produkt er at forebygge dannelsen af tryksår. Virkningen opnås idet madrassen er opdelt i 2 zoner, som skiftevis tømmes og fyldes med luft. Derved varieres trykbelastningen på et givet punkt på kroppen, hvorved risikoen for blokering af blodkar og væv minimeres.

Madrassen må kun anvendes forebyggende. Det er ikke en madras til behandling af tryksår.

Madrassen må ikke anvendes ved patienter med fraktioner på skelettet eller skader på rygraden.

Ved spørgsmål bedes de henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal anvendelse stoppes, og der skal øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Hold opsyn hvis produktet anvendes nær børn eller mentalt ustabile personer.
- Hold ledningen væk fra varme overflader.
- Undgå at blokere dyserne på pumpen.
- Skal tilkobles stikkontakt med jordforbindelse.

3. Beskrivelse

Funktionsbeskrivelse

- Placer luftmadrassen fladt på sengen. Der skal være en skummadrass eller lignende under luftmadrassen.
- Dæk luftmadrassen med et lagen, så direkte kontakt mellem luftmadrassen og huden undgås.
- Hæng pumpen på sengegavlen. Sørg for at pumpen sidder godt fast.
- Forbind slangerne fra pumpen og til luftmadrassen. Sørg for at de sidder sikkert fast.
- Sæt stikket fra pumpen i en stikkontakt med jordforbindelse.
- Tænd for pumpen ved at aktivere tænd-sluk knappen på højre side af pumpen.
- Når pumpen ikke benyttes tilrådes det af tage stikket ud af kontakten.
- Pumpens tryk kan justeres ved at dreje på knappen på pumpens overside. Trykket er indstillet korrekt, når man netop ikke kan mærke patienten når en hånd placeres under luftmadrassen under patientens bagdel.

- Det tager ca. 10 minutter før luftmadrassen er klar til anvendelse.

Håndtering ved transport

Madrassen kan foldes sammen for transport.

Tilbehør


Der er ikke noget tilbehør til dette produkt.

4. Tekniske data:

	Mobilex trykaflastningsmadras 250E
Størrelse af madras	6 x 90 x 200 cm (H x B x L)
Max. brugervægt	100 kg

Typeskilt

Typeskiltet befinder sig på undersiden af pumpen

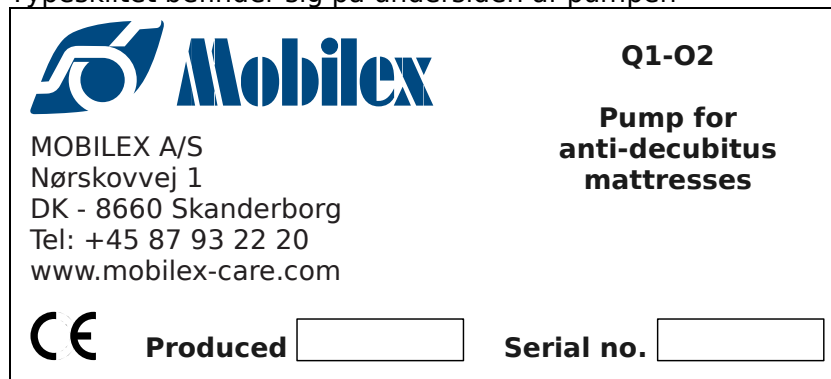

Billede af typeskiltet

5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen. Madrassen kan også tørres af med en 95 % spritopløsning.

Produktet er normalt vedligeholdelsesfrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

6. Generel problemafhjælpning

Problem	Afhjælpning
Pumpen virker ikke	Kontroller at der er tilsluttet strøm til pumpen, og at pumpen er tændt.
Madrassen fyldes ikke med luft	Prøv først at skrue helt op for trykket. Hvis dette er hjælper kontrolleres om slangerne er snoede eller om der er andet der forhindrer luft i at komme i madrassen.
Pumpen larmer	Hvis pumpen begynder at give unormale lyde fra sig er det et tegn på at den er slidt. Kontakt forhandleren.

7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktive ændringer på stolen uden vores skriftlige accept bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af kørestolen eller til Mobilex A/S direkte.

Garantien omfatter ikke erstatning for manglende benyttelse under reparation, og der ydes ikke erstatning for skader der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

Mobilex trykaflastningsmadras 250E

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG**
for medicinalprodukter, Del I fra 14 Juni 1993

Lars Nygaard
Adm. Direktør
Mobilex A/S

Skanderborg, den 27/4-2010



.....
Underskrift