

# Mobilex Luftkissen

Art.Nr. 27840B, 27845B & 27850B  
**Gebrauchsanleitung**



**MOBILEX A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Dänemark  
www.mobilex-care.com

## 1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns sehr. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

### Zweckbestimmung

Das Mobilex Luftkissen ist ein Medizinprodukt und darf nur als Anti-Dekubitus-Prophylaxe als Option beim Sitzen in Rollstühlen verwendet werden. Das Design und die Funktionalität gewährleisten eine gleichmäßige Druckverteilung des Körpergewichts des Benutzers beim Sitzen im Rollstuhl. Jede andere Verwendung ist nicht gestattet. Es ist kein Gerät das bereits bestehende Wunden heilen kann.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

### Mobilex A/S

Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex-care.com

## 2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
- Das Mobilex Luftkissen darf nur auf ebenen und stabilen Rollstuhlsitzen verwendet werden
- Niemals das Kissen auf ein anderes Kissen legen, das sich bereits im Rollstuhl befindet. Dies kann zu Instabilität und Benutzer-Verletzungen führen
- Die Größe des Kissens sollte zur Größe des Rollstuhlsitzes passen. Verwenden Sie keine Kissens die zu klein oder zu groß für Ihren Rollstuhl sind

## 3. Beschreibung

### Produkt Beschreibung

Das Mobilex Luftkissen ist eine Sitzunterlage. Deren Inneres besteht aus einer Luftkammer die mit Gel und Speicher-Schaum gefüllt ist. Die Luftkammer ist mit einem speziellen Ventil zur Luftdruck Einstellung ausgestattet. Der Benutzer "taucht" in das Kissen gemäß seiner Körperform und seinem Gewicht ein. Das Kissen verteilt das Gewicht des Benutzers gleichmäßig auf die Oberfläche des Kissens. Wenn das Ventil geschlossen wird behält das Kissen seine Form für eine optimale Druckverteilung. Das Kissen hat einen Inkontinenzbezug mit rutschfester Unterseite.

### Funktionsbeschreibung

- Legen Sie das Kissen auf den Rollstuhlsitz so dass sich das rote Ventil in der rechten vorderen Ecke des Sitzes befindet.
- Bevor Sie sich darauf setzen öffnen Sie das Ventil indem Sie die rote Kappe gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Luftkammer saugt nun automatisch Luft an.
- Setzen Sie sich auf das Kissen und warten ca. 10-15 Sekunden bis das Gesäß in das Kissen "eintaucht". Sobald das "Eintauchen" beendet ist schliessen Sie das Ventil indem Sie die rote Ventilkappe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Dadurch behält das Kissen Form und Härte
- Wenn das Kissen von verschiedenen Anwendern mit unterschiedlichem Körpergewicht verwendet wird, sollte obige Vorgang jedes Mal, wenn sich der Benutzer ändert wiederholt werden. Dadurch wird das Kissen an die individuellen Bedürfnisse angepasst
- Wenn Sie genannte Schritte nicht selbst ausführen können erbiten Sie die Unterstützung von jemandem, der Ihnen bei der Anpassung Ihres Kissens behilflich sein kann.

### ACHTUNG!

Entfernen Sie niemals das Ventil oder die Ventil-Kappe vom Kissen. Belassen Sie das Ventil niemals in geöffnetem Zustand, das führt zu konstanter Luftbewegung im Inneren des Kissens und verhindert das Erreichen der notwendigen Härte und Form. Dies kann zu Benutzer-Verletzungen führen, da das Kissen so nicht richtig funktionieren kann.

### 4. Technische Daten:

Art. Nr.	Breite	Tiefe	Höhe	Gewicht	Tragkraft
27840B	40 cm	40 cm	7,5 cm	1,15 kg	100 kg
27845B	45 cm	45 cm	7,5 cm	1,45 kg	100 kg
27850B	50 cm	48 cm	7,5 cm	1,75 kg	100 kg

### Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich am Kissenrand hinten/oben



Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

### 5. Wartung und Pflege

Waschen Sie den Bezug des Kissens regelmäßig und entfernen Sie Staub oder Flecken. Den Kissenbezug und das Kissen nicht bügeln! Normale Verschmutzungen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

### 6. Allgemeine Problembehebungen

Problembeschreibung	mögliche Ursache	was ist zu tun
Das Kissen hält den Druck nicht	Das Ventil ist nicht richtig geschlossen	Schließen Sie die Ventilkappe
Das Kissen hält den Druck immer noch nicht	Die Luftkammer ist beschädigt	Kontrollieren Sie die die Luftkammer auf Löcher, Schnitte oder sonstige Beschädigungen. Kontaktieren Sie Ihren Händler

## 7. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

## 8. Garantie

Mobilex A/S gewährt auf alle vertriebenen Produkte eine Garantie gegen Material- oder Produktionsfehler für die Dauer der in den jeweiligen Ländern gesetzlich vorgeschriebenen Garantiedauer. Mobilex A/S übernimmt keine Gewährleistung für Schäden die aus unsachgemäßer oder nicht fachgerechter Montage und/oder Reparatur, durch Vernachlässigung und Verschleiß, sowie durch Veränderungen von Baugruppen durch den Benutzer oder Dritte entstanden sind. In diesen Fällen erlischt die CE Kennzeichnung und die Produkthaftung.

Die Garantie deckt keine Transportkosten sowie Schadensersatzansprüche die auf Nicht-Nutzung des Produktes während der Reparaturzeiten zurückzuführen sind. Des weiteren besteht keine Gewährleistung für Schäden die aus Nichtbeachtung oder Missverständnissen dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Bei Entdecken von Material oder Produktionsfehlern setzen Sie sich bitte sofort mit ihrem Händler oder direkt mit Mobilex A/S in Verbindung.

## 9. Konformitätserklärung (CE)

Die Firma Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Dänemark erklärt hiermit, dass das Produkt

### **Mobilex Luftkissen 27840B, 27845B und 27850B\_**

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des EU Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte**  
Anhang I vom 14 Juni 1993

Lars Nygaard  
Geschäftsführer  
Mobilex A/S



.....  
Unterschrift

Skanderborg, am 01.07.2009