

Toilettensitzerhöhung Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG).

Garantie

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehendst Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
- Achten Sie darauf, daß die Toilettensitzerhöhung gut am WC fixiert ist und sich *nicht* seitlich verschieben läßt

3. Beschreibung und technische Daten

Produkt Beschreibung

Die Toilettensitzerhöhung ermöglicht durch die einfache Fixierung eine Montage an den meisten handelsüblichen Toilettenkeramiken. Die Toilettensitzerhöhung ist in drei Höhen (siehe technische Daten) und mit oder ohne Deckel lieferbar.

Technische Daten:

Toilettensitzerhöhung	5 cm	10 cm	15 cm
Gesamtbreite	37 cm	37 cm	37 cm
Gesamttiefe	40,5 cm	40,5 cm	40,5 cm
Gsamthöhe	16 cm	16 cm	16 cm
Sitzerhöhung	5 cm	10 cm	15 cm
Breite innen	21 cm	21 cm	21 cm
Tiefe innen	26,5 cm	26,5 cm	26,5 cm
Gewicht (ohne Deckel)	900 g	1 kg	1,1 kg
max. Belastbarkeit	130 kg	130 kg	130 kg

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich hinten an der Toilettensitzerhöhung.



Abbildung des Typenschildes (*nicht* originales Beispiel)

4. Montage und Bedienungsanleitung

1. den vorhandenen WC-Sitz und -Deckel entfernen.
2. die beiden seitlichen Fixierungsschrauben so weit wie möglich aufschrauben.
3. die Toilettensitzerhöhung auf die WC-Keramik aufsetzen und gerade ausrichten. Die Fixierungsschrauben müssen dabei hinten sein.
4. die beiden Fixierungsschrauben langsam zudrehen, bis die Klemmen an der WC-Keramik anliegen. Die Fixierungsschrauben nochmals ganz leicht andrehen, bis die Klemmen Halt finden.
5. **Vorsicht:** die Fixierungsschrauben nicht überdrehen, sobald die Klemmen an der WC-Keramik anliegen! Achten Sie darauf, daß die Toilettensitzerhöhung gut am WC fixiert ist und sich *nicht* seitlich verschieben läßt.

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiss. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmässigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

6. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

7. Konformitätserklärung

Die Firma **Mobilex A/S**
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

erklärt hiermit, dass das Produkt **Toilettensitzerhöhung 301063, 301064, 301103, 301104, 301105 und 301106** in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte, Anhang I vom 14 Juni 1993**

Der Verantwortliche:

Name: Lars Nygaard
Stellung: Geschäftsführer
Firma: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark

Skanderborg, den 05.03.2007

.....
Datum



.....
Unterschrift