

Alzawater

Istruzioni d'uso e manutenzione



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

www.mobilex-care.com

Importante!

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente questo manuale. Leggete e seguite scrupolosamente tutte le istruzioni e seguite particolarmente gli avvisi per la sicurezza!

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vs. rivenditore o direttamente alla Mobilex A/S:

Mobilex A/S

Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

telefono: +45 87 93 22 20
telefax: +45 87 93 17 77
e-mail: info@mobilex-care.com

1. Avvisi generali

Marchio CE

Questo prodotto è costruito a norma della direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. La garanzia decade se il prodotto non è usato correttamente o in modo improprio. Il normale logoramento è escluso da garanzia, eccetto per difetti di produzione. La garanzia non comprende il trasporto.

2. Avvisi di sicurezza

- usare il prodotto solo se è in perfette condizioni tecniche
- nel caso si riscontrasse un qualsiasi difetto o danneggiamento del prodotto, contattare immediatamente il rivenditore
- controllate quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Non caricate il prodotto con pesi superiori alla portata massima!
- non apportare modifiche al prodotto, se non esplicitamente autorizzate o proposte dal costruttore
- usare il prodotto solo per l'uso previsto e consentito
- controllate che l'alzawater sia montato in maniera stabile sulla tazza del water e non si sposti lateralmente

3. Descrizione e dati tecnici

Descrizione del prodotto

L'alzawater può essere fissato facilmente alla tazza di quasi tutti i WC standard. L'alzawater è fornibile in tre altezze diverse (vedi dati tecnici) e con o senza coperchio.

Dati tecnici:

alzawater	5 cm	10 cm	15 cm
larghezza totale	37 cm	37 cm	37 cm
profondità totale	40,5 cm	40,5 cm	40,5 cm
altezza (rialzo)	5 cm	10 cm	15 cm
larghezza interna	21 cm	21 cm	21 cm
profondità interna	26,5 cm	26,5 cm	26,5 cm
peso (senza coperchio)	900 g	1 kg	1,1 kg
portata max.	130 kg	130 kg	130 kg

Etichetta del prodotto

l'etichetta del prodotto si trova sulla parte posteriore dell'alzawater



esempio di etichetta (*non originale*)

4. montaggio ed uso

1. togliere la seduta ed il coperchio originale del water
2. aprire al massimo le due viti di fissaggio sui lati del alzawater
3. appoggiare l'alzawater sulla tazza del WC e controllare che sia allineato bene. Le due viti di fissaggio devono trovarsi nella parte posteriore
4. avvitare lentamente le due viti, fino a quando i morsetti vanno a toccare la tazza del WC. Stringere ancora leggermente le due viti per permettere ai morsetti di far presa sulla tazza.
5. **Attenzione:** appena i morsetti hanno presa sulla tazza, non stringere troppo le due viti, per evitare di romperne il filetto! Controllate che l'alzawater sia *fissato bene* al WC e non si sposti lateralmente

5. Manutenzione

Pulire il telaio e le parti in plastica con detergenti neutri e con panni morbidi e non abrasivi. Usate esclusivamente detergenti indicati alla pulizia e/o disinfezione (non usate solventi o abrasivi). Controllate le indicazioni del detergente.

6. Smaltimento

L'alzawater non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle „oasi ecologiche“

7. Dichiarazione di conformità

La ditta **Mobilex A/S,
Nørskovvej 1
8660 Skanderborg
Danimarca**

dichiaro

che il prodotto alzawater Mobilex è stato costruito in conformità alle seguenti direttive CEE:

- **direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici**

il responsabile:

nome: Lars Nygaard
posizione: amministratore delegato
azienda: Mobilex A/S,
Nørskovvej 1
8660 Skanderborg
Danimarca

Skanderborg, lì 05/03/2007

data



firma