

Fest montierbare WC-Erhöpfung **Montage- und Gebrauchsanleitung**



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG).

Garantie

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleisssteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehendst Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie die Toilettensitzerhöhung nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
- Achten Sie auf eine feste Verschraubung an die Toilettenkeramik
- Stellen Sie sicher, dass die Höhenverstellungen gleichmässig eingestellt sind
- Stützen Sie sich gleichmässig mit beiden Händen an den Armlehnen ab

3. Beschreibung und technische Daten

Produkt Beschreibung

Die 3-fach höhenverstellbare Toilettensitzerhöhung ermöglicht eine Montage an den meisten handelsüblichen Toilettenkeramiken. Die Fixierung erfolgt an den am WC vorhandenen Aufnahmelöchern. Die Armlehnen sind schwenkbar und ohne Werkzeug abnehmbar. Der Sitz kann zur Reinigung abgenommen werden.

Technische Daten:

Toilettensitzerhöhung	301701
Gesamtbreite	43 cm
Gesamttiefe	49,5 cm
Breite zwischen den Armlehnen	49 cm
einstellbare Sitzhöhen	9 cm, 13cm, 17cm
Gesamtgewicht	6,2 kg
Max. Benutzergewicht	120 kg
Verpackungsmaße	59 x 52 x 26 cm (L x B x H)

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite des Sitzes.



Abbildung des Typenschildes (*nicht* originales Beispiel)

4. Montage und Bedienung

1. Entfernen Sie den bestehenden WC-Sitz und -Deckel
2. Verschieben Sie die beiden Befestigungsgewindestangen auf das Lochmaß der Toilettenkeramik
3. Fixieren Sie die Toilettensitzerhöhung mit den Kunststoffbefestigungsmuttern
4. Stecken Sie die Armlehnen links und rechts in die vorhandenen Aufnahmen. Zur Montage müssen die Federverschlüsse gedrückt werden und nach dem Einstecken hörbar einrasten

Höhenverstellung

1. Entfernen Sie die Abdeckstopfen
2. Lösen Sie mit einem passendem Werkzeug (SW 13) die vorderen Rohrbefestigungsschrauben und verschrauben sie die Auflage an der gewünschten Position
3. Lösen Sie im hinteren Bereich die Handräder (Handradschrauben)
4. Versetzen Sie die Auflagegestange in die gleiche Position wie vorne und fixieren Sie diese
5. Verschließen Sie die Montagelöcher mit den Abdeckstopfen

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiss. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmässigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben fest montiert sind.

6. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

7. Konformitätserklärung

Die Firma

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

erklärt hiermit, dass das Produkt **Toilettensitzerhöhung 301701** in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte, Anhang I vom 14 Juni 1993**

Der Verantwortliche:

Name: Lars Nygaard
Stellung: Geschäftsführer
Firma: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark

Skanderborg, den 01.02.2006

.....
Datum



.....
Unterschrift