

Alzawater fisso 301702 **Manuale d'uso e manutenzione**



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca
www.mobilex-care.com

1. Introduzione

Gentile cliente,

ha acquistato un prodotto di qualità Mobilex e ne siamo particolarmente felici. Questo manuale contiene una descrizione dettagliata del prodotto nonché informazioni importanti per il suo corretto utilizzo. Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente questo manuale e di osservare scrupolosamente tutte le istruzioni contenute, in particolare le note relative alla sicurezza per poter garantire sempre un uso sicuro ed efficiente del prodotto.

Nota: Nell'intento di migliorare sviluppiamo continuamente i nostri prodotti e pertanto ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti senza ulteriore preavviso.

Destinazione d'uso

L'alzawater 301702 è un ausilio per la vita quotidiana che serve ad alzare la seduta del vostro WC di circa 10 cm per permettervi una seduta ed alzata facilitata.

In caso di ulteriori domande La preghiamo di rivolgersi al Suo rivenditore o direttamente a Mobilex

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

Telefono: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

2. Note per la sicurezza

- usare l'alzawater solo se è in perfette condizioni tecniche
- nel caso si riscontrasse un qualsiasi difetto o danneggiamento del prodotto, contattare immediatamente il rivenditore
- controllate quanto riportato sull'etichetta del prodotto e non caricate l'alzawater con pesi superiori alla portata massima!
- fissare l'alzawater alla tazza del water
- usare l'alzawater solo per l'uso previsto e consentito
- appoggiarsi uniformemente con le mani su tutt'e due i braccioli
- non montare o salire con i piedi sull'alzawater
- usare ed immagazzinare l'alzawater solo in ambienti chiusi (non all'aperto)

3. Descrizioni generali

Descrizione del prodotto

L'alzawater è adattabile a tutti i water standard. Si fissa a mezzo di perni filettati passanti nei fori per il coperchio presenti sul water. I braccioli sono reclinabili e staccabili senza uso d'attrezzi. Per una pulizia e/o disinfezione l'alzawater può essere facilmente rimosso, togliendo le viti di fissaggio dalle barre filettate.

Assemblaggio

1. Togliere il coperchio esistente dal sedile del WC
2. Svitare i due dadi di plastica dalle barre filettate dell'alzawater
3. Spostare le due barre filettate in modo che coincidano con i fori del vostro water
4. Poggiare l'alzawater sulla tazza del WC infilando le due barre filettate nei fori del water
5. Fissate l'alzawater avvitando i dadi in plastica sulle barre filettate e stringeteli bene
6. Inserite i braccioli nei supporti previsti tenendo premuto i fermi di bloccaggio con il pollice fino a quando i fermi scattano all'interno dell'alzawater
7. Assicurarsi che i braccioli in posizione ribassata poggino bene sui loro supporti e siano agganciati nella loro sede

Accessori opzionali

Per l'alzawater 301702 non sono disponibili ulteriori accessori.

4. Dati tecnici

Alzawater fisso	cod. 301702
Larghezza totale con braccioli	65,0 cm
Profondità	47,0 cm
Larghezza tra i braccioli	54,5 cm
Alzata	10 cm
Larghezza interna del foro WC	21,0 cm
Profondità del foro WC	26,5 cm
Peso	4,0 kg
Portata max.	120 kg
Misure d'imballo	49 x 41 x 26 cm

Targhetta di identificazione

L'etichetta identificativa si trova sulla parte posteriore dell'alzawater



immagine dell'etichetta (esempio non originale)

5. Manutenzione

Normale sporcizia sulle parti metalliche ed in plastica possono essere rimosse con detergenti convenzionali. Osservate le indicazioni del detergente ed usate solo prodotti adatti alla pulizia o la disinfezione (detergenti privi di solventi o abrasivi).

Nonostante la costruzione solida e l'uso di materiali durevoli anche il prodotto Mobilex è soggetto ad usura. Si raccomanda quindi di fare controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato.

6. Risoluzione di piccoli guasti

<i>Cosa succede?</i>	<i>Cosa fare?</i>
L'alzawater non è fisso sul water	Assicuratevi che l'alzawater poggi bene sulla tazza del water e che i galletti in plastica siano ben strette alle viti di fissaggio nella parte posteriore dell'alzawater siano ben fissate
I braccioli non sono stabili	Assicurarsi che i pulsantini a scatto dei braccioli non sono visibili dall'esterno. Assicurarsi che i braccioli in posizione ribassata poggino bene sui loro supporti e siano agganciati nella loro sede

7. Smaltimento del prodotto

Il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici ma deve essere portato all'agenzia comunale per la gestione dei rifiuti.

8. Garanzia

Mobilex A/S offre per tutti i prodotti commercializzati una garanzia contro difetti di materiale o difetti di costruzione per la durata del periodo di garanzia legale prevista dai rispettivi paesi nei quali è commercializzato il prodotto. Mobilex A/S non può essere responsabilizzata per danni derivanti da un uso improprio o da riparazioni e/o modifiche non professionalmente eseguite nonché per danni causati da negligenza ed usura o da alterazioni di componenti da parte dell'utente o di terzi. In questi casi si estingue la marcatura CE e di conseguenza la responsabilità e garanzia Mobilex per il prodotto.

La garanzia non copre i costi di trasporto nonché crediti per il mancato uso del prodotto durante il periodo di riparazione. Inoltre la garanzia non copre danni derivanti dalla non ottemperanza o mancata comprensione di questo manuale.

Nel caso si riscontrassero difetti di materiale o di fabbricazione contattate immediatamente il vostro rivenditore o direttamente la Mobilex A/S.

9. Dichiarazione di conformità (CE)

La ditta Mobilex A/S con sede in Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danimarca dichiara che il prodotto

alzawater fisso 301702

è stato progettato e costruito in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE:

- **direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993
appendice I concernente i dispositivi medici**

Lars Nygaard
Amministratore unico
Mobilex A/S



Skanderborg, lí 01/12/2009

.....
firma