

Faltbarer Duschstuhl

Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG).

Garantie

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleisssteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehendst Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber.
- Beachten Sie das zulässige Benutzergewicht.
- Bitte nutzen Sie den Duschstuhl nur für den vorgesehenen Einsatzbereich.
- Bitte verwenden Sie den Duschstuhl nicht als Tritthocker.
- Benutzen Sie den faltbaren Duschstuhl nur auf geraden und rutschsicheren Flächen.
- Stellen Sie die Teleskoprohre immer auf die gleiche Höhe ein.
- Nicht einseitig belasten! Nur senkrecht auf beide Armlehnen stützen.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie sich nicht, beim Aufstellen und Zusammenklappen des Duschstuhls, die Finger oder andere Körperteile einklemmen.

3. Beschreibung und technische Daten

Produkt Beschreibung

Der faltbare Mobilex-Duschstuhl besitzt alle Standard-Voraussetzungen eines regulären Duschstuhls und ist für einen leichten Transport und eine bequeme Lagerung entworfen und konstruiert worden. Der Duschstuhl dient dem Benutzer als Sitzhilfe während des Duschens. Durch die Pulverbeschichtung ist der Stuhl korrosionsbeständig.

Technische Daten

Faltbarer Duschstuhl	Art. 302010
Gesamthöhe	einstellbar von 83 bis 95 cm
Sitzbreite	53 cm
Sitztiefe	50 cm
Sitzhöhe	einstellbar von 48 bis 61 cm
Gesamtgewicht	6,4 kg
Max. Benutzergewicht	100 kg
Verpackungsmaße	60 x 16 x 82 cm (B x T x H)

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Rückenlehne.

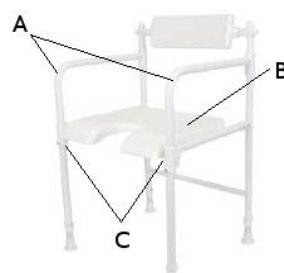


Abbildung 1: Typenschild (*nicht* originales Beispiel)

4. Bedienungsanleitung

Aufstellen (Abbildung 2)

1. Schwenken Sie den **rechten und linken Seitenrahmen (A)** nach vorne.
2. Klappen Sie den **Sitz (B)** nach oben und stecken Sie die Sitzrohre in die **Aufnahmen am Seitenrahmen (C)**.



Einstellen der gewünschten Sitzhöhe (Abbildung 3)

- Der Stuhl ist richtig eingestellt, wenn der Benutzer auf dem Stuhl sitzt und beide Füße auf dem Boden stehen.
- Während der Benutzung bitte keine Verstellungen vornehmen.
- Greifen Sie den **Clip (A)** zwischen Zeigefinger und Daumen und ziehen ihn heraus.
- Stellen Sie das Teleskoprohr auf die gewünschte Höhe ein.
- Drücken Sie den **Clip (A)** in das vorgesehene **Loch (B)**.
- Stellen Sie alle Teleskoprohre immer auf die selbe Höhe ein!

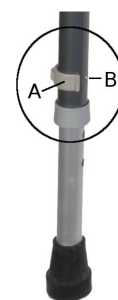


Abbildung 3

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiss. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmässigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

6. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

7. Konformitätserklärung

Die Firma

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

erklärt hiermit, dass das Produkt **Faltbarer Duschstuhl 302010** in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte, Anhang I vom 14 Juni 1993**

Der Verantwortliche:

Name: Lars Nygaard
Stellung: Geschäftsführer
Firma: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark

Skanderborg, den 01.02.2006

.....
Datum



.....
Unterschrift