

Sedia da comodo pieghevole con WC cod. 302011 **Manuale d'uso e manutenzione**



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca
www.mobilex-care.com

1. Introduzione

Gentile cliente,

ha acquistato un prodotto di qualità Mobilex e ne siamo particolarmente felici. Questo manuale contiene una descrizione dettagliata del prodotto nonché informazioni importanti per il suo corretto utilizzo. Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente questo manuale e di osservare scrupolosamente tutte le istruzioni contenute, in particolare le note relative alla sicurezza per poter garantire sempre un uso sicuro ed efficiente del prodotto.

Nota: Nell'intento di migliorare sviluppiamo continuamente i nostri prodotti e pertanto ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti senza ulteriore preavviso.

Destinazione d'uso

La sedia da comodo pieghevole è un ausilio destinato ad essere utilizzato nei servizi igienici o bagni. Il suo scopo è di agevolare l'utenza disabile ad utilizzare i servizi igienici. Qualsiasi altro utilizzo è vietato. Utilizzare la sedia da comodo solo in posizione seduta e non salire mai in piedi sulla sedia.

In caso di ulteriori domande La preghiamo di rivolgersi al Suo rivenditore o direttamente a Mobilex:

Mobilex A/S

Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

Telefono: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

2. Note per la sicurezza

- utilizzate il prodotto solo se in perfetto stato
- se il prodotto presenta un qualsiasi danno o difetto contattate immediatamente il Vostro rivenditore di fiducia
- annotare le informazioni sull'etichetta del prodotto
- non salire in piedi sulla sedia ed utilizzare il prodotto solo per l'uso consentito
- la sedia deve essere usata solo su superfici piane e non scivolose
- regolate i 4 piedi sempre alla medesima altezza
- non appoggiate il peso solo su un lato della sedia! Appoggiatevi sempre verticalmente ed in maniera equilibrata su ambedue i braccioli
- aprendo e ripiegando la sedia fate attenzione a non schiacciare dita o altre parti corporee

3. Descrizioni generali

Descrizione del prodotto

La sedia da 302011 ha tutte le premesse di una regolare sedia da comodo. E' stata progettata e costruita per agevolare l'uso dei servizi igienici. Non necessita di attrezzi per l'assemblaggio ed uso ed è facilmente trasportabile. La verniciatura a polvere epossidica rende la sedia altamente resistente alla corrosione.

Assemblaggio ed uso

a) Assemblaggio della sedia

1. Espandete i lati del telaio (A) e (B) in avanti in modo da formare un angolo retto (90°) con la parte posteriore del telaio
2. Abbassate il telaio della seduta e premete il passante (C) nei supporti (D). Ciò blocca la sedia rendendola stabile
3. Fate scivolare il secchio (E) da davanti nei supporti previsti sotto la seduta
4. Abbassate il coperchio del WC



b) Regolazione dell'altezza della seduta (lunghezza dei piedini)

L'altezza della seduta deve essere regolata secondo le esigenze dell'utente. Come regola generale l'altezza della seduta è regolata correttamente quando l'utente è seduto sulla sedia ed entrambi i piedi poggiano in piano sul pavimento.



1. Estrarre la clip di bloccaggio (A) dal piedino della sedia
2. Posizionare la gamba telescopica all'altezza desiderata
3. Inserire nuovamente la clip (A) nel tubo (B) per fissare l'altezza
4. Ripetere l'operazione per tutte le 4 le gambe della sedia

IMPORTANTE! Non cercare di regolare l'altezza della sedia se vi si trova una persona seduta

Trasporto

La sedia da comodo può facilmente essere ripiegata per il trasporto

Accessori

Non sono disponibili accessori per la sedia da comodo 302011

4. Dati tecnici

Sedia da comodo con WC	codice 302011
Altezza totale	83 - 95 cm
Altezza seduta (regolabile a scatti di 2,5 cm)	48 - 61 cm
Larghezza totale	53 cm
Profondità totale	50 cm
Peso	6,9 kg
Portata massima	100 kg
Dimensioni d'imballo	60 x 20 x 82 cm (L x P x A)

Etichetta

L'etichetta si trova sul telaio della sedia



immagine dell'etichetta (esempio non originale)

5. Pulizia e manutenzione

Normale sporcizia sulle parti metalliche ed in plastica possono essere rimosse con detergenti convenzionali. Osservate le indicazioni del detergente ed usate solo prodotti adatti alla pulizia o la disinfezione (detergenti privi di solventi o abrasivi).

La sedia da comodo Mobilex non necessita di manutenzione. Comunque nonostante la costruzione solida e l'uso di materiali durevoli anche questo prodotto Mobilex è soggetto ad usura. Si raccomanda quindi di fare controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato.

6. Risoluzione di piccoli guasti

<i>cosa succede?</i>	<i>quale può essere la causa?</i>	<i>cosa fare?</i>
la sedia è instabile	le gambe della sedia non sono regolate alla stessa altezza	regolate le gambe della sedia alla stessa altezza (vedi b. Regolazione dell'altezza)
la seduta non è in piano	i tubi del telaio seduta anteriormente non sono bloccati nella loro sede	controllate che le due parti laterali della sedia siano parallele e che il telaio della seduta sia inserito correttamente nelle due sedi. Spingete i due lati anteriori dei tubi della seduta verso il basso fino a sentire un leggero scatto di bloccaggio.

7. Smaltimento del prodotto

Il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici ma deve essere portato all'agenzia comunale per la gestione dei rifiuti.

8. Garanzia

Mobilex A/S offre per tutti i prodotti commercializzati una garanzia contro difetti di materiale o difetti di costruzione per la durata del periodo di garanzia legale prevista dai rispettivi paesi nei quali è commercializzato il prodotto. Mobilex A/S non può essere responsabilizzata per danni derivanti da un uso improprio o da riparazioni e/o modifiche non professionalmente eseguite nonché per danni causati da negligenza ed usura o da alterazioni di componenti da parte dell'utente o di terzi. In questi casi si estingue la marcatura CE e di conseguenza la responsabilità e garanzia Mobilex per il prodotto.

La garanzia non copre i costi di trasporto nonché crediti per il mancato uso del prodotto durante il periodo di riparazione. Inoltre la garanzia non copre danni derivanti dalla non ottemperanza o mancata comprensione di questo manuale.

Nel caso si riscontrassero difetti di materiale o di fabbricazione contattate immediatamente il vostro rivenditore o direttamente la Mobilex A/S.

9. Dichiarazione di conformità (CE)

La ditta Mobilex A/S con sede in Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danimarca dichiara che il prodotto

Sedia da comodo con WC 302011

è stato progettato e costruito in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE:

- **direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993**
appendice I concernente i dispositivi medici

Lars Nygaard
Amministratore unico
Mobilex A/S



.....
firma

Skanderborg, lí 12/01/2010