

## Badewannen-Einhängesitz Montage- und Gebrauchsanleitung



**MOBILEX A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Dänemark  
www.mobilex-care.com

## 1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns sehr. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

### Zweckbestimmung

Der Mobilex Badewannen-Einhängesitz ist ausschließlich für das Sitzen beim Baden in einer Badewanne gedacht.

Bei Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

**Mobilex A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: [info@mobilex-care.com](mailto:info@mobilex-care.com)

## 2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler
- Passen Sie den Sitz an die Breite der Badewanne an (siehe Funktionsbeschreibung)
- Achten Sie beim Einlegen in die Badewanne auf einen korrekten und stabilen Sitz des Einhängesitzes
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Für das Einsteigen und Aussteigen ist eine Begleitperson erforderlich
- Benutzen Sie die Sitzfläche lediglich zum Sitzen
- Bitte nutzen Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Einsatzbereich

## 3. Beschreibung

### Montagehinweise

Der Badewannen-Einhängesitz wird bereit montiert geliefert. Vor dem Gebrauch aber bitte auf einen korrekten Sitz der weichen Auflage und der Clips zur Breitenanpassung (unter dem Sitz) achten.

### Produkt Beschreibung

Der Mobilex Badewannen-Einhängesitz hat einen Rahmen aus Aluminium und eine Sitzauflage aus weichem PUR. Die 4 Auflageflächen für den Wannenrand sind Endstücken aus Gummi ausgestattet um ein Verrutschen zu verhindern.

### Funktionsbeschreibung

Der Mobilex Badewannen-Einhängesitz wird montiert geliefert und einfach in die Badewanne eingehängt. Die 4 Gummi-Endstücke müssen dabei stabil am Badewannenrand aufliegen. Eventuell muss der Badewannen-Einhängesitz an die Breite der Badewanne angepasst werden, indem man die 4 Clips unter dem Sitz entfernt und die Rohre der Halterung nach außen schiebt, bis alle 4 Endstücke stabil am Wannenrand aufliegen. Dann alle 4 Clips zur Befestigung wieder anbringen.

### Optionen / Zubehör

Für den Badewannen Einhänge-Sitz ist als Zubehör eine Rückenlehne mit weicher grauer Lehne lieferbar. Die Lehne wird ohne Werkzeug mittels Clips an den am Sitz n befestigt. Lieferbar in den zum Sitz passenden Rahmenfarben weiß oder grau.

#### 4. Technische Daten:

	302012 und 202013
Gesamtbreite	75 - 91 cm
Gesamttiefe	42 cm
Gesamthöhe	23 cm
Sitzbreite	41 cm
Sitztiefe	34 cm
Badewannenbreite (innen)	62 cm - 78 cm
Gesamtgewicht	2,7 kg
Max. Benutzergewicht	130 kg
Verpackungsmaße (L x B x H), 2 Stck.	77 x 47 x 28 cm

#### Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich am hinteren Rahmenrohr



Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

#### 5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

#### 6. Allgemeine Problembehebungen

Problembeschreibung	mögliche Ursache	was ist zu tun
die weiche Sitzauflage verrutscht, bzw. sitzt nicht fest	die Haltestöpsel sind nicht eingerastet	den Sitz umdrehen und kontrollieren ob die Haltestöpsel des Sitzes richtig eingerastet sind. Eventuell von oben fest in die vorgesehene Öffnung pressen.
der Sitz liegt nicht waagrecht auf den 4 Gummihalte auf	Gummi-Endstücke nicht richtig gedreht	alle 4 Endstücke so am Rohr drehen, dass alle geriffelten Flächen der Endstücke nach unten zeigen

## 7. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

## 8. Garantie

Mobilex A/S gewährt auf alle vertriebenen Produkte eine Garantie gegen Material- oder Produktionsfehler für die Dauer der in den jeweiligen Ländern gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeit. Mobilex A/S übernimmt keine Gewährleistung für Schäden die aus unsachgemäßer oder nicht fachgerechter Montage und/oder Reparatur, durch Vernachlässigung und Verschleiß, sowie durch Veränderungen von Baugruppen durch den Benutzer oder Dritte entstanden sind. In diesen Fällen erlischt die CE Kennzeichnung und die Produkthaftung.

Die Garantie deckt keine Transportkosten sowie Schadensersatzansprüche die auf Nicht-Nutzung des Produktes während der Reparaturzeiten zurückzuführen sind. Des weiteren besteht keine Gewährleistung für Schäden die aus Nichtbeachtung oder Missverständnissen dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Bei Entdecken von Material oder Produktionsfehlern setzen Sie sich bitte sofort mit ihrem Händler oder direkt mit Mobilex A/S in Verbindung.

## 9. Konformitätserklärung (CE)

Die Firma Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Dänemark erklärt hiermit, dass das Produkt

### **Mobilex Badewannen Einhängesitz 302012 und 302013**

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des EU Rates 93/42/EWG**  
für Medizinprodukte, Anhang I vom 14 Juni 1993

Lars Nygaard  
Geschäftsführer  
Mobilex A/S



Skanderborg, am 01.02.2010

.....  
Unterschrift