

Sedile da vasca Mobilex Manuale d'uso e manutenzione



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca
www.mobilex-care.com

1. Introduzione

Gentile cliente,

ha acquistato un prodotto di qualità Mobilex e ne siamo particolarmente felici. Questo manuale contiene una descrizione dettagliata del prodotto nonché informazioni importanti per il suo corretto utilizzo. Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente questo manuale e di osservare scrupolosamente tutte le istruzioni contenute, in particolare le note relative alla sicurezza per poter garantire sempre un uso sicuro ed efficiente del prodotto.

Nota: Nell'intento di migliorare sviluppiamo continuamente i nostri prodotti e pertanto ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti senza ulteriore preavviso.

In caso di ulteriori domande La preghiamo di rivolgersi al Suo rivenditore o direttamente a Mobilex:

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

Telefono: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

Destinazione d'uso, uso consentito

Il sedile da vasca da bagno Mobilex è stato progettato per uso domestico e per facilitare la seduta dell'utente nella vasca da bagno. Verificarne il corretto funzionamento quando si installa il sedile per la prima volta.

2. Note per la sicurezza

- utilizzate il prodotto solo se in perfetto stato
- se il prodotto presenta un qualsiasi danno o difetto contattate immediatamente il Vostro rivenditore di fiducia
- annotare le informazioni sull'etichetta del prodotto
- adattate il sedile alla larghezza della vasca (vedi descrizione di funzionamento)
- quando inserite il sedile nella vasca controllare che i 4 terminali poggino perfettamente e stabilmente sul bordo della vasca
- per salire e scendere dal sedile da vasca è necessaria l'assistenza di una persona accompagnante
- utilizzare il prodotto solo per l'uso consentito

3. Descrizioni generali

Assemblaggio

Il sedile da vasca Mobilex è fornito già assemblato. Verificare il corretto funzionamento quando si installa il sedile per la prima volta e controllare che sia adatto alla larghezza della vasca.

Descrizione del prodotto

Il sedile da vasca Mobilex ha un telaio in alluminio, la seduta in PUR morbido ed i terminali d'appoggio in gomma.

Descrizione di funzionamento

Il sedile da vasca Mobilex si inserisce nella vasca da bagno appoggiando i 4 terminali sul bordo della vasca. Eventualmente può rendersi necessario adattarlo alla larghezza della vasca togliendo le 4 clips presenti inferiormente sui tubi portanti del telaio per allargare il sedile. Infine re-inserire tutte e 4 le clips per fissare il telaio.

Accessori opzionali

Per il sedile da vasca è disponibile come accessorio un comodo schienale morbido da applicare al sedile nei fori previsti senza bisogno di attrezzi. Lo schienale è disponibile nei colori del telaio della seduta, bianco o grigio metallizzato, schienale in PUR morbido grigio.

4. Dati tecnici

| sedile da vasca | 302012 e 302013 |
|---|------------------|
| larghezza totale (registrabile) | 75 - 91 cm |
| profondità totale | 42 cm |
| altezza totale | 23 cm |
| larghezza seduta | 41 cm |
| profondità seduta | 34 cm |
| per vasche da bagno con larghezza interna | da 62 cm a 78 cm |
| peso totale | 2,7 kg |
| peso massimo utente | 150 kg |
| misure d'imballo (L x P x A), 2 pz. | 77 x 47 x 28 cm |

Targhetta di identificazione

L'etichetta identificativa si trova sulla parte bassa del telaio

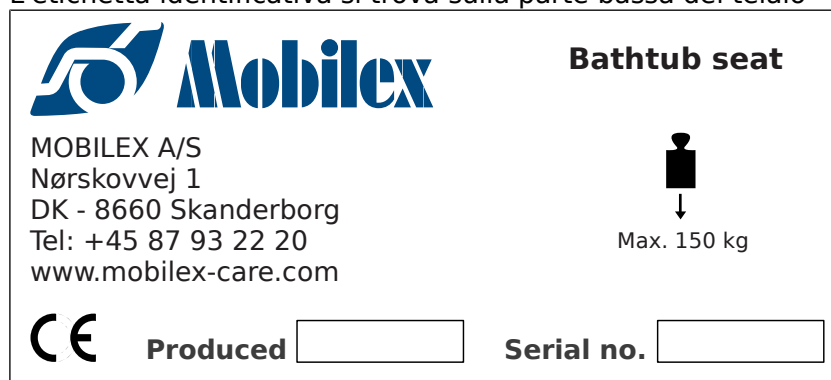


immagine dell'etichetta (esempio non originale)

5. Manutenzione

Normale sporcizia sulle parti metalliche ed in plastica possono essere rimosse con detergenti convenzionali. Osservate le indicazioni del detergente ed usate solo prodotti adatti alla pulizia o la disinfezione (detergenti privi di solventi o abrasivi).

Nonostante la costruzione solida e l'uso di materiali durevoli anche il prodotto Mobilex è soggetto ad usura. Si raccomanda quindi di fare controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato.

6. Risoluzione di piccoli guasti

| descrizione del problema | possibile causa | cosa fare |
|--|--|--|
| la seduta morbida si sposta o non è fissa sul sedile | i tappini della seduta non sono inseriti correttamente negli appositi fori | capovolgere il sedile e controllare che i 4 tappini della seduta grigia siano inseriti correttamente nei appositi fori. Eventualmente premere sulla seduta in corrispondenza dei tappini in modo che questi entrino e si aggancino al sedile |
| il sedile non poggia perfettamente con i 4 terminali sul bordo della vasca | i terminali in gomma non sono perfettamente allineati | girare i terminali in gomma sui 4 tubi in modo che tutte le parte zigrinate guardino verso il basso |

7. Smaltimento del prodotto

Il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici ma deve essere portato all'agenzia comunale per la gestione dei rifiuti.

8. Garanzia

Mobilex A/S offre per tutti i prodotti commercializzati una garanzia contro difetti di materiale o difetti di costruzione per la durata del periodo di garanzia legale prevista dai rispettivi paesi nei quali è commercializzato il prodotto. Mobilex A/S non può essere responsabilizzata per danni derivanti da un uso improprio o da riparazioni e/o modifiche non professionalmente eseguite nonché per danni causati da negligenza ed usura o da alterazioni di componenti da parte dell'utente o di terzi. In questi casi si estingue la marcatura CE e di conseguenza la responsabilità e garanzia Mobilex per il prodotto.

La garanzia non copre i costi di trasporto nonché crediti per il mancato uso del prodotto durante il periodo di riparazione. Inoltre la garanzia non copre danni derivanti dalla non ottemperanza o mancata comprensione di questo manuale.

Nel caso si riscontrassero difetti di materiale o di fabbricazione contattate immediatamente il vostro rivenditore o direttamente la Mobilex A/S.

10. Dichiarazione di conformità (CE)

La ditta Mobilex A/S con sede in Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danimarca dichiara che il prodotto


sedile da vasca Mobilex 302012 e 302013

è stato progettato e costruito in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE:

- **direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993**
appendice I concernente i dispositivi medici

Lars Nygaard
Amministratore unico
Mobilex A/S

Skanderborg, lí 01/02/2010

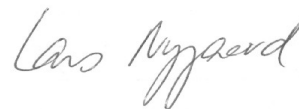

.....
firma