

# Bade-Toiletstol - 302018

## Montage - og brugervejledning



**MOBILEX A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark  
[www.mobilex-care.com](http://www.mobilex-care.com)

## 1. Indledning

Kære kunde,

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

### Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for støtte og sidde mulighed i forbindelse med bad og toiletbesøg.

Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Ved spørgsmål bedes De henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

### Mobilex A/S

Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex-care.com

## 2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktive ændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- I forbindelse med justeringer, sammenklapning m.m er der risiko for at klemme fingrene.
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag
- Produktet må ikke anvendes til at stå på.
- Alle hjul SKAL hele tiden være i kontakt med underlaget uden brug. Dette sikrer at produktet er i balance hvorved uheld undgås.
- Når produktet anvendes i stationære situationer skal hjulene låses.

## 3. Beskrivelse

### Produktbeskrivelse

Den Bade- toiletstolen har alle de normale funktioner som en standard badestol, og kan derudover bruges i forbindelse med toiletbesøg. Den er designet til brugere der har brug for siddestøtte under bad og toiletbesøg. Stolen er fremstillet af aluminium og er derfor korrosionsbestandig. Der skal ikke anvendes andet værktøj til samling end en unbrakonøgle.

Stolen leveres i en kasse, adskilt, for at spare plads under transport.

Indholdet er:

- 1 ramme med sæde
- 1 ryg
- 2 fodstøtter
- 4 hjul med bremse
- 4 bolte og møtrikker for montering af hjul
- 1 spand med lås
- 1 PU lås for at dække sædets udskæring
- 1 brugervejledning



### Montagebeskrivelse

Bade- toiletstolen monteres som på billedet overfor. Vi anbefaler følgende rækkefølge:

- Tag alle dele ud af kassen og check at alle dele er der. Hvis der mangler noget skal der tages kontakt til forhandleren øjeblikkeligt.
- Vend rammen på hovedet og sæt den på gulvet.
- Indsæt hjulenes monteringsrør i hver rørende. Der er boret 2 huller (A & B) i såvel monteringsrøret på hjulet og i rammen. Hjulene kan monteres i 3 forskellige højder. Sørg for at alle hjul er monteret til samme højde. Fastspænd boltene forsvarligt.
- Nu vendes rammen om. Lås hjulenes bremser før der fortsættes.
- Monter ryggens rør i de 2 montagehuller på bagsiden af rammen. Fastgør ryggen ved at dreje på grebene.
- Monter låget på spanden. Skub det ind i skinnerne monteret under sædet. Gøres fra fronten af stolen. Derefter lukkes udskæringen med PU-låget.
- Monter fodstøtterne ved at isætte plastproppen i toppen af fodstøtterne i rørenderne i rammefronten. Drej derefter fodstøtten til den låser.



### Funktionsbeskrivelse

- For at aktivere bremserne trædes på bremsepedalen indtil den låser. For at låse på vippes pedalen opad med tåen.
- Bremserne skal altid aktiveres når stolen parkeres med en bruger i den. Bremserne skal specielt altid aktiveres når der parkeres på skrånende underlag.
- Fodstøtterne kan reguleres i længden ved at løsne justeringsbolten. Herefter trækkes fodstøtten ud til den ønskede længde, hvorefter justeringsbolten spændes igen.
- Spanden bør kun bruges til personer der ikke kan anvendes et normalt toilet. For anvendelse aftaget PU-låget, samt spandens låg. Efter anvendelse sættes låget på spanden før spanden fjernes. PU-låget monteres igen.
- Tøm og rengør altid spanden efter anvendelse.
- For at aftage fodstøtterne aktiveres låsegrebet, og fodstøtten drejes til side og tages af.
- Stolen må ikke køres med en bruger når fodstøtterne ikke er korrekt monteret. Brugerens fødder skal altid være på fodpladerne under transport.
- Armlænene kan svinges op. Dette gør det nemmere at flytte en bruger og er også en fordel under vask. Brugeren må ikke sidde i stolen uden opsyn når armlænene er løftet op.

### Transport beskrivelse

Bade- Toiletstolen er ikke beregnet til hyppig transport. Hvis det er nødvendigt at transportere den og der ikke er tilstrækkelig plads til rådighed til at transportere den usamlet, anbefales det at adskille den omvendt af montagebeskrivelsen.

### Tilbehør:


Det er muligt at udskifte de 2 bageste 5" hjul med 24" hjul. Alle dele, inkl. monteringsbeslag og bremses findes i tilbehørssættet 302017.

Beskrivelse af montage af 24" hjul:



- Aftag de 2 bageste 5" hjul ved at løsne boltene.
- Placer monteringsbeslagene som vist på ovenstående billede.
- Der er boret flere huller i rammen for muliggøre højdejustering. Vælg en højde og isæt og fastgør monteringsboltene med de tilhørende bolte og skiver.
- Tryk på quick release akslen der er placeret i midten af hjulene. Isæt akslen i beslagene så langt ind den kan komme og slip trykknoppen.
- Tag fat i hjulene og kontroller at de sidder helt fast.
- For at aftage hjulene trykkes på trykknoppen samtidig med at der rykkes i hjulet med den anden hånd.
- Efter montage af 24" hjul kan det være nødvendigt at justere de forreste hjul så stolen står vandret.

*Bremse montage beskrivelse:*

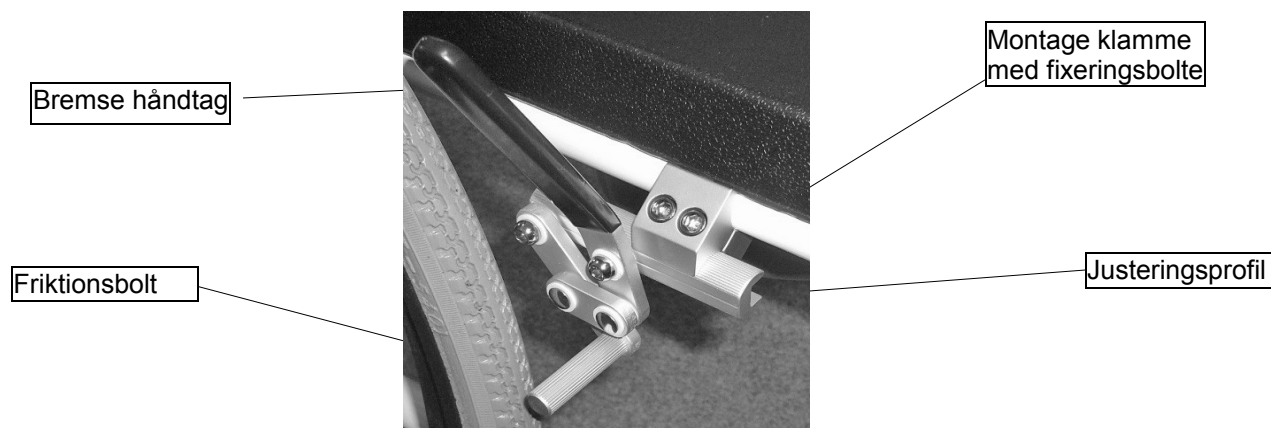

- Når 24" hjul monteres er det nødvendigt at monteres normale kørestols bremses.
- Bremsene består af montageklammer, selve bremsen og 2 fixeringsbolte.
- Indsæt bremsens justeringsprofil i bremseklammens mindste åbning.
- Placer montageklammen på stolen horisontale rør som vist på billedet.
- Flyt bremsen indtil friktionsboltene næsten rører dækket.
- Fastfør boltene så bremsen sidder stabilt.
- For at aktivere bremsene skubbes bremsehåndtaget fremad. For at slippe bremsen trækkes håndtaget bagud.

#### 4. Tekniske data

Bade- toilet stol	302018	302018 med 24" hjul Tilbehør: 302017
Total højde (justerbar):	90 - 95 cm (i 25 mm trin)	90 - 95 cm (i 25 mm trin)
Sæde bredde:	45 cm	45 cm
Total bredde:	57 cm	65 cm
Max. bredde mellem armlæn	46,5	46,5
Sæde dybde	43 cm	43 cm
Sæde højde (justerbar)	49-54 cm (i 25 mm trin)	49-54 cm (i 25 mm trin)
Ryg højde	47 cm	47 cm
Total vægt:	14,3 kg	17,2 kg
Max. belastning	130 kg	130 kg

#### Type skilt

Typeskiltet er placeret nederst på rammen



#### 5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mildt sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsefrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

#### 6. Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Badestolen er ikke stabil	Hjulene er justerede til forskellige højder.	Juster alle hjulene til samme højde.
Hjulene drejer ikke let.	Der har samlet sig skidt på hjulenes aksel.	Rengør hjulenes aksler for skidt.

#### 7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

#### 8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktive ændringer på produktet uden vores skriftlige accept bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte.

Garantien omfatter ikke erstatning for manglende benyttelse under reparation, og der ydes ikke erstatning for skader der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

**Bade- Toiletstol 302018**

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinske produkter  
Del I fra 14 Juni 1993**

Lars Nygaard  
Adm. Direktør  
Mobilex A/S

Skanderborg, den 15/6-2009



.....  
Underskrift