

Badewannen-Drehsitz Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG).

Garantie

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleisssteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehendst Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Achten Sie darauf, dass die Auflage-Elemente korrekt auf die Breite der Wanne eingestellt sind, d.h. die Auflage-Elemente müssen vollständig auf dem Badewannenrand aufliegen!
- Die Auflage-Elemente sowie der Wannenrand sind im Auflagebereich seifen- und duschmittelfrei zu halten. – Rutschgefahr!
- Bitte nutzen Sie den Badewannendrehsitz nur für den vorgesehenen Einsatzbereich.
- Steigen Sie nicht auf den Badewannendrehsitz.

3. Beschreibung und technische Daten

Produktbeschreibung

Der Badewannendrehstuhl ist auf alle handelsüblichen Badewannenbreiten einstellbar. Die Drehbarkeit des Stuhles ermöglicht dem Benutzer ein bequemes Einsetzen in die Badewanne. Der Badewannendrehstuhl besteht aus 2 Teilen: die Basis, die in der Wanne fixiert wird, und die Sitzeinheit, die 360 Grad um die Basis rotiert (mit 4 Arretierungen).

Technische Daten:

Badewannendrehstuhl	302020
Gesamtbreite	72 cm
Gesamttiefe	52 cm
Gesamthöhe	47 cm
Sitzbreite	43 cm
Sitztiefe	37 cm
Rückenlehnenhöhe	31 cm
Badewannenbreite (innen)	55 cm – 64 cm
Gesamtgewicht	7 kg
Max. Benutzergewicht	120 kg
Verpackungsmaße (L x B x H)	74 cm x 57 cm x 39 cm

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Rückenlehne.

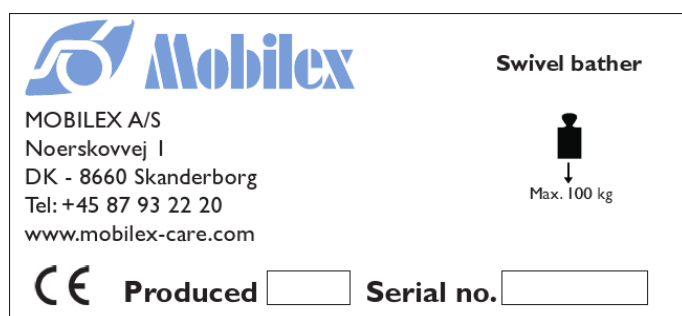


Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

4. Bedienungsanleitung

- Setzen Sie den Basis-Rahmen auf die Badewanne.
- Achten Sie darauf, dass alle 4 Arme auf dem Badewannenrand aufliegen.
- Fixieren Sie die Basis mit Hilfe der 2 Klemmschrauben an der Badewanneninnenseite.
- Befestigen Sie die Sitzeinheit auf den dafür vorgesehenen Sockel der Basis.
- Vergewissern Sie sich, dass der Sitz frei rotieren kann.
- Fixieren Sie mit Hilfe des Sterngriffes die Sitzeinheit auf der Basis.
- Drehen Sie die Sitzeinheit quer zum Wannenrand bis der Verstellhebel einrastet.
- Halten Sie sich mit beiden Händen an den Armlehnen fest und setzen sich auf den Sitz.
- Heben Sie nun den Verstellhebel und drehen Sie Ihren Körper längs zur Badewanne bis die Arretierung wieder einrastet. Die Beine müssen dazu angehoben werden.
- Für den Ausstieg verfahren Sie bitte in umgekehrter Reihenfolge

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiss. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmässigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

6. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

7. Konformitätserklärung

Die Firma **Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark** erklärt hiermit, daß das Produkt **Badewannendrehstz 302020** in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte,**
Anhang I vom 14 Juni 1993

Der Verantwortliche:

Lars Nygaard, Geschäftsführer der Firma Mobilex A/S, Skanderborg, Dänemark



Skanderborg, den 17.03.2006

.....
Datum

.....
Unterschrift