

Sedia girevole da vasca

Manuale d'uso e manutenzione



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

www.mobilex-care.com

Importante!

Prima di usare la sedia, leggere attentamente questo manuale. Leggete e seguite scrupolosamente tutte le istruzioni ed in particolare gli avvisi per la sicurezza!

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vs. rivenditore o direttamente alla Mobilex A/S:

Mobilex A/S
Noerskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

Telefono: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: [**info@mobilex-care.com**](mailto:info@mobilex-care.com)

1. Avvisi generali

Marchio CE

Questo prodotto è costruito a norma della direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. La garanzia decade se il prodotto non è usato correttamente o in modo improprio. Il normale logoramento è escluso da garanzia, eccetto per difetti di produzione. La garanzia non comprende il trasporto.

2. Avvisi di sicurezza

- usare la sedia girevole solo se è in perfette condizioni tecniche
- nel caso si riscontrasse un qualsiasi difetto o danneggiamento della sedia, contattare immediatamente il rivenditore.
- controllate quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Non caricate la sedia con pesi superiori alla portata massima!
- fate attenzione che i terminali d'appoggio siano regolati in modo corretto per la larghezza della vasca. Nota: i terminali d'appoggio devono appoggiare perfettamente sul bordo della vasca!
- sia i terminali d'appoggio che il bordo della vasca devono essere assolutamente tenuti liberi da sapone o schiuma – pericolo di scivolamento!
- usare la sedia girevole solo per l'uso previsto e consentito.
- non montare o salire con i piedi sulla sedia girevole.

3. Descrizione e dati tecnici

La sedia girevole Mobilex è adattabile in larghezza a tutte le vasche da bagno standard. La possibilità di ruotare la sedia permette all'utente una comoda entrata ed uscita dalla vasca da bagno. La sedia è composta da 2 parti: *la base*, che deve essere fissata alla vasca, e *la seduta*, che può ruotare a 360° sulla base (con 4 posizioni di arresto).

Dati tecnici:

larghezza totale:	72 cm
profondità totale:	52 cm
altezza totale:	47 cm
larghezza seduta:	43 cm
profondità della seduta:	37 cm
altezza dello schienale:	31 cm
per larghezza vasca (interna):	55 cm – 64 cm
peso totale:	7 kg
portata massima:	120 kg
misure d'imballo:	lunghezza 74 cm, larghezza 57 cm, altezza 39 cm

Etichetta identificativa del prodotto

L'etichetta si trova sulla parte posteriore dello schienale.



4. Istruzioni per l'uso

- poggiate il telaio della base sulla vasca da bagno
- fate attenzione che tutti i *terminali* delle quattro braccia poggino perfettamente sul bordo della vasca
- aggiustate l'*asta di bloccaggio* alla larghezza interna della vasca e fissate il telaio della sedia serrando le due *viti* dell'asta.
- congiungete la *seduta* al telaio inserendola nello zoccolo previsto
- assicurarsi che la *seduta* possa ruotare liberamente
- fissare la *seduta* al telaio con l'aiuto della manopola a stella
- ruotare la seduta obliquamente al bordo vasca fino all'arresto della *leva di bloccaggio*
- sedetevi sulla sedia tenendovi con tutte due le mani ai *braccioli*
- alzate la *leva di bloccaggio* e girate il corpo per lungo nella vasca fino all'arresto della *leva di bloccaggio*. Questa operazione va eseguita alzando le gambe.
- per uscire dalla vasca invertite la procedura

5. Manutenzione

Pulire il telaio e le parti in plastica con detersivi neutri e con panni morbidi e non abrasivi. Usate esclusivamente detersivi indicati per la pulizia e/o disinfezione (non usate solventi o abrasivi). Controllate le indicazioni del detersivo. È consigliato far controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato, prestando particolare attenzione alle parti di bloccaggio e fissaggio.

6. Smaltimento

La sedia girevole Mobilex non può essere smaltita con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle „oasi ecologiche“

7. Illustrazione

