

## **Sedia girevole da vasca 302022**

### **Manuale d'uso e manutenzione**



**MOBILEX A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca

[www.mobilex-care.com](http://www.mobilex-care.com)

## **Importante!**

**Prima di usare la sedia, leggere attentamente questo manuale. Leggete e seguite scrupolosamente tutte le istruzioni ed in particolare gli avvisi per la sicurezza!**

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vs. rivenditore o direttamente alla Mobilex A/S:

**Mobilex A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca

Telefono: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex-care.com

## **1. Avvisi generali**

### **Marchio CE**

Questo prodotto è costruito a norma della direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici

### **Garanzia**


Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. La garanzia decade se il prodotto non è usato correttamente o in modo improprio. Il normale logoramento è escluso da garanzia, eccetto per difetti di produzione. La garanzia non comprende il trasporto.

## **2. Avvisi di sicurezza**

- usare la sedia girevole solo se è in perfette condizioni tecniche
- nel caso si riscontrasse un qualsiasi difetto o danneggiamento della sedia, contattare immediatamente il rivenditore
- controllate quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Non caricate la sedia con pesi superiori alla portata massima!
- fate attenzione che i terminali d'appoggio siano regolati in modo corretto per la larghezza della vasca. Nota: i piedini d'appoggio devono appoggiare perfettamente sul bordo della vasca!
- sia i terminali d'appoggio che il bordo della vasca devono essere assolutamente tenuti liberi da sapone o schiuma – pericolo di scivolamento!
- usare la sedia girevole solo per l'uso previsto e consentito
- non montare o salire con i piedi sulla sedia girevole

### 3. Illustrazione e descrizione del prodotto

La sedia da vasca Mobilex è dotata di un telaio in alluminio con seduta e schienale in PUR morbido grigio. È possibile spostare la seduta lateralmente sul telaio per meglio adattarla alla vasca ed evitare che la rotazione possa essere ostacolata dai rubinetti o altro. I braccioli e lo schienale sono fissati al telaio con clips e possono essere facilmente rimossi. Le 4 braccia del telaio hanno terminali in gomma per evitare ammaccature o graffiature della vasca e per assicurare un posizionamento sicuro della sedia sui bordi della vasca. Due viti di bloccaggio regolabili servono ad evitare lo spostamento laterale del telaio, una volta inserito nella vasca.

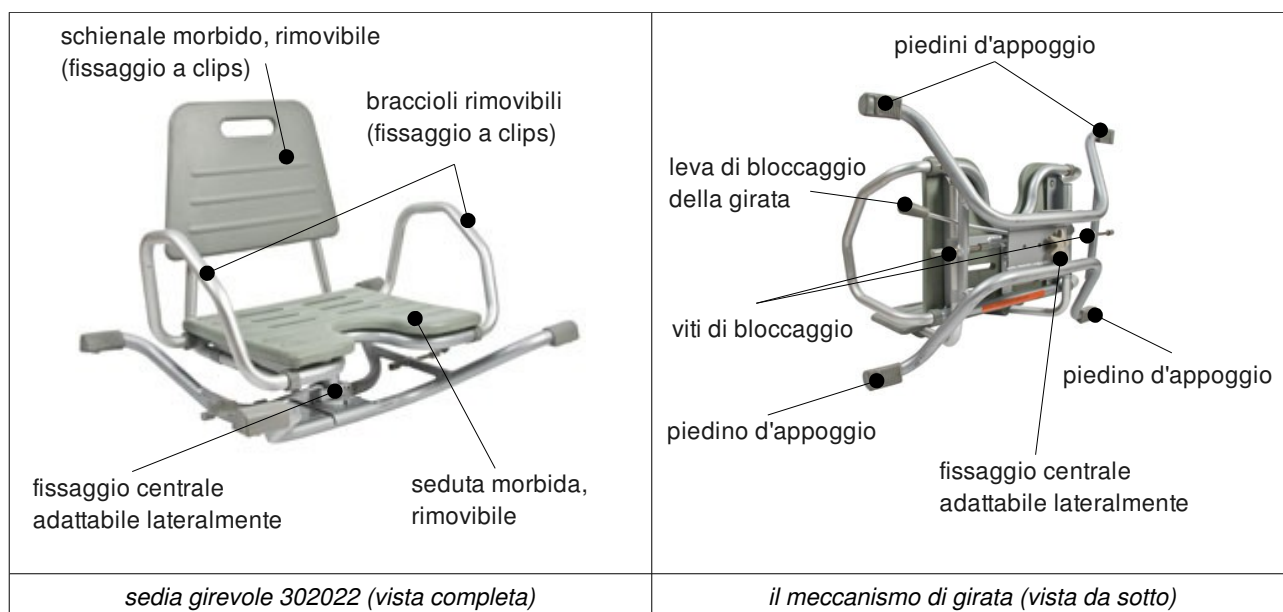

### 4. Dati tecnici

La sedia girevole Mobilex è adatta alla maggior parte delle vasche da bagno standard. La rotazione della seduta e la possibilità di togliere i braccioli permette all'utente una comoda entrata ed uscita dalla vasca da bagno. La sedia è composta da 2 parti: *la base*, che deve essere posizionata e bloccata alla vasca, e *la seduta* che può ruotare a 360° sulla base (con 4 posizioni di arresto).

Dati tecnici	codice 302022
larghezza totale	71 cm
profondità totale	54 cm
altezza totale	57 cm
larghezza della seduta (PUR morbido)	41 cm
profondità della seduta (PUR morbido)	34 cm
altezza dello schienale (PUR morbido)	38 cm
per vasche di larghezza (interna)	57 cm – 66 cm
peso totale	4,88 kg
portata massima	130 kg

## Etichetta identificativa del prodotto

L'etichetta si trova sul tubo portante del telaio



*esempio d'etichetta (non originale)*

## 5. Istruzioni per l'assemblaggio e per l'uso

- inserite i tubi portanti dello schienale nei supporti del telaio e bloccateli con le clips
- infilate lo schienale morbido sui tubi portanti e spingetelo fino in fondo
- inserite i due braccioli nei relativi supporti del telaio e bloccateli con le clips
- poggiate il telaio sulla vasca da bagno, facendo attenzione che *tutti i 4 terminali* poggino perfettamente sul bordo della vasca. Per evitare spostamenti laterali del telaio, fissate le *viti di bloccaggio* in modo che premano e si blocchino ai bordi della vasca
- assicurarsi che la *seduta* possa ruotare liberamente. Eventualmente è possibile spostare la seduta lateralmente sul telaio (3 posizioni). Per fare ciò svitate la manopola a stella e spostate la seduta lateralmente nella posizione più adatta, poi fissate la seduta nuovamente al telaio avvitando la manopola a stella
- ruotare la seduta obliquamente al bordo vasca fino all'arresto della *leva di bloccaggio*
- sedetevi sulla sedia tenendovi con tutte due le mani ai *braccioli*. Se necessario, per una entrata/uscita più comoda i braccioli possono essere facilmente rimossi
- alzate la *leva di bloccaggio* e girate il corpo per lungo nella vasca fino all'arresto della *leva di bloccaggio*. Questa operazione va eseguita alzando le gambe.
- per uscire dalla vasca invertite la procedura

## 6. Manutenzione

Pulire il telaio e le parti in gomma o PUR solo con detergenti neutri e con panni morbidi e non abrasivi. Usate esclusivamente detergenti indicati per la pulizia e/o disinfezione (non usate solventi o abrasivi). Controllate le indicazioni del detergente. È consigliato far controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato, prestando particolare attenzione alle parti di bloccaggio e fissaggio.

## 7. Smaltimento

La sedia girevole Mobilex non può essere smaltita con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle „oasi ecologiche“

## 8. Dichiarazione di conformità CE

La ditta **Mobilex A/S,**  
**Nørskovvej 1**  
**DK-8660 Skanderborg**  
**Danimarca**

dichiara che il prodotto **sedia girevole da vasca 302022** è stato progettato e costruito in conformità alle seguenti direttive CEE:

- **direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici**

### il responsabile

**nome:** Lars Nygaard  
**posizione:** amministratore  
**azienda:** Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Danimarca



Skanderborg, li 09/06/2008