

Badewannenbrett

Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktgesetz (MPG).

Garantie

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleissteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehendst Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber. Beachten Sie das zulässige Benutzergewicht.
- Bitte nutzen Sie das Badewannenbrett nur für den vorgesehenen Einsatzbereich.
- Bitte stellen Sie sich nicht auf das Badewannenbrett.
- Nutzen und Lagern Sie das Badewannenbrett nur im Haus (nicht draußen).
- Stellen Sie sicher, dass das Badewannenbrett an die jeweilige genutzte Badewanne genauestens angepasst wird.

3. Beschreibung und technische Daten

Produkt Beschreibung

Das Badewannenbrett ermöglicht ein bequemes, erhöhtes und sicheres Einsitzen in die Badewanne. Dies wird durch den einseitig angebrachten Handgriff unterstützt. Das Badewannenbrett lässt sich gut verstauen und transportieren. Individuelle Einstellmöglichkeiten bieten eine genaue Anpassung an jede herkömmlichen Badewanne. Die raue Oberfläche optimiert das sichere Sitzen. Anti-Rutsch-Kappen stabilisieren den Sitz und verhindern Kratzer an der Badewanneninnenseite.

Technische Daten:

Badewannenbrett	Art. Nr. 302030
Sitztiefe	32 cm
Sitzbreite	70,5 cm
Gesamthöhe m. Handgriff	18 cm
einstellbare Innenbreite	41 cm - 64,5 cm
Gesamtgewicht	2,7 kg
Max. Benutzergewicht	220 kg
Verpackungsmaße	73 cm Länge, 35 cm Breite, 9 cm Höhe

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Brettes.



Abbildung des Typenschildes (*nicht* originales Beispiel)

4. Bedienungsanleitung

Montieren Sie den Handgriff mit Hilfe der 2 Flachsrauben auf der einen Seite des Brettes. Die Schrauben werden an der Unterseite des Brettes fixiert (mit Hilfe einer Münze). Die Schrauben für die Fixierung der Füße werden ebenso von unten durch die Schlitze mit den Füßen verschraubt. Stellen Sie den Abstand der Füße so ein, dass sich das Brett in der Badewanne seitlich nicht hin- und herschieben lässt und alle 4 Füße Kontakt mit der Badewanneninnenwand haben. Beide Enden des Badewannenbrettes müssen auf dem Badewannenrand aufliegen.

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiss. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmässigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

6. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

7. Konformitätserklärung

Die Firma

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

erklärt hiermit, dass das Produkt **Badewannenbrett 302030** in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte, Anhang I vom 14 Juni 1993**

Der Verantwortliche:

Name: Lars Nygaard
Stellung: Geschäftsführer
Firma: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark

Skanderborg, den 06.02.2006

.....
Datum



.....
Unterschrift