

## **Asse da vasca 302030**

### **Istruzioni d'uso e manutenzione**



**MOBILEX A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca

[www.mobilex-care.com](http://www.mobilex-care.com)

## Importante!

**Prima di usare il prodotto, leggere attentamente questo manuale. Leggete e seguite scrupolosamente tutte le istruzioni e seguite particolarmente gli avvisi per la sicurezza!**

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vs. rivenditore o direttamente alla Mobilex A/S:

### **Mobilex A/S**

Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca

telefono: +45 87 93 22 20  
telefax: +45 87 93 17 77  
e-mail: [info@mobilex-care.com](mailto:info@mobilex-care.com)

## 1. Avvisi generali

### **Marchio CE**

Questo prodotto è costruito a norma della direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici

### **Garanzia**

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. La garanzia decade se il prodotto non è usato correttamente o in modo improprio. Il normale logoramento è escluso da garanzia, eccetto per difetti di produzione. La garanzia non comprende il trasporto.

## 2. Avvisi di sicurezza

- usare il prodotto solo se è in perfette condizioni tecniche
- nel caso si riscontrasse un qualsiasi difetto o danneggiamento del prodotto, contattare immediatamente il rivenditore
- il montaggio deve essere eseguito solo da personale qualificato
- controllate quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Non caricate il prodotto con pesi superiori alla portata massima!
- non apportare modifiche al prodotto, se non esplicitamente autorizzate o proposte dal costruttore
- usare il prodotto solo per l'uso previsto e consentito
- non salire sull'asse da vasca, eccetto seduti
- il prodotto è indicato solo per uso e stoccaggio in interni
- assicurarsi che l'asse da vasca venga adattata esattamente alla vasca da bagno prevista

### 3. Descrizione e dati tecnici

#### Descrizione del prodotto

L'asse da vasca con il suo grande maniglione laterale, permette una seduta comoda e sicura nella vasca da bagno. Grazie alle sue dimensioni ed al peso ridotto, è facilmente trasportabile e riponibile. A mezzo della regolazione individuale è possibile addattare l'asse a tutte le vasche da bagno convenzionali standard. La superficie ruvida antiscivolo permette una seduta sicura ed i tappi anti-scivolo, regolati in modo adeguato, stabilizzano l'asse sulla vasca evitando anche graffi all'interno della vasca.

#### Dati tecnici:

asse da vasca	art. nr. 302030
profondità	32 cm
larghezza	70,5 cm
altezza (maniglione compreso)	18 cm
larghezza interna regolabile	41 cm - 64,5 cm
peso totale	2,7 kg
portata massima	220 kg
misure d'imballo	lung. 73 cm, largh. 35 cm, altezza 9 cm

#### Etichetta del prodotto

L'etichetta del prodotto si trova sul lato inferiore dell'asse da vasca.



immagine dell'etichetta (esempio non originale)

### 4. Istruzioni d'uso

Fissate il maniglione con le 2 viti a lato dell'asse da vasca. Le viti si fissano da sotto con l'aiuto di una moneta. Anche i tappi (piedini) si montano da sotto sull'asse da vasca, inserendo e bloccando le viti nelle apposite fessure dell'asse. Regolate la distanza tra i tappi in modo che l'asse non possa spostarsi lateralmente sulla vasca ed i 4 tappi abbiano contatto con il bordo interno della vasca. Assicurarsi assolutamente che ambedue i bordi dell'asse poggino stabilmente sul bordo della vasca e che la distanza tra i tappi di bloccaggio sia regolata adeguatamente, affinché l'asse non si sposti lateralmente sulla vasca.

## 5. Manutenzione

Pulire le parti in metallo o in plastica solo con detergenti neutri e panni morbidi e non abrasivi. Usate esclusivamente detergenti indicati alla pulizia e/o disinfezione (non usate solventi o abrasivi). Controllate le indicazioni per il detergente.

È consigliato far controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato, prestando particolare attenzione alle parti di bloccaggio e fissaggio.

## 6. Smaltimento

Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle „oasi ecologiche“

## 7. Dichiarazione di conformità

La ditta **Mobilex A/S,  
Nørskovvej 1  
8660 Skanderborg  
Danimarca**

dichiara che il prodotto **asse da vasca 302030** è stato costruito in conformità alle seguenti direttive CEE:

- **direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici**

### il responsabile

**nome:** Lars Nygaard  
**posizione:** amministratore delegato  
**azienda:** Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Danimarca



Skanderborg, lì 06/02/2006

-----  
data

-----  
firma