

## **Duschklappsitz 302040 und 302041 Bedienungsanleitung**



**MOBILEX A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Dänemark

[www.mobilex-care.com](http://www.mobilex-care.com)

## **Wichtig!**

**Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Duschklappsitzes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit!**

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S:

Mobilex A/S  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Dänemark

Telephone: +45 87932220  
Telefax: +45 87931777  
E-Mail: info@mobilex-care.com

## **1. Allgemeine Hinweise**

### **CE-Kennzeichnung**

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG).

### **Garantie**

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleissteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

## **2. Sicherheitshinweise**

- Benutzen Sie den Duschklappsitz nur im einwandfreiem technischen Zustand.
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler an dem Sitz vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.
- Die Montage darf nur durch geschultes Fachpersonal und an stabilen Wänden ausgeführt werden.
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber. Beachten Sie das zulässige Benutzergewicht.
- Bitte nutzen Sie den Duschklappsitz nur für den vorgesehenen Einsatzbereich.
- Bitte verwenden Sie den Duschklappsitz nicht als Tritthocker.
- Stellen Sie die Teleskop-Rohre immer auf die gleiche Höhe ein.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim Aufstellen und Zusammenklappen des Duschklappsitzes sich nicht die Finger oder andere Körperteile klemmen.

### 3. Produktbeschreibung

Der Duschklapsitz dient dem Benutzer als Sitzhilfe während des Duschens. Nach der Nutzung lässt sich der Duschklapsitz bequem an die Wand falten und man spart somit Platz im Duschbereich. Durch die Pulver-Beschichtung ist der Stuhl korrosionsbeständig.

#### Technische Daten

Gesamtbreite:	45 cm
Gesamttiefe:	45,5 cm
Sitzbreite:	44 cm
Sitztiefe:	37 cm
Sitzhöhe:	43,5 cm – 51 cm
Gesamtgewicht:	3,5 kg
Max. Benutzergewicht:	100 kg
Verpackungsmasse:	59 cm Länge, 13 cm Breite, 48 cm Höhe

#### Produkt Aufkleber


Der Produkt-Aufkleber befindet sich auf der Unterseite des Sitzes.



### 4. Montage

#### Einstellen der gewünschten Sitzhöhe

- Der Sitz ist richtig eingestellt, wenn der Benutzer auf dem Sitz sitzt und beide Füße auf dem Boden stehen.
- Wählen Sie einen normalen Stuhl auf dem der Benutzer bequem sitzen kann und messen Sie die Distanz zwischen Sitz und Boden.
- Dementsprechend stellen Sie die Teleskop-Rohre auf die gewünschte Länge
- Greifen Sie den Clip zwischen Zeigefinger und Daumen und ziehen ihn heraus.
- Stellen Sie das Teleskop-Rohr auf die gewünschte Höhe ein.
- Drücken Sie den Clip in das vorgesehene Loch.
- Stellen Sie die anderen Teleskop-Rohre auf die gleiche Höhe ein.

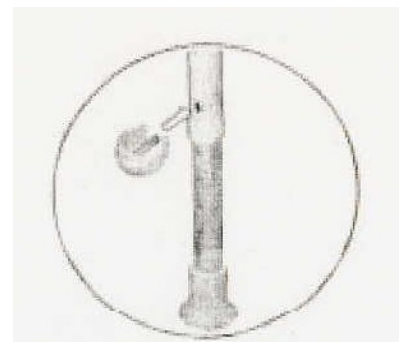

## Montage an der Wand

- Montage nur durch Fachpersonal
- Montagematerial gehört nicht zum Lieferumfang.
- Montagematerial ist abhängig vom Zustand und der Beschaffenheit der Wand.
- Wählen Sie je 6 Schrauben, Dübel und Spannscheiben.
- Markieren Sie mit Hilfe der Montage-Platte die Positionen der 6 Löcher.
- Bohren Sie die Löcher und setzen Sie die Dübel ein.
- Setzen Sie die Bügel in die dafür vorgesehenen Löcher.
- Schrauben Sie die Montageplatte fest an.
- Vergewissern Sie sich, dass der Duschklapsitz korrekt montiert ist, indem Sie diesen mehrfach auf- und wieder zuklappen

## 5. Bedienungsanleitung

- Klappen Sie die Sitzfläche des Duschklapsitzes nach vorne, die Teleskopbeine stellen sich automatisch auf den Boden
- Setzen Sie sich auf die Mitte der Sitzoberfläche
- Klappen Sie nach Nutzung den Sitz in die obere Halterungsposition

## 6. Wartung und Pflege

Verschmutzungen an Gestell- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln reinigen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation. Verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel). Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird empfohlen, das Produkt in regelmässigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

## 7. Entsorgung des Produktes

Der Duschklapsitz kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

## 8. Konformitätserklärung

Die Firma **Mobilex A/S,**  
**Nørskovvej 1**  
**DK-8660 Skanderborg**  
**Dänemark**

erklärt hiermit, dass das Produkt **Duschklappsitz 302040 und 302041** in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte,**  
Anhang I vom 14 Juni 1993

### Der Verantwortliche

**Name:** Lars Nygaard  
**Position:** Geschäftsführer  
**Firma:** Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark

A handwritten signature in black ink that reads 'Lars Nygaard'.

Skanderborg, den 09/06/2006