

Seggiolo a muro

Manuale d'uso e manutenzione



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

www.mobilex-care.com

Importante!

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente questo manuale. Leggete e seguite scrupolosamente tutte le istruzioni e seguite particolarmente gli avvisi per la sicurezza!

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vs. rivenditore o direttamente alla Mobilex A/S:

Mobilex A/S
Noerskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

Telefono: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Avvisi generali

Marchio CE

Questo prodotto è costruito a norma della direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. La garanzia decade se il prodotto non è usato correttamente o in modo improprio. Il normale logoramento è escluso da garanzia, eccetto per difetti di produzione. La garanzia non comprende il trasporto.

2. Avvisi di sicurezza

- usare il prodotto solo se è in perfette condizioni tecniche
- nel caso si riscontrasse un qualsiasi difetto o danneggiamento del prodotto, contattare immediatamente il rivenditore.
- il montaggio deve essere eseguito solo da personale qualificato e su pareti in muratura
- controllate quanto riportato sulla etichetta del prodotto. Non caricate il seggiolo con pesi superiori alla portata massima!
- usare il seggiolo solo per l'uso previsto e consentito.
- regolate i piedini anteriori assolutamente sulla stessa altezza
- non montare o salire con i piedi sul seggiolo.
- nell'aprire o richiudere del seggiolo, ponete attenzione a non schiacciarvi dita o altri parti del corpo

3. Descrizione e dati tecnici

Il seggiolo a muro Mobilex permette di sedersi nella doccia. Dopo l'uso può essere comodamente reclinato, per lasciare più spazio nella doccia. La verniciatura a polvere epossidica rende il seggiolo altamente resistente alla corrosione.

Dati tecnici:

larghezza totale:	45 cm
profondità totale:	45,5 cm
larghezza seduta:	44 cm
profondità seduta:	37 cm
altezza seduta:	43,5 cm – 51 cm
peso totale:	3,5 kg
portata massima:	100 kg
misure d'imballo:	lunghezza 59 cm, larghezza 13 cm, altezza 48 cm

Etichetta identificativa del prodotto


L'etichetta si trova sotto la seduta



4. Montaggio

Regolazione dell'altezza

- il seggiolo è regolato bene, quando l'utente è seduto sul seggiolo ed i suoi piedi poggiano saldamente a terra
- usate una sedia normale, sulla quale l'utente è seduto comodamente e misurate l'altezza da terra della seduta - le gambe telescopiche del seggiolo dovranno essere regolate alla stessa altezza
- per regolare l'altezza della gamba, afferrate la clip di regolazione tenendola con il pollice e l'indice ed astraetela dal tubo della gamba telescopica
- regolate la gamba telescopica all'altezza desiderata
- inserite nuovamente la clip per bloccare la gamba
- regolate anche l'altra gamba alla stessa altezza

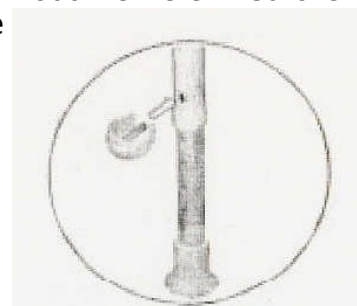

Fissaggio al muro

- il montaggio deve essere eseguito solo da personale qualificato
- la fornitura non comprende il materiale di montaggio al muro, dato che dipende dalla tipologia del muro, al quale il seggiolo va fissato
- usate 6 tasselli, viti e rondelle adeguate ed inossidabili
- segnate sul muro la posizione dei 6 fori della piastra di fissaggio
- fate i fori nel muro ed inseritevi i tasselli
- bloccate la seduta con i ganci di fissaggio, dopo averreolata l'altezza
- montate la piastra al muro fissandola con le viti
- controllate che il seggiolo sia montato correttamente, aprendolo e ripiegandolo un paio di volte

Uso del seggiolo

- aprite il seggiolo tirandolo verso avanti - i piedi telescopici si poggieranno automaticamente per terra
- sedetevi a centro della seduta
- dopo l'uso, ripiegate il seggiolo verso l'alto bloccandolo nella posizione di riposo

5. Manutenzione

Pulire il telaio e le parti in plastica solo con detergenti neutri e panni morbidi e non abrasivi. Usate esclusivamente detergenti indicati alla pulizia e/o disinfezione (non usate solventi o abrasivi). Controllate le indicazioni del detergente. È consigliato far controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato, prestando particolare attenzione alle parti di bloccaggio e fissaggio.

6. Smaltimento

Il seggiolo a muro Mobilex non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle „oasi ecologiche“

7. Illustrazione

