

Badestuhl "Aqua"

Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit .

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S

Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG).

Garantie

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäß em Gebrauch. Verschleissteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand.
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber. Beachten Sie das zulässige Benutzergewicht.
- Bitte nutzen Sie den Badestuhl nur für den vorgesehenen Einsatzbereich.
- Bitte verwenden Sie den Badestuhl nicht als Tritthocker.
- Benutzen Sie den Badestuhl nur auf geraden und rutschsicheren Flächen.
- Stellen Sie die Teleskoprohre immer auf die gleiche Höhe ein.
- Nicht einseitig belasten! – sich nur senkrecht auf beiden Armlehnen abstützen.
- Bitte achten Sie darauf, dass Sie beim Aufstellen des Badestuhls sich nicht die Finger oder andere Körperteile einklemmen.

3. Beschreibung und technische Daten

Produkt Beschreibung

Der Badestuhl besitzt alle Standard-Voraussetzungen eines regulären Badestuhls und dient dem Benutzer als Sitzhilfe während des Duschens. Durch die Pulver-beschichtung ist der Stuhl korrosionsbeständig.

Technische Daten:

Badestuhl "Aqua"	Modell SB 42 cm	Modell SB 47 cm
Gesamthöhe	600 - 770 mm	600 - 770 mm
Sitzbreite	420 mm	470 mm
Sitztiefe	335 mm	335 mm
Sitzhöhe	420 – 590 mm (25 mm Stufen)	420 – 590 mm (25 mm Stufen)
Gesamtgewicht	2,8 kg	3,0 kg
Max. Benutzergewicht	130 kg	130 kg
Rückenlehne (Zubehör)	Modell SB 42 cm	Modell SB 47 cm
Breite der Rückenlehne	39,50 cm	39,50 cm
Höhe der Rückenlehne	40 cm	40 cm
Tiefe des Stuhls mit Rückenlehne	37 cm	37 cm

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich auf der Rückseite der Rückenlehne.



Abbildung des Typenschildes (Beispiel)

4. Montage und Bedienung

Zusammenbau des Stuhles:

Der Stuhl wird in einem Karton geliefert in dem die Unterteile der Füße separat enthalten sind. Um den Stuhl gebrauchsfertig zusammen zu bauen, müssen sie diese 4 Fußstützen in die dafür vorgesehenen Rahmenrohre einführen und an der gewünschten Höhe durch die beiliegenden Clips befestigen (siehe Abbildung unten). Kontrollieren sie bitte auch, daß der weiche PUR Sitz richtig am Rahmen aufliegt, er könnte sich beim Transport vom Stuhl gelöst haben. Die Noppen an der Unterseite des PUR Sitzes müssen dafür eventuell in die dafür vorgesehenen Löcher am Rahmen gedrückt werden.

Achtung! Kontrollieren Sie, daß alle 4 Füße auf dieselbe Höhe eingestellt sind. Zählen Sie zur Kontrolle die Löcher der Höhenverstellung, in denen die Clips sitzen.


Montage der Rückenlehne (Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten):

Als Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten) zu Ihrem Badestuhl können Sie eine bequeme Rückenlehne erhalten, die sich ganz einfach auf den Badestuhl aufstecken und ohne Werkzeug mittels Clips befestigen lässt. Zur Montage stecken Sie einfach die 2 Rohre der Rückenlehne in die unter der Sitzfläche des Stuhles bereits vorhandenen Aufnahmelöcher (siehe Abbildungen rechts) und befestigen Sie anschließend die Rückenlehne, indem sie die mit der Rückenlehne gelieferten Clips zur Fixierung in die vorgesehenen Löcher beider Rohre stecken.



Einstellung der gewünschten Sitzhöhe:

- Der Stuhl ist richtig eingestellt, wenn der Benutzer auf dem Stuhl sitzt und beide Füße auf dem Boden stehen
- Greifen Sie den **Clip (A)** zwischen Zeigefinger und Daumen
- und ziehen ihn heraus
- Stellen Sie das Teleskoprohr auf die gewünschte Höhe ein
- Drücken Sie den **Clip (A)** in das vorgesehene **Loch (B)**
- Stellen Sie die anderen Teleskoprohre auf die gleiche Höhe ein
- Während der Benutzung bitte keine Verstellungen vornehmen

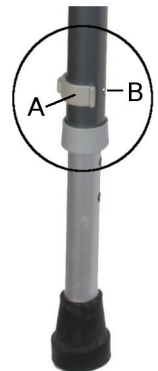

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiss. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

6. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

7. Konformitätserklärung

Die Firma **Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Dänemark** erklärt hiermit, dass der

Badestuhl "Aqua"

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte, Anhang I vom 14 Juni 1993**

Der Verantwortliche:

Lars Nygaard, Geschäftsführer der Firma Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg

Skanderborg, am 10.02.2007

.....
Datum



.....
Unterschrift