

Gummiramper

Montage- og brugervejledning

Montage:

Gummiramperne leveres enten med eller uden limfolie.

Limfolie er velegnet til et underlag af fliser eller et nyere trægulv.

Ved gulvtæpper, linoleum og ældre trægulve skal ramper uden limfolie benyttes. De kan fastgøres med dobbeltklæbende tape.

Hvis gummiramperne skal afkortes kan dette gøres med enten en lommekniv eller alternativt en sav.

Max. belastning

250 kg.

Rengøring:

Gummiramperne kan rengøres med almindelige rengøringsmidler.