

Mobilex Rollator "Zebra"

Gebrauchsanweisung



Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

Mobilex Rollator "Zebra"

Inhaltsverzeichnis

Mobilex Rollator "Zebra" Inhaltsverzeichnis.....	2
1 Mobilex Rollator "Zebra" Einleitung.....	3
2 Mobilex Rollator "Zebra" Sicherheitshinweise.....	4
2.1 Verwendete Symbole.....	4
2.2 Sicherheit: Allgemeine Hinweise.....	4
3 Mobilex Rollator "Zebra" Zweckbestimmung	5
4 Mobilex Rollator "Zebra" Indikation.....	5
5 Mobilex Rollator "Zebra" Konformitätserklärung.....	6
6 Mobilex Rollator "Zebra" Produktaufbau.....	7
6.1 Produktaufbau / Produktbeschreibung.....	7
7 Mobilex Rollator "Zebra" Lieferumfang.....	7
8 Rollator Modell „Zebra“ Anwendungshinweise.....	7
9 Mobilex Rollator "Zebra" Transporthinweise.....	8
10 Mobilex Rollator "Zebra" Technische Daten.....	8
11 Mobilex Rollator "Zebra" Typenschild.....	8
12 Mobilex Rollator "Zebra" Reinigungs- und Pflegehinweise.....	9
13 Mobilex Rollator "Zebra" Wartung.....	9
14 Mobilex Rollator "Zebra" Entsorgung.....	10
15 Mobilex Rollator "Zebra" Garantieerklärung.....	10
16 Mobilex Rollator "Zebra" Eigene Notizen.....	10

1 Mobilex Rollator "Zebra"

Einleitung

Die nachfolgende Gebrauchsanweisung liefert Ihnen eine Beschreibung zur Bedienung und Pflege des Rollators Modell "Zebra".

Für eventuelle weitere Fragen oder Unklarheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilex Fachhändler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S

Nørskovvej 1

DK-8660 Skanderborg

Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20 (DK) oder 0180 546 5000 (Deutschland)

Telefax: +45 87 93 17 77 (DK) oder 0180 546 5777 (Deutschland)

E-mail: info@mobilex-care.com

2.1 Verwendete Symbole

In der Gebrauchsanweisung werden folgende Symbole verwendet:



Achtung

Diese Symbol kennzeichnet Sicherheitshinweise, die auf Gefahren im Umgang mit dem Produkt hinweisen.



Hinweis

Unter diesem Symbol finden Sie Hinweise zur Handhabung

2.2 Sicherheit: Allgemeine Hinweise

Sorgen Sie dafür, dass diese Anweisung von allen Personen, die den Rollator verwenden, gelesen wird. Schaden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen, sind von jedweiliger Gewährleistung ausgeschlossen.



Einschränkungen bei der Verwendung

- Der Rollator "Zebra" darf nicht mit mehr als 120 kg insgesamt belastet werden
- Der Einkaufskorb darf maximal mit 7 kg belastet werden
- Das Tablett darf nur für leichte Gegenstände verwendet werden
- Es darf keine weitere Person auf dem Sitz mitgenommen werden



Unfallgefahr

- Benutzen Sie den Rollator nur zu seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.
- Verwenden Sie den Rollator nur in technisch einwandfreiem Zustand.
- Nehmen Sie keine konstruktiven Veränderungen vor, die nicht vom Hersteller genehmigt oder vorgeschlagen sind.
- An allen Gelenken des Rollators besteht erhöhte Klemm- und Quetschgefahr
- Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion beider Radbremsen
- Benützen Sie den Rollator nur im vollständig aufgeklappten Zustand und mit verriegeltem Klappmechanismus
- Benutzen Sie den Rollator nur auf geradem, festen Untergrund
- Den Rollatorsitz nur bei verriegelten Bremsen benutzen
- Immer beide Bremsen gleichzeitig ziehen oder verriegeln

3 Mobilex Rollator "Zebra"

Zweckbestimmung

Der Rollator "Zebra" wurde für den Gebrauch im Innen- oder Außenbereich entworfen. Er soll zum Ausgleich einer Behinderung oder Unfähigkeit dienen, sowie die Bewegungsfreiheit des Benutzers erweitern. Der Rollator ist nur für die Benutzung durch eine einzelne Person ausgelegt.

4 Mobilex Rollator "Zebra"

Indikation

Der Rollator Modell „Zebra“ kann Patienten mit Gehbehinderung als Gehhilfe dienen

Die Firma

Mobilex A/S

Nørskovvej 1

DK-8660 Skanderborg

Dänemark

erklärt hiermit, daß das Produkt Mobilex Rollator "Zebra" in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte,
Anhang I vom 14 Juni 1993 und
- DIN EN ISO 11199-2 (2003-04) Gehhilfen für beidarmige Handhabung –
Anforderungen und Prüfverfahren – Teil 2: Rollatoren

Verantwortlicher:

Firma: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark

Stellung: Geschäftsführer

Name: Lars Nygaard



Skanderborg, den 21.08.2006

Datum


Unterschrift

6 Mobilex Rollator "Zebra"

Produktaufbau

6.1 Produktaufbau / Produktbeschreibung

Der Rollator "Zebra" besteht aus Aluminium.

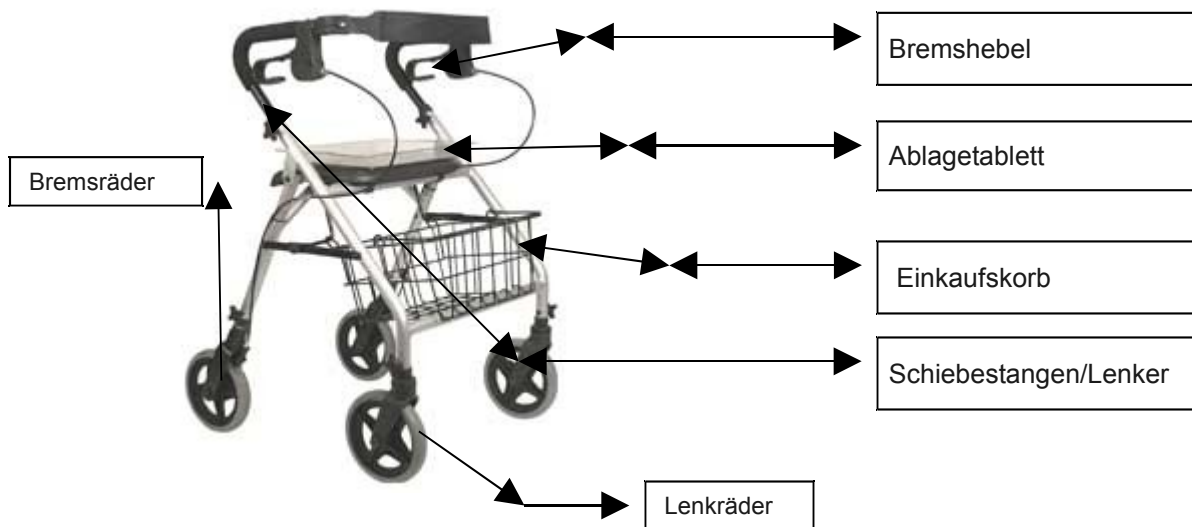

7 Mobilex Rollator "Zebra"

Lieferumfang

Die Mobilex Rollator "Zebra" wird verpackt in einem Karton und mit folgendem Lieferumfang ausgeliefert:

- 1 Rollator
- 1 Ablagetablett für den Rollatorsitz
- 1 Einkaufskorb
- 1 paar Schiebestangen/Lenker mit Rückengurt
- 2 Handmuttern
- 1 Gebrauchsanweisung

Die Schiebestangen (Lenker) mit Rückengurt müssen mit den beige packten Handmuttern verriegelt werden. Einkaufskorb und Ablagetablett montieren.

8 Rollator Modell „Zebra“

Anwendungshinweise



Durch den klappbaren Hinterradrahmen kann der Rollator platzsparend zusammengefaltet werden.

Die Schiebestangen (Lenker) lassen sich durch die stufenlose Höhenverstellung an Ihre Körpergröße anpassen.

Die Sitzfläche ermöglicht Ihnen, Ruhepausen einzulegen.

9 Mobilex Rollator "Zebra"

Transporthinweise

Ablagetablett und Einkaufskorb entfernen, dann den Klappmechanismus entriegeln und den Rollator zusammenfallen.

10 Mobilex Rollator "Zebra"

Technische Daten


Mobilex Rollator "Zebra"	
Max. Benutzergewicht (Traglast):	120 kg
Leergewicht mit / ohne Zubehörteile	7,7 kg / 6.8 kg
Länge:	65 - 76 cm
Breite:	55,5 cm
Höhe:	83,5 – 98 cm
Faltmasse (LxBxH):	32 cm x 57 cm x 89 cm
Art der Bremse	2 x Feststellbremse
Wendedurchmesser	120 cm
Winkel zwischen der Längsmittellinie des Handgriffs und der Bewegungsrichtung	0° (parallel)

11 Mobilex Rollator "Zebra"

Typenschild

Das Typenschild und das Seriennummernschild befindet sich an der Querstange des Vorderradrahmens.

Abbildung des Typenschildes:

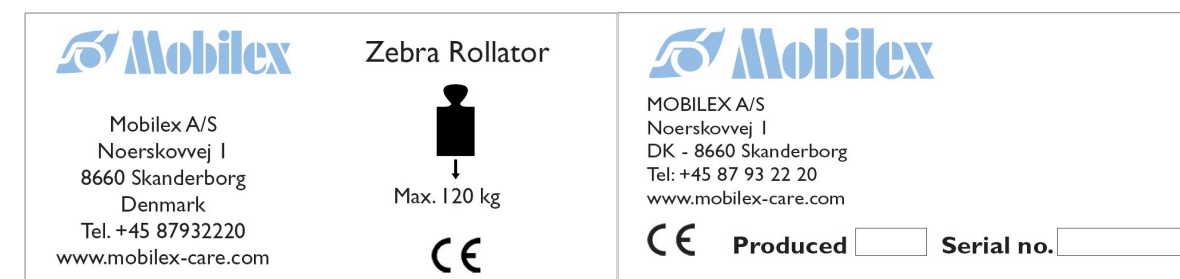

12 Mobilex Rollator "Zebra" Reinigungs- und Pflegehinweise

- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfkantigen Werkzeuge oder aggressive Lösungsmittel. Hochdruckreiniger dürfen zur Reinigung nicht verwendet werden.
- Grobe Verunreinigungen können mit milden und scheuerfreien Reinigungsmitteln entfernt werden.
- Leichte Verschmutzungen und Staub können mit einem feuchten Tuch entfernt werden.

13 Mobilex Rollator "Zebra" Wartung

Der Mobilex Rollator "Zebra" ist weitestgehend wartungsfrei, sollte jedoch einmal jährlich einer Sicherheitsüberprüfung durch Ihren Fachhändler unterzogen werden.

Stellen Sie während der Benutzung des Rollators Mängel fest (z.B. keine Bremswirkung), legen Sie den Rollator sofort still und lassen Sie ihn durch Ihren Fachhändler prüfen.

Die jährliche Prüfung sollte die unten beschriebenen Prüfarbeiten beinhalten:

Sichtprüfung aller Rahmenteile auf Verformung, Beschädigung, Verschleiß und Korrosion:

- Rollatorgestell
- Schiebestangen (Lenker)
- Schiebegriffe
- Bremshebel
- Bremszüge
- Lenkgabeln
- Lenkräder
- Bremsräder
- Sitzfläche
- Einkaufskorb
- Ablagetablett

