

Rollator Zebra

Istruzioni d'uso e manutenzione



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca
www.mobilex-care.com

Importante!

Prima di usare il prodotto, leggere attentamente questo manuale. Leggete e seguite scrupolosamente tutte le istruzioni e seguite particolarmente gli avvisi per la sicurezza!

Per ulteriori informazioni rivolgetevi al vs. rivenditore o direttamente alla Mobilex A/S:

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

telefono: +45 87 93 22 20
telefax: +45 87 93 17 77
e-mail: info@mobilex-care.com

1. Avvisi generali

Marchio CE

Questo prodotto è costruito a norma della direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici

Garanzia

Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. La garanzia decade se il prodotto non è usato correttamente o in modo improprio. Il normale logoramento è escluso da garanzia, eccetto per difetti di produzione. La garanzia non comprende il trasporto.

Simboli usati:



Attenzione

(questo simbolo indica un avviso importante relativo a pericoli nell'uso del prodotto)



Informazione

(questo simbolo indica un'informazione relativa all'uso del prodotto)

2. Avvisi di sicurezza



Limitazioni d'uso

- il deambulatore "Zebra" non deve essere caricato con pesi maggiori di 120 kg
- il cestello non deve essere caricato con più di 7 kg
- il vassoio è adatto a portare solo oggetti leggeri
- il deambulatore può essere usato solo da una persona - non caricare altre persone sul deambulatore



Pericoli

- usare il prodotto solo se è in perfette condizioni tecniche
- nel caso si riscontrasse un qualsiasi difetto o danneggiamento del prodotto, contattare immediatamente il rivenditore
- il montaggio deve essere eseguito solo da personale qualificato
- controllate quanto riportato sull'etichetta del prodotto. Non caricate il prodotto con pesi superiori alla portata massima!
- non apportare modifiche al prodotto, se non esplicitamente autorizzate o proposte dal costruttore
- usare il prodotto solo per l'uso previsto e consentito
- in fase di apertura o ripiegamento, in vicinanza dei giunti del deambulatore c'è rischio di schiacciamento delle dita o degli arti
- prima dell'uso controllare che il sistema frenante del deambulatore funzioni perfettamente
- usare il deambulatore solo se completamente aperto e con il sistema antichiusura bloccato
- usare il deambulatore solo su superfici piane e compatte
- usare il sedile solo con i freni di stazionamento innestati
- bloccare o sbloccare sempre contemporaneamente entrambi i freni

3. Uso previsto

Il rollator "Zebra" è stato progettato e costruito per un uso in interni ed esterni. Può servire a compensare una disabilità o inabilità dell'utente permettendo di aumentare la mobilità a chi lo usa. Il deambulatore è concepito e costruito per l'uso di solo *una* persona.

4. Indicazioni

Il rollator "Zebra" può essere uno strumento d'aiuto a persone con difficoltà nella deambulazione

5. Descrizione e dati tecnici

Descrizione del prodotto

Il deambulatore "Zebra" è costruito con un telaio in alluminio anodizzato color argento. È dotato di ruote con un diametro di 185 mm e freni di rallentamento e stazionamento. Può essere ripiegato.



Dati tecnici:

| Deambulatore Mobilex "Zebra" | mod. standard - 312001 | mod. piccolo - 312002 |
|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| portata massima | 120 kg | 120 kg |
| peso senza/con accessori | 6,8 kg / 7,7 kg | 6,2 kg / 7,1 kg |
| profondità | 65 - 76 cm | 65 - 76 cm |
| larghezza esterna | 56 cm | 56 cm |
| larghezza interna | 44,5 cm | 44,5 cm |
| altezza manubrio | 83,5 cm - 98 cm | 70 cm - 80 cm |
| altezza seduta (min/max) | 58 - 63 cm | 48 cm |

Etichetta del prodotto

l'etichetta si trova sulla traversa anteriore del deambulatore



immagine dell'etichetta (esempio non originale)

6. Fornitura ed assemblaggio

Il deambulatore "Zebra" è fornito con imballo di cartone e comprende i seguenti componenti:

- 1 deambulatore
- 1 vassoietto in plastica trasparente (applicabile al sedile)
- 1 cestello di metallo con maniglia
- 1 manubrio a doppia maniglia con freni e cintura poggiaschiena
- 2 viti con manopola a stella per la regolazione del manubrio
- il presente manuale d'uso

Dopo aver disimballato ed aperto il deambulatore, inserire il manubrio nel telaio e fissarlo con le due viti con manopola a stella. Montare il cestello e, se richiesto, il vassoietto.



Note per l'uso:

- con il suo telaio chiudibile il deambulatore può essere facilmente ripiegato e riposto occupando meno spazio
- Il manubrio può essere adattato all'altezza dell'utente
- Il sedile consente di effettuare comode pause di riposo durante la deambulazione

7. Pulizia e manutenzione

Pulire le parti in metallo o in plastica solo con detergenti neutri e panni morbidi e non abrasivi. Usate esclusivamente detergenti indicati alla pulizia e/o disinfezione (non usate solventi o abrasivi). Controllate le indicazioni del detergente.

Il deambulatore Mobilex "Zebra" non necessita di particolare manutenzione. Anche se costruito con materiali di alta qualità, il deambulatore durante l'uso è soggetto ad un certo logoramento. È consigliato far controllare il prodotto ad intervalli regolari (almeno una volta all'anno) da un tecnico specializzato, prestando particolare attenzione alle seguenti parti:

- telaio
- manubrio
- l' impianto frenante ed il suo corretto funzionamento (frenata e stazionamento)
- forcelle
- ruote sterzanti e frenanti
- sedile
- tutte gli elementi di giuntura (viti, dadi, cerniere)

8. Smaltimento

Il prodotto non può essere smaltito con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle „oasi ecologiche“

9. Dichiarazione di conformità

la ditta **Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Danimarca**, dichiara che il prodotto

Rollator Mobilex "Zebra"

è costruito in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE:

- **direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici e**
- **DIN EN ISO 11199-2 (2003-04) - aiuti per la deambulazione - parte 2.a: rollators**

Lars Nygaard
amministratore delegato
Mobilex A/S, Skanderborg



Skanderborg, li 21/08/2006