

Gazelle Rollator Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG).

Garantie

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleisssteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand. Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehendst Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie den Rollator nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
- Nehmen Sie keine konstruktiven Veränderungen vor, die nicht vom Hersteller genehmigt sind
- **Achtung:** an allen Gelenken des Rollators besteht eine erhöhte Gefahr für Klemmungen oder Quetschungen der Gliedmaßen
- Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion beider Radbremsen.
- Immer beide Bremsen gleichzeitig ziehen oder verriegeln. Zum Verriegeln müssen beide Bremshebel nach unten gedrückt werden bis die Feststellbremsen einrasten.
- Benützen Sie den Rollator nur im vollständig aufgeklappten Zustand und mit verriegeltem Klappmechanismus. Den Rollatorsitz nur bei verriegelter Bremse benutzen (Verriegelung siehe Punkt vorher)!
- Benützen Sie den Rollator nur auf geradem und festem Untergrund. Der Rollator darf generell nicht auf schrägem Untergrund einseitig belastet werden; in diesem Fall besteht die Gefahr, dass der Rollator umkippt.
- Sorgen Sie dafür, dass diese Anleitung von allen Personen, die den Rollator verwenden, auch sorgfältig gelesen wird. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen.

Anmerkung zur Sicherheit

In seltenen Fällen könnte es bei der Benutzung des Rollators zu elektrostatischen Entladungen kommen, verursacht z.B. durch die Bekleidung des Benutzers (Nylon o.ä.) oder die Beschaffenheit des Bodens (Kunststoff-Teppich o.ä.). In solchen Fällen bitte folgendermaßen vorgehen:

- dem Benutzer vorschlagen, er solle versuchen die Kleidung und Schuhe wechseln, um zu testen ob dadurch die statischen Entladungen und die damit verbundenen Probleme verschwinden
- es kann auch es behilflich sein, die Handgriffe auszuwechseln, zum Beispiel durch anatomische Handgriffe
- eine andere Lösung wäre, die Räder gegen einen anderen Typ auszutauschen
- sollte es trotz Allem Fälle geben, bei denen diese Vorschläge keine Besserung bewirken, bitten wir Sie sich umgehend mit uns in Verbindung zu setzen damit wir gemeinsam eine Lösung finden, die alle Parteien zufriedenstellen kann

3. Beschreibung und technische Daten

Zweckbestimmung

Der Gazelle Rollator ist für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich gedacht. Es soll zum Ausgleich einer Behinderung oder Unfähigkeit dienen und zur Verbesserung der Bewegungsfreiheit des Benutzers dienen. Der Gazelle Rollator ist für die Benutzung durch eine einzelne Person ausgelegt.

Indikation

Der Gazelle Rollator findet Anwendung bei Patienten, die Unterstützung beim Gehen brauchen.

Produktaufbau / Produktbeschreibung

Der Gazelle Rollator hat einen Aluminiumrahmen.



Einhandbremse (Zubehör):

Optional ist für den "Gazelle" Rollator eine Einhandbremse verfügbar. Diese besteht aus nur einem Bremsgriff mit 2 Bremskabeln. Die Funktionsweise der Einhandbremse entspricht der der Standardbremsen: Normales Bremsen geschieht durch Anziehen des Bremshebels. Indem man den Bremshebel nach unten drückt kann man die Bremsen feststellen (Parkfunktion).

Technische Daten

Gazelle Rollator	312006	312007	312008
Max. Benutzergewicht (Traglast)	120 kg	120 kg	120 kg
Leergewicht mit Zubehörteile	7 kg	7 kg	7,2 kg
Länge	65 cm	65 cm	65 cm
Breite	56 cm	56 cm	61 cm
Sitzbreite	46 cm	46 cm	51 cm
Höhe (einstellbar)	76 - 97 cm	83 - 104 cm	83 - 104 cm
Sitzhöhe (einstellbar)	48 - 53 cm	55 - 60 cm	55 - 60 cm
Art der Bremse	2 x Feststell-Bremse	2 x Feststell-Bremse	2 x Feststell-Bremse
Wendekreis	120 cm	120 cm	120 cm
Winkel zwischen der Längsmittellinie des Handgriffs und der Bewegungsrichtung	0° (parallel)	0° (parallel)	0° (parallel)

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich an der Querstange des Vorderradrahmens



Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

4. Lieferumfang und Anwendungshinweise

Lieferumfang

Der Gazelle Rollator wird in einem Karton verpackt geliefert. Der Inhalt besteht aus:

- 1 Rollator
- 1 Einkaufskorb
- 1 Paar Schiebestangen mit Rückenbespannung
- 2 Handmutter
- 1 Gebrauchsanweisung

Anwendungshinweise

- Die Schiebestangen mit dem Rückengurt sollen mit den beige-packten Handmuttern verriegelt werden und lassen sich durch die Höhenverstellung an Ihre Körpergröße anpassen.
- Durch seitliches Zusammenklappen kann man den Rollator platzsparend zusammenfallen.
- Die Sitzfläche ermöglicht Ihnen Ruhepausen einzulegen.

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel oder scharfkantige Gegenstände).

Der Gazelle Rollator ist weitestgehend wartungsfrei, sollte jedoch einmal jährlich einer Sicherheitsprüfung durch Ihren Fachhändler unterzogen werden. Stellen Sie während der Benutzung des Rollators Mängel fest (z.B. keine Bremswirkung) legen Sie den Rollator sofort still und lassen Sie ihn durch den Fachhändler prüfen.

Die **jährliche Prüfung** sollte die unten beschriebenen Prüfarbeiten beinhalten:

- Sichtprüfung aller Rahmenteile auf Verformung, Beschädigung, Verschleiß und Korrosion:
- Rollatorrahmen
- Schiebestangen
- Schiebegriffe
- Bremshebel
- Bremszüge
- Lenkgabeln
- Lenkräder
- Bremsräder
- Sitzfläche
- Einkaufskorb
- Alle Verbindungselemente (z.B. Mutter, Schrauben, Nieten ...) auf Vollständigkeit, Funktion und einwandfreien Sitz prüfen
- Funktion der Bremse prüfen auf:
 - Abbremsen aus der Fahrt
 - Feststellen der Bremsräder

6. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden

7. Konformitätserklärung

Die Firma **Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark**, erklärt hiermit, dass das Produkt **Gazelle Rollator** in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte, Anhang I vom 14 Juni 1993**
- **DIN EN ISO 11199-2 (2003-04) Gehhilfen für beidarmige Handhabung - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 2: Rollatoren**

Der Verantwortliche:
Lars Nygaard, Geschäftsführer
der Firma Mobilex A/S, Skanderborg



Skanderborg, am 10.03.2005