

"Antilope" Leichtgewichts-Rollator

Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark
www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit .

Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG).

Garantie

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleißteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur im einwandfreien technischen Zustand. Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehendst Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie den nur für Rollator nur für den vorgesehenen Einsatzbereich
- Nehmen Sie keine konstruktiven Veränderungen vor, die nicht vom Hersteller genehmigt sind
- **Achtung:** an allen Gelenken des Rollators besteht eine erhöhte Gefahr für Klemmungen oder Quetschungen der Gliedmaßen
- Prüfen Sie vor jeder Inbetriebnahme die einwandfreie Funktion beider Radbremsen.
- Immer beide Bremsen gleichzeitig ziehen oder verriegeln.
- Benützen Sie den Rollator nur im vollständig aufgeklappten Zustand. Den Rollatorsitz nur bei verriegelter Bremse benutzen!
- Benützen Sie den Rollator nur auf geradem und festem Untergrund. Der Rollator darf generell nicht auf schrägem Untergrund einseitig belastet werden; in diesem Fall besteht die Gefahr, dass der Rollator umkippt.
- Sorgen Sie dafür, dass diese Anleitung von allen Personen, die den Rollator verwenden, auch sorgfältig gelesen wird. Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, sind von jeder Gewährleistung ausgeschlossen.

Anmerkung zur Sicherheit

In seltenen Fällen könnte es bei der Benutzung des Rollators zu elektrostatischen Entladungen kommen, verursacht z.B. durch die Bekleidung des Benutzers (Nylon o.ä.) oder die Beschaffenheit des Bodens (Kunststoff-Teppich o.ä.). In solchen Fällen bitte folgendermaßen vorgehen:

- dem Benutzer vorschlagen, er solle versuchen die Kleidung und Schuhe wechseln, um zu testen ob dadurch die statischen Entladungen und die damit verbundenen Probleme verschwinden
- es kann auch es behilflich sein, die Handgriffe auszuwechseln, zum Beispiel durch anatomische Handgriffe
- eine andere Lösung wäre, die Räder gegen einen anderen Typ auszutauschen
- sollte es trotz Allem Fälle geben, bei denen diese Vorschläge keine Besserung bewirken, bitten wir Sie sich umgehendst mit uns in Verbindung zu setzen, damit wir gemeinsam eine Lösung finden, die alle Parteien zufriedenstellen kann

3. Beschreibung und technische Daten

Zweckbestimmung


Der Antilope Rollator ist für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich gedacht. Es soll zum Ausgleich einer Behinderung oder Unfähigkeit dienen und zur Verbesserung der Bewegungsfreiheit des Benutzers dienen. Der Antilope Rollator ist für die Benutzung durch eine einzelne Person ausgelegt.

Indikation

Der Antilope Rollator findet Anwendung bei Patienten, die Unterstützung beim Gehen brauchen.

Produktaufbau / Produktbeschreibung

Der Rahmen des Antilope Rollator bestehen aus Aluminium. Die Sitzfläche, der Einkaufskorb sowie der Rückengurt bestehen aus einem speziellem und reissfestem Nylongewebe.

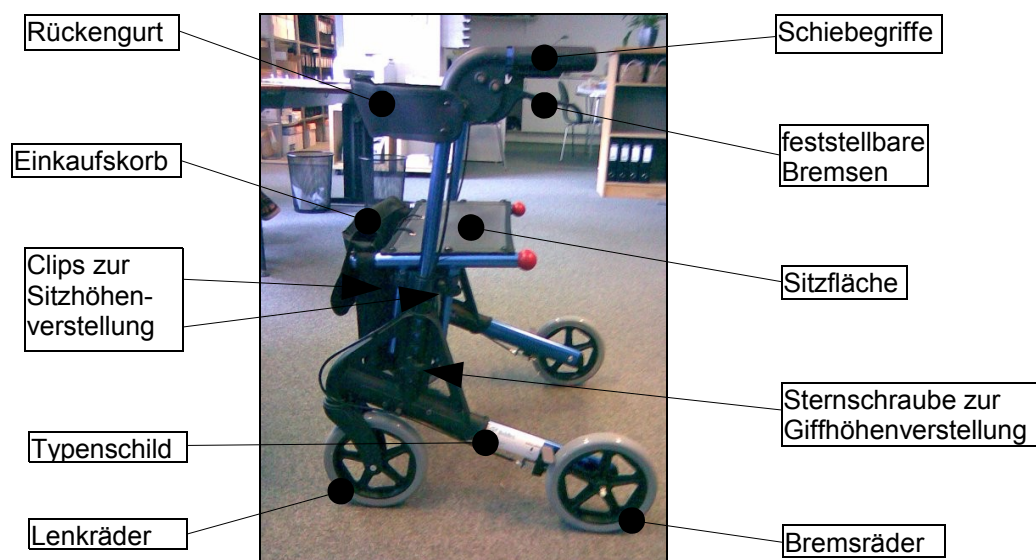

Technische Daten

Mobilex Rollator "Antilope"	Art. Nr. 312040
Max. Benutzergewicht (Traglast)	120 kg
Leergewicht mit Zubehörteilen	7,95 kg
Länge	60 cm
Breite	62 cm
Sitzbreite	46 cm
Höhe der Schiebegriffe (einstellbar)	82 - 95 cm
Sitzhöhe (einstellbar)	51 - 59 cm
Art der Bremse	2 x Feststellbremse
Wendekreis	115 cm
Winkel zwischen der Längsmittellinie des Handgriffs und der Bewegungsrichtung	0° (parallel)

Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich am rechten Rahmenrohr vor dem Hinterrad.



Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

4. Lieferumfang und Anwendungshinweise

Lieferumfang

Der Antilope Rollator wird in einem Karton verpackt geliefert und beinhaltet:

- 1 Rollator (komplett montiert und zusammengeklappt)
- 1 abnehmbare Einkaufstasche (montiert)
- 1 Gebrauchsanweisung

Anwendungshinweise

- Die Schiebestangen mit dem Rückengurt lassen sich durch die einfache Höhenverstellung an Ihre Körpergröße anpassen.
- Durch seitliches Zusammenklappen kann man den Rollator platzsparend zusammenfalten.
- Die Sitzfläche ermöglicht Ihnen Ruhepausen einzulegen.

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel oder scharfkantigen Gegenstände).

Der Antilope Rollator ist weitestgehend wartungsfrei, sollte jedoch einmal jährlich einer Sicherheitsprüfung durch Ihren Fachhändler unterzogen werden. Stellen Sie während der Benutzung des Rollators Mängel fest (z.B. keine Bremswirkung) legen Sie den Rollator sofort still und lassen Sie ihn durch den Fachhändler prüfen.

Die jährliche Prüfung sollte die unten beschriebenen Prüfarbeiten beinhalten:

- Sichtprüfung aller Rahmenteile auf Verformung, Beschädigung, Verschleiß und Korrosion
- Rollator-Fahrgestell
- Schiebestangen und Schiebegriffe
- Bremshebel, Bremszüge und Bremsräder
- Lenkgabeln und Lenkräder
- Sitzfläche und Einkaufskorb
- Alle Verbindungselemente (z.B. Mutter, Schrauben, Nieten ...) auf Vollständigkeit, Funktion und einwandfreien Sitz prüfen
- Funktion der Bremse prüfen auf:
 - Abbremsen aus der Fahrt
 - Feststellen der Bremsräder

6. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden

7. Konformitätserklärung

Die Firma Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark, erklärt hiermit dass der **Mobilex Rollator "Antilope"** in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG**
für Medizinprodukte, Anhang I vom 14 Juni 1993
- **DIN EN ISO 11199-2 (2003-04)**
Gehhilfen für beidarmige Handhabung
Anforderungen und Prüfverfahren – Teil 2: Rollatoren

Skanderborg, am 30 Juni 2009



Lars Nygaard, Geschäftsführer
Mobilex A/S, Skanderborg