

## **Rollator "Antilope" Manuale d'uso e manutenzione**



**MOBILEX A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca  
[www.mobilex-care.com](http://www.mobilex-care.com)

## 1. Introduzione

Gentile cliente,

ha acquistato un prodotto di qualità Mobilex e ne siamo particolarmente felici. Questo manuale contiene una descrizione dettagliata del prodotto nonché informazioni importanti per il suo corretto utilizzo. Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente questo manuale e di osservare scrupolosamente tutte le istruzioni contenute, in particolare le note relative alla sicurezza per poter garantire sempre un uso sicuro ed efficiente del prodotto.

Nota: Nell'intento di migliorare sviluppiamo continuamente i nostri prodotti e pertanto ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti senza ulteriore preavviso.

### Destinazione d'uso

Il rollator "Antilope" è stato progettato e costruito per un uso in interni ed esterni. Può servire a compensare una disabilità o inabilità dell'utente permettendo di aumentare la mobilità a chi lo usa. Il deambulatore è concepito e costruito per l'uso di una sola persona.

In caso di ulteriori domande La preghiamo di rivolgersi al Suo rivenditore di fiducia o direttamente alla Mobilex A/S:

Mobilex A/S  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca

Telefono: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex-care.com

## 2. Note per la sicurezza

- utilizzate il prodotto solo se in perfetto stato
- se il prodotto presenta un qualsiasi danno o difetto contattate immediatamente il Vostro rivenditore di fiducia
- annotare le informazioni sull'etichetta del prodotto
- non apportare modifiche al prodotto, se non esplicitamente autorizzate o proposte dal costruttore
- usare il prodotto solo per l'uso previsto e consentito
- in fase di apertura o ripiegamento, in vicinanza dei giunti del deambulatore c'è rischio di schiacciamento delle dita o degli arti
- prima dell'uso controllare che il sistema frenante del deambulatore funzioni perfettamente
- usare il deambulatore solo se completamente aperto
- usare il deambulatore solo su superfici piane e compatte
- usare il sedile solo con i freni di stazionamento innestati
- bloccare o sbloccare sempre contemporaneamente entrambi i freni

## 3. Descrizioni

### Fornitura ed assemblaggio

Il deambulatore è fornito completamente montato e non necessita di assemblaggio.

La fornitura comprende:

- il deambulatore completo ed assemblato
- una borsa in tela
- questo manuale

### Descrizione del prodotto

Il telaio del deambulatore è d'alluminio anodizzato color blu.  
 La seduta e la borsa sono di una speciale tela antistrappo di nylon.



### Indicazioni per il trasporto

Il deambulatore "Antilope" può essere ripiegato per il trasporto

## 4. Dati tecnici

Rollator Mobilex "Antilope"	codice 312040
portata	130 kg
peso a vuoto	7,95 kg
lunghezza	60 cm
larghezza	62 cm
larghezza seduta	46 cm
altezza manubrio (regolabile)	82 - 95 cm
altezza seduta (regolabile)	51 - 59 cm
tipo freno	2 freni stazionabili
raggio di svolta	115 cm

### Targhetta di identificazione

L'etichetta identificativa si trova sulla parte destra del telaio

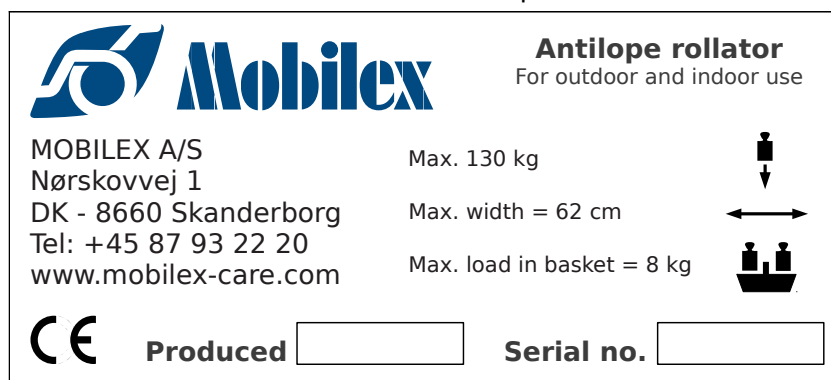


immagine dell'etichetta (esempio non originale)

## 5. Pulizia e manutenzione

Normale sporcizia sulle parti metalliche ed in plastica possono essere rimosse con detergenti convenzionali. Osservate le indicazioni del detergente ed usate solo prodotti adatti alla pulizia o la disinfezione (detergenti privi di solventi o abrasivi).

Nonostante la costruzione solida e l'uso di materiali durevoli anche il prodotto Mobilex è soggetto ad usura. Se durante l'uso del deambulatore si riscontrassero problemi (p.e. una frenata inefficiente) il deambulatore non può essere ulteriormente usato, ma deve essere portato in un centro di assistenza per la riparazione. Si raccomanda di fare controllare il deambulatore ad intervalli regolari, ma come minimo una volta all'anno da un tecnico specializzato. Dovranno essere controllati i seguenti punti:

- controllo visivo di tutte le parti per difetti, logoramento o corrosione
- telaio e crociera
- manubrio e maniglie
- leva e cavi freno e ruote frenanti
- forcelle e ruote anteriori
- seduta, cinturone poggiaschiena e borsa
- controllo di tutte le giunture come viti, dadi, rivetti ecc.
- controllo della funzionalità dei freni:
  - l'efficacia della frenata in movimento
  - il funzionamento del freno di stazionamento

## 6. Piccola manutenzione

descrizione	cosa fare
la spinta del deambulatore risulta particolarmente difficile	<ul style="list-style-type: none"><li>● eliminate eventuali impurità o capelli impigliatisi tra forcelle e ruote</li><li>● controllare che i freni funzionino correttamente</li></ul>
il deambulatore è duro da aprire/ripiegare	<ul style="list-style-type: none"><li>● l'apertura/chiusura inizialmente può risultare dura. Con un uso frequente si ammorbidirà</li><li>● pulire e oliare leggermente le giunture e la crociera</li></ul>

## 7. Smaltimento del prodotto

Il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici ma deve essere portato all'agenzia comunale per la gestione dei rifiuti.

## 8. Garanzia

Mobilex A/S offre per tutti i prodotti commercializzati una garanzia contro difetti di materiale o difetti di costruzione per la durata del periodo di garanzia legale prevista dai rispettivi paesi nei quali è commercializzato il prodotto. Mobilex A/S non può essere responsabilizzata per danni derivanti da un uso improprio o da riparazioni e/o modifiche non professionalmente eseguite nonché per danni causati da negligenza ed usura o da alterazioni di componenti da parte dell'utente o di terzi. In questi casi si estingue la marcatura CE e di conseguenza la responsabilità e garanzia Mobilex per il prodotto.

La garanzia non copre i costi di trasporto nonché crediti per il mancato uso del prodotto durante il periodo di riparazione. Inoltre la garanzia non copre danni derivanti dalla non ottemperanza o mancata comprensione di questo manuale.

Nel caso si riscontrassero difetti di materiale o di fabbricazione contattate immediatamente il vostro rivenditore o direttamente la Mobilex A/S.

## 9. Dichiarazione di conformità (CE)

La ditta Mobilex A/S con sede in Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danimarca dichiara che il prodotto

### **Rollator Mobilex "Antilope"**

è stato progettato e costruito conforme alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE:

- **direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993  
appendice I concernente i dispositivi medici**

Lars Nygaard  
Amministratore unico  
Mobilex A/S

Skanderborg, lì 30 giugno 2009



.....  
firma