


Alligator Ramper

CH-Rampe

Brugsanvisning

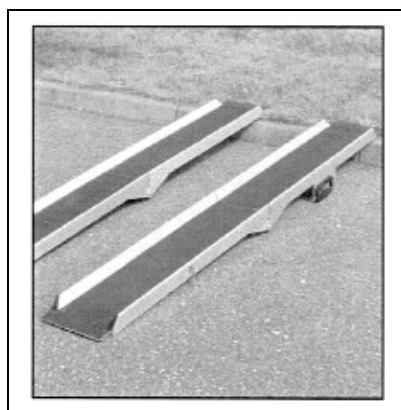

Kontakt:

Mobilex A/S

Nørskovvej 1

8660 Skanderborg

Danmark

CH-Ramper Indholdsfortegnelse.....	2
1 CH-Ramper Indholdsfortegnelse.....	3
2 CH-Ramper Sikkerhedshenvisning.....	4
2.1 Anvendte symboler.....	4
2.2 Sikkerhed – Generelle henvisninger.....	4
3 CH-Ramper Formålsbeskrivelse	5
4 CH-Ramper Indikation.....	5
5 CH-Ramper Konformitetserklæring.....	6
6 CH-Ramper Produktbeskrivelse.....	7
6.1 Produktbeskrivelse.....	7
7 CH-Ramper Leveringsomfang.....	7
8 CH-Ramper Anvendelsesbeskrivelse.....	7
9 CH-Ramper Transportbeskrivelse.....	8
10 CH-Ramper Tekniske data.....	8
11 CH-Ramper Typeskilt.....	9
12 CH-Ramper Rengøringsbeskrivelse.....	9
13 CH-Ramper Vedligeholdelse.....	9
14 CH-Ramper Bortskaffelse ved kassation.....	9
15 CH-Ramper Garantierklæring.....	10
16 CH-Ramper Egne notater.....	10

Denne brugervejledning beskriver hvorledes man anvender og vedligeholder Alligator CH-Ramper.

Ved spørgsmål bedes De kontakte forhandleren eller kontakte Mobilex:

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
8660 Skanderborg
Danmark

Telefon: +45 87932220

Telefax: +45 87931777

E-mail .: info@mobilex-care.com

2.1 Anvendte symboler

I brugervejledningen bliver følgende symboler anvendt:

Advarsel

Dette symbol kendetegner sikkerhedshenvisninger, der vedrører punkter som kan medføre risiko for skader, hvis anvisningerne ikke følges.

Henvisning

Dette symbol angiver en henvisning til, hvorledes produktet bør håndteres.

2.2 Sikkerhed – Generelle henvisninger

Sørg for, at denne brugervejledning bliver læst af alle personer der anvender rampen.

Skader, der skyldes at brugervejledningen ikke er fulgt, vil ikke blive erstattet.

Begrænsninger for anvendelsen

- CH-Ramperne må tilsammen ikke belastes med mere end maksimalt 300 kg.
- Ramperne må maksimalt anvendes ved stigninger på 35 cm

Fare for uheld

- Benyt kun ramperne til det formål de er bestemt for.
- Anvend kun ramper der er i teknisk god stand.
- Undlad at lave konstruktive ændringer på ramperne, medmindre producenten skriftligt har godkendt dette.
- Når ramperne åbnes må brugeren være opmærksom på ikke at klemme fingre eller andet.
- Ramperne må kun anvendes på et stabilt grundlag.

3 CH-Ramper

Formålsbeskrivelse

Mobilex-Ramper er transportable ramper beregnet til at forflytte patienter i kørestole. De muliggør passage af højdeforskelle med eller uden bistand fra hjælper. (F.ex. trapper). Mobilex-Ramperne gør det dermed muligt for patienter, der pga. en invaliditet sidder i kørestol, at entre eller forlade en bygning, og opfylder derved et grundlæggende behov. De kan anvendes såvel indenfor som udendørs. Alligator-Ramperne af typen CH, kan maksimalt belastes med 300 kg.

4 CH-Ramper

Indikation

Mobilex-Ramper finder anvendelse ved patienter, der pga. invaliditet sidder i kørestol. De gør det muligt for patienterne at overvinde højdeforskelle med eller uden bistand fra hjælper.

Producent:

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
8660 Skanderborg
Danmark

erklærer hermed, at produktet: Alligator Ramper Type CH

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- Retningslinjer 93/42/EWG for medicinalprodukter Del I fra 14 Juni 1993

Ansvarlig:

Firma: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark

Stilling: Adm. Direktør

Navn: Lars Nygaard

Skanderborg 12/8-2004

Dato




Underskrift

6 CH-Ramper

Produktbeskrivelse

6.1 Produktbeskrivelse

Alligator- Ramper, type CH er lavet af aluminium.

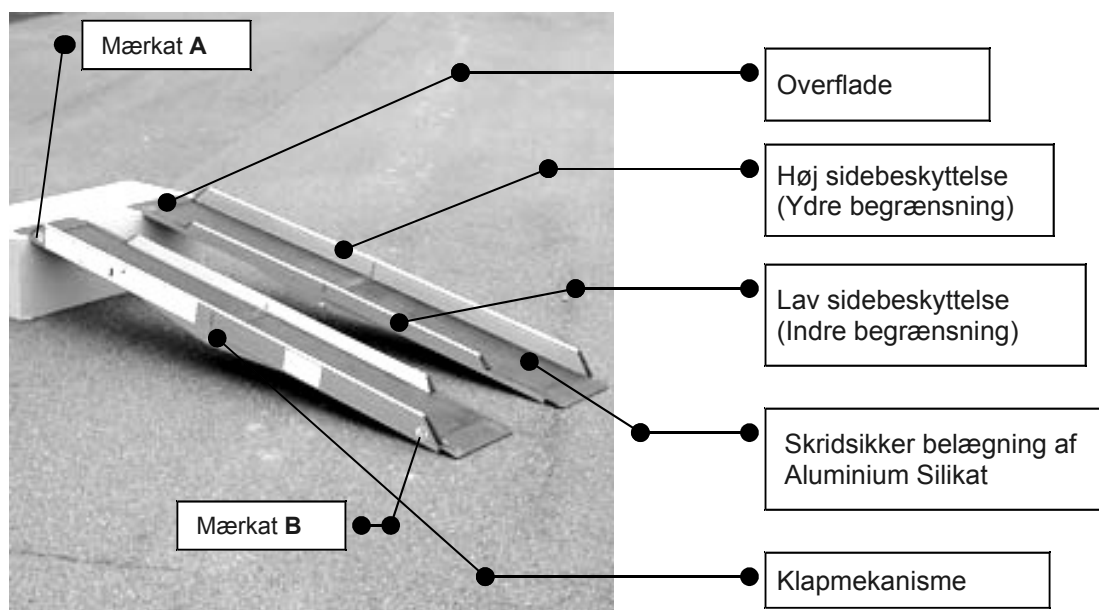

7 CH-Ramper

Leveringsomfang

CH-Ramper leveres monteret i kartoner.

Indholdet består af:

- 1 par Alligator-Ramper type CH
- 1 Brugsanvisning
- 1 Forpakningsemballage

8 CH-Ramper

Anvendelsesbeskrivelse



CH-Ramperne er med forsynet med en mærkat **A** og en mærkat **B** (se afbildning i afsnit 6).

- Mærkat **A** kendetegner den øverste del af rampen, dvs den side der placeres på hindringen.
- Mærkat **B** kendetegner den nederste del af rampen dvs. den side der placeres på underlaget.

- Ramperne skal placeres sådan at siderne med den høje sidebeskyttelse placeres udad. (Se afbildning i afsnit 6).
- Placer ramperne i en sådan afstand fra hinanden at hjulene på kørestolen kører i midten af ramperne.
- Enderne på ramperne skal placeres på et stabilt og lodret underlag.

 Kontroller at ramperne står stabilt før der køres på dem.

- Benyt kun ramperne til højdeforskelle op til 35 cm

9 CH-Ramper Transportbeskrivelse

Alligator-Ramper type CH kan for transport klappes sammen på midten, og låses med et hængsel.

10 CH-Ramper Tekniske data

Alligator type CH-180	
Længde:	2 x 180 cm
Bredde:	2 x 23,5 cm
Køreflade:	2 x 21 cm
Højde på sidebeskyttelse:	Yderkant: 6 cm / Inderkant: 3,3 cm
Max. stigning / højdeforskel:	12° / 35 cm
Vægt ialt:	13 kg
Max. Belastning:	300 kg
Bemærkning:	Anvendes parvist

11 CH-Ramper

Typeskilt

Typeskiltet befinder sig på ydersiden af rampen.

Afbildning af Typeskiltet:



12 CH-Ramper

Rengøringsbeskrivelse

- Let snavs og støv kan tørres af med en fugtig klud.
- Større urenheder kan fjernes med ikke-korroderende, mildt vaskemiddel.

13 CH-Ramper

Vedligeholdelse

Ramperne er vedligeholdelsesfri.

14 CH-Ramper

Bortskaffelse ved kassation

Ramperne må ikke smides i almindeligt husholdningsaffald.

De skal afleveres på den kommunale genbrugsplads.

