

# Rampe Alligator mod. CH

## Manuale d'uso e manutenzione



**MOBILEX A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca

[www.mobilex-care.com](http://www.mobilex-care.com)

## Importante!

**Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso. Seguite sempre scrupolosamente le istruzioni contenute, in particolare gli avvisi per la sicurezza.**

**Per ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi al Vs. rivenditore di fiducia oppure direttamente alla Mobilex A/S:**

**Mobilex A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danimarca

telefono: +45 87 93 22 20  
telefax: +45 87 93 17 77  
e-mail: [info@mobilex-care.com](mailto:info@mobilex-care.com)

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto di qualità controllata Mobilex®

## 1. Avvisi generali

### Marchio CE

questo prodotto soddisfa le norme comunitarie della direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici (vedi sezione 8 - dichiarazione di conformità)

### Garanzia

il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. La garanzia decade se il prodotto non è usato correttamente e/o in modo improprio. La garanzia non copre la normale usura, se non derivante da un difetto di fabbricazione e non copre i costi di trasporto.

## 2. Avvisi per la sicurezza

- Ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare le rampe, abbiano cura di leggere attentamente questo manuale ed i dati riportati sull'etichetta del prodotto
- Difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia
- Usare le rampe solo per l'uso consentito e solo se sono in perfetto stato. Non apportate modifiche alle rampe, se non esplicitamente autorizzate dal costruttore
- Al momento dello spiegamento delle rampe, chi ne fa uso dovrà porre particolare attenzione a non schiacciarsi dita o altre parti del corpo
- Le rampe dovranno essere usate solo su terreno stabile

### Finalità d'uso

Le rampe Mobilex sono sistemi di rampe mobili e trasportabili per consentire a persone in carrozzina di superare dislivelli con o senza l'aiuto di terze persone. Le rampe Mobilex permettono a persone costrette all'uso di una carrozzina, di entrare ed uscire in edifici che presentano barriere architettoniche (p.e. gradini), permettendone così il superamento. Poco ingombranti e facili da trasportare rappresentano un valido strumento d'aiuto per la vita quotidiana. Le rampe Mobilex sono adatte all'uso in interni ed esterni.

### Indicazione

Le rampe Mobilex sono indicate a persone disabili in carrozzina e sono un aiuto immediato per superare piccoli ostacoli della struttura architettonica con o senza l'aiuto di terzi.

### Limitazioni all'uso:


Le rampe Mobilex Alligator CH hanno una portata massima di 300 kg!

**Le rampe CH-180 possono essere impiegate per superare un dislivello massimo di 35 cm**

## 3. Descrizione e dati tecnici

### Descrizione del prodotto

Le rampe Mobilex Alligator CH sono costruite in alluminio.

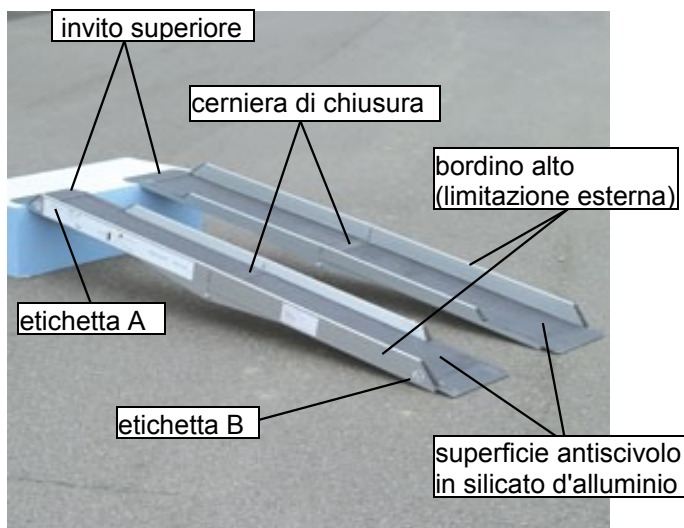

- le rampe mod. CH hanno un' etichetta A ed un'etichetta B (vedi immagine sopra)
- l'etichetta A contraddistingue la parte superiore della rampa, cioè la parte che andrà a posarsi sull'appoggio alto
- l'etichetta B contraddistingue la parte inferiore della rampa, cioè la parte che andrà a posarsi sul terreno
- gli inviti superiori e inferiori devono sempre poggiare su una superficie stabile ed orizzontale
- posare le rampe in modo che le ruote della carrozzina vadano ad infilarsi al centro del binario delle rampe
- prima di passare con la carrozzina sulle rampe assicurarsi che le rampe abbiano un'appoggio stabile
- le rampe Mobilex Alligator CH si possono ripiegare per il trasporto

### Etichetta del prodotto:

l'etichetta si trova sul lato esterno del prodotto

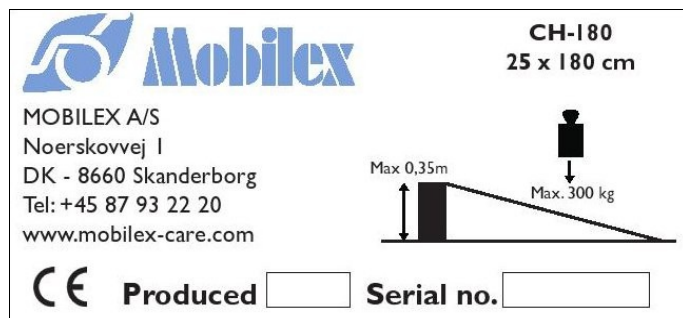


immagine dell'etichetta (esempio)

### Dati tecnici:

rampa Mobilex Alligator	CH-180
lunghezza	2 x 180 cm
larghezza	2 x 23,5 cm
larghezza banda interna (canalina)	2 x 21 cm
altezza bordo esterno/interno	bordo est. 6 cm / bordo int. 3,3 cm
pendenza max. / dislivello superabile	12° / 35 cm
peso totale	13 kg
portata massima	300 kg
nota	da usare in coppia di rampe

## 5. Pulizia e manutenzione

Leggera sporcizia e polvere possono essere rimosse con un panno umido. Una pulizia approfondita può essere effettuata con detergenti neutri usati per pulizia o disinfezione e con panni morbidi e non abrasivi. Controllate comunque attentamente anche le etichette e le indicazioni dei detergenti.

### Manutenzione

Le rampe Mobilex Alligator modello CH non necessitano di una particolare manutenzione, ma nonostante la stabilità della costruzione è consigliabile fare controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato.

## 6. Smaltimento

Le rampe Mobilex non possono essere smaltite con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle Oasi Ecologiche

## 7. Dichiarazione di conformità

---

la ditta

**Mobilex A/S  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Dänemark**

con la presente dichiara che

**le rampe Mobilex Alligator modello CH**

sono costruite in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE:

- **direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici**

*il responsabile:*

nome: Lars Nygaard  
posizione: amministratore delegato  
ditta: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Danimarca

Skanderborg, li 10/02/2005

.....  
*data*



.....  
*firma*