

Alligator Ramper

DF-Rampe

Brugsanvisning



Kontakt:

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
8660 Skanderborg
Danmark

DF-Ramper Indholdsfortegnelse.....	2
1 DF-Ramper Indledning.....	3
2 DF-Ramper Sikkerhedshenvisning.....	4
2.1 Anvendte symboler.....	4
2.2 Sikkerhed – Generelle henvisninger.....	4
3 DF-Ramper Formålsbeskrivelse	5
4 DF-Ramper Indikation.....	5
5 DF-Ramper Konformitetserklæring.....	6
6 DF-Ramper Produktbeskrivelse.....	7
6.1 Produktbeskrivelse.....	7
7 DF-Ramper Leveringsomfang.....	7
8 DF-Rampen Anvendelsesbeskrivelse.....	7
9 DF-Ramper Transportbeskrivelse.....	8
10 DF-Ramper Tekniske data.....	8
11 DF-Ramper Typenskilt.....	10
12 DF-Ramper Rengøringsbeskrivelse.....	10
13 DF-Ramper Vedligeholdelse.....	10
14 DF-Ramper Bortskaffelse ved kassation.....	10
15 DF-Ramper Garantierklæring.....	11
16 DF-Ramper Egne notater.....	11

Denne brugsanvisning beskriver, hvorledes man anvender og vedligeholder Alligator CH-Ramper.

Ved spørgsmål bedes De kontakte forhandleren eller kontakte Mobilex:

Mobilex A/S

Nørskovvej 1

8660 Skanderborg

Danmark

Telefon: +45 87932220

Telefax: +45 87931777

E-mail .: info@mobilex-care.com

2.1 Anvendte symboler

I brugsanvisningen anvendes følgende symboler:

Advarsel

Dette symbol kendetegner sikkerhedshenvisninger, der vedrører punkter som kan medføre risiko for skader, hvis anvisningerne ikke følges.

Henvisning

Dette symbol angiver en henvisning til, hvorledes produktet bør håndteres.

2.2 Sikkerhed – Generelle henvisninger

Sørg for, at denne brugervejledning bliver læst af alle personer der anvender rampen.

Skader, der skyldes at brugervejledningen ikke er fulgt, vil ikke blive erstattet.

Begrænsninger for anvendelsen

- DF-Ramperne må ikke belastes med mere end 300 kg.
- Ramperne må maksimalt anvendes ved stigninger på:

DF-180 35 cm

DF-240 50 cm

DF-300 60 cm

Fare for uheld

- Benyt kun rampen til det formål, den er bestemt til.
- Anvend kun ramper, der er i teknisk god tilstand.
- Undlad at lave konstruktive ændringer på rampen, medmindre producenten skriftligt har godkendt dette.
- Når rampen åbnes må brugeren være opmærksom på ikke at klemme fingre eller andet.
- Rampen må kun anvendes på et stabilt grundlag.

3 DF-Ramper

Formålsbeskrivelse

Mobilex-Ramper er transportable ramper beregnet til at forflytte patienter i kørestole. De muliggør passage af højdeforskelle med eller uden bistand fra hjælper. (F.ex. trapper). Mobilex-Ramperne gør det dermed muligt for patienter, der pga. en invaliditet sidder i kørestol, at entre eller forlade en bygning, og opfylder derved et grundlæggende behov. De kan anvendes såvel indenfor som udendørs. Alligator-Ramperne af typen DF, kan maksimalt belastes med 300 kg.

4 DF-Ramper

Indikation

Mobilex-Ramper finder anvendelse ved patienter, der pga. invaliditet sidder i kørestol. De gør det muligt for patienterne at overvinde højdeforskelle med eller uden bistand fra hjælper.

Producent:

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
8660 Skanderborg
Dänemark

erklærer hermed, at produktet: Alligator Ramper Type DF

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- Retningslinjer 93/42/EWG for medicinalprodukter Del I fra 14 Juni 1993

Ansvarlig:

Firma: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark

Stilling: Adm. Direktør

Navn: Lars Nygaard

Skanderborg 12/8-2004

Dato




Underskrift

6 DF-Ramper

Produktbeskrivelse

6.1 Produktbeskrivelse

Alligator- Ramper, Type DF er lavet af aluminium.

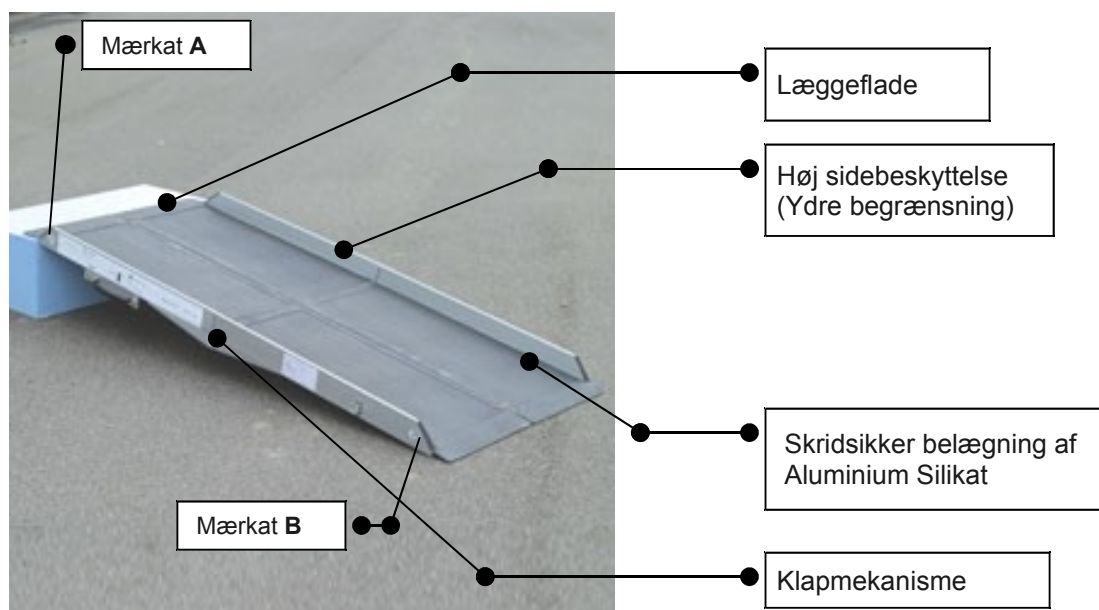

7 DF-Ramper

Leveringsomfang

DF-Ramper leveres monteret i kartoner.

Indholdet består af:

- 1 Alligator-Rampe Typ DF
- 1 Brugsanvisning
- 1 Forpakningsemballage

8 DF-Rampen

Anvendelsesbeskrivelse



DF-Ramper er forsynet med en mærkat **A** og en mærkat **B** (se afbildning i afsnit 6).

- Mærkat **A** kendetegner den øverste del af rampen, dvs. den side der placeres på hindringen.
- Mærkat **B** kendetegner den nederste del af rampen dvs. den side der placeres på underlaget.
- Ramperne skal placeres således at siderne med den høje sidebeskyttelse placeres udad (se afbildning i afsnit 6).

- Ramperne skal monteres sammen med de røde fjedre.
- Enderne på ramperne skal placeres på et stabilt og lodret underlag.

 Kontroller at ramperne står stabilt før der køres på dem.

- Benyt kun ramperne til højdeforskelle op til:

DF-180 **35 cm**

DF-240 **50 cm**

DF-300 **60 cm**

9 **DF-Ramper** **Transportbeskrivelse**

Alligator-Ramper type DF kan for transport klappes sammen på midten, og låses med et hængsel.

10 **DF-Ramper** **Tekniske data**

Alligator Type DF-180	
Længde:	2 x 180 cm
Bredde:	2 x 40 cm
Køreflade:	2 x 38 cm
Højde på sidebeskyttelse:	Yderkant: 6 cm
Max. Stigning / Højdeforskel:	12° / 35 cm
Vægt ialt:	16 kg
Max. Belastning:	300 kg
Bemærkning:	Anvendes parvist.

Alligator Type DF-240	
Længde:	2 x 240 cm
Bredde:	2 x 40 cm
Køreflade:	2 x 38 cm
Højde på sidebeskyttelse:	Yderkant: 6 cm
Max. Stigning / Højdeforskel:	12° / 50 cm
Vægt ialt:	22 kg
Max. Belastning:	300 kg

Bemærkning:	Anvendes parvist.
-------------	-------------------


Alligator Type DF-300	
Længde:	2 x 300 cm
Bredde:	2 x 40 cm
Køreflade:	2 x 38 cm
Højde på sidebeskyttelsen:	Yderkant: 6 cm
Max. Stigning / højdeforskel:	12° / 60 cm
Vægt ialt:	27,2 kg
Max. belastning:	300 kg
Bemærkning:	Anvendes parvist.

11 DF-Ramper

Typeskilt

Typeskiltet befinder sig på ydersiden af rampen:

Afbildning af typeskiltet:

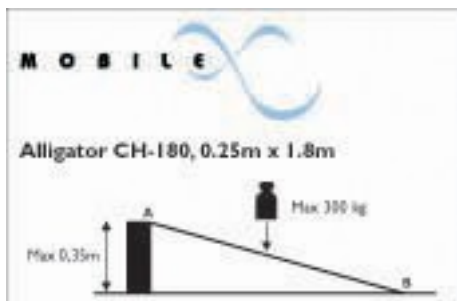

12 DF-Ramper

Rengøringsbeskrivelse

- Let snavs og støv kan tørres af med en fugtig klud.
- Større urenheder kan fjernes med ikke-korroderende, mildt vaskemiddel.

13 DF-Ramper

Vedligeholdelse

Ramperne er vedligeholdelsesfri.

14 DF-Ramper

Bortskaffelse ved kassation

Ramperne må ikke smides i almindeligt husholdningsaffald.

De skal afleveres på den kommunale genbrugsplads.

15 DF-Ramper

Garantierklæring

Producenten giver 2 års garanti ved produktionsfejl. Garantien gælder ikke ved fejlagtig anvendelse af produktet.

16 DF-Ramper

Egne notater
