

## Alligator SC Rampen Montage- und Gebrauchsanleitung



**MOBILEX A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Dänemark  
www.mobilex-care.com

## 1. Einleitung

Sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich für ein hochwertiges Mobilex Produkt entschieden und darüber freuen wir uns sehr. Diese Gebrauchsanleitung enthält eine genaue Beschreibung des Produktes und wichtige Hinweise für dessen korrekten Gebrauch. Bitte lesen Sie daher vor Gebrauch des Produktes diese Anleitung sorgfältig durch. Beachten Sie bitte alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit um einen sicheren und dauerhaften Einsatz des Produktes zu gewährleisten.

## Zweckbestimmung

Mobilex-Rampen sind mobile und transportable Rampensysteme zum Befahren mit dem Rollstuhl. Sie ermöglichen die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe (z.B. Treppentufen). Die Mobilex Rampen ermöglichen somit den Patienten, die aufgrund einer Mobilitätseinschränkung auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ein Gebäude zu verlassen bzw. aufzusuchen und tragen somit zur Befriedigung der Grundbedürfnisse des Benutzers bei. Sie können im Außen- und Innenbereich angewandt werden.

Bei weiteren Fragen zum Produkt wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

**Mobilex A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: [info@mobilex-care.com](mailto:info@mobilex-care.com)

## 2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur in einwandfreien technischen Zustand
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden kontaktieren Sie bitte unverzüglich Ihren Händler
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber
- Bitte nutzen Sie die Rampen nur für den vorgesehenen Einsatzbereich (siehe Zweckbestimmung)
- Beim Auseinander- oder Zusammenfallen der Rampen darauf achten keine Finger oder andere Körperteile einzuquetschen
- Die Rampen dürfen nur auf einer stabilen Bodenfläche verwendet werden

## 3. Beschreibung

### Produkt Beschreibung

Die Mobilex SC Rampen bestehen aus Aluminium mit geriffelter rutschfester Oberfläche. Die SC Rampen sind in 3 Längen verfügbar.

### Funktionsbeschreibung

Mobilex-Rampen finden bei Patienten Anwendung, die auf Rollstühle angewiesen sind. Sie sollen den Patienten die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe ermöglichen.

### Handhabung beim Transport

Die Mobilex SC-Rampen können für einen bequemen Transport in Längsrichtung zusammengeklappt werden und sind mit einem bequemen Tragegriff ausgerüstet (siehe Bild rechts)



## 5. Technische Daten

Alligator SC Rampen	SC-090	SC-120	SC-150
Gesamt-Länge	90 cm	120 cm	150 cm
Gesamt-Breite	71 cm	71 cm	71 cm
Laufflächen-Breite	70 cm	70 cm	70 cm
Höhe der Radabweiser	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
Max. Steigung / Höhenunterschied	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm
Gesamtgewicht	6,68 kg	9,14 kg	11,43 kg
Max. Benutzergewicht (Traglast)	300 kg	300 kg	300 kg

### Produkt-Aufkleber

Das Typenschild befindet sich außen am Radabweiser

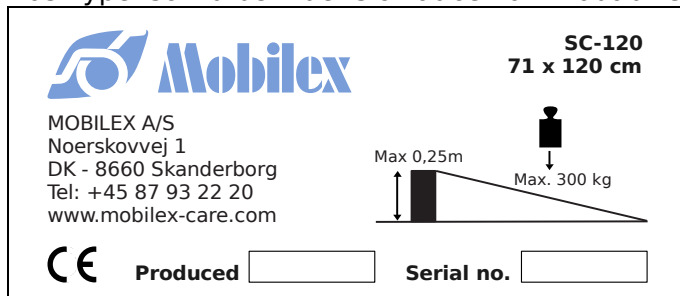


Abbildung des Typenschildes (nicht originales Beispiel)

## 6. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermitte!).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiß. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmäßigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

## 7. Allgemeine Problembhebungen

Problembeschreibung	Mögliche Ursache	Problembhebung
Die Rampe klemmt beim Aus-einander- oder Zusammen-Falten	Die seitlichen Radabweiser könnten verbogen sein	Versuchen Sie die Radabweiser gerade zu biegen
Die Rampe lässt sich schwer Aus-einander- oder Zusammen-Falten	Schmutz an oder in den Scharnieren	Reinigen und ölen Sie die Scharniere

## 8. Entsorgung des Produktes

Das Produkt kann nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

## 9. Garantie

Mobilex A/S gewährt auf alle vertriebenen Produkte eine Garantie gegen Material- oder Produktionsfehler für die Dauer der in den jeweiligen Ländern gesetzlich vorgeschriebenen Garantiezeit. Mobilex A/S übernimmt keine Gewährleistung für Schäden die aus unsachgemäßer oder nicht fachgerechter Montage und/oder Reparatur, durch Vernachlässigung und Verschleiß, sowie durch Veränderungen von Baugruppen durch den Benutzer oder Dritte entstanden sind. In diesen Fällen erlischt die CE Kennzeichnung und die Produkthaftung.

Die Garantie deckt keine Transportkosten sowie Schadensersatzansprüche die auf Nicht-Nutzung des Produktes während der Reparaturzeiten zurückzuführen sind. Des weiteren besteht keine Gewährleistung für Schäden die aus Nichtbeachtung oder Missverständnissen dieser Bedienungsanleitung entstehen.

Bei Entdecken von Material oder Produktionsfehlern setzen Sie sich bitte sofort mit ihrem Händler oder direkt mit Mobilex A/S in Verbindung.

## 10. Konformitätserklärung (CE)

Die Firma Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Dänemark erklärt hiermit, dass das Produkt

### **Mobilex Alligator SC Rampen**

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des EU Rates 93/42/EWG**  
für Medizinprodukte, Anhang I vom 14 Juni 1993

Lars Nygaard  
Geschäftsführer  
Mobilex A/S

Skanderborg, am 29.11.2009



.....  
Unterschrift