

Rampe Mobilex Alligator SC Manuale d'uso e manutenzione



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca
www.mobilex-care.com

1. Introduzione

Gentile cliente,

ha acquistato un prodotto di qualità Mobilex e ne siamo particolarmente felici. Questo manuale contiene una descrizione dettagliata del prodotto nonché informazioni importanti per il suo corretto utilizzo. Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente questo manuale e di osservare scrupolosamente tutte le istruzioni contenute, in particolare le note relative alla sicurezza per poter garantire sempre un uso sicuro ed efficiente del prodotto.

Nota: Nell'intento di migliorare sviluppiamo continuamente i nostri prodotti e pertanto ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti senza ulteriore preavviso.

Destinazione d'uso

Le rampe Mobilex sono sistemi di rampe mobili e trasportabili per consentire a persone in carrozzina di superare dislivelli con o senza l'aiuto di terze persone. Le rampe Mobilex permettono a persone costrette all'uso di una carrozzina, di entrare ed uscire in edifici che presentano barriere architettoniche (p.e. gradini), permettendone così il superamento. Poco ingombranti e facili da trasportare rappresentano un valido strumento d'aiuto per la vita quotidiana. Le rampe Mobilex sono adatte all'uso in interni ed esterni.

In caso di ulteriori domande rivolgetevi al vs. rivenditore di fiducia o direttamente alla Mobilex A/S:

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

Telefono: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-mail: info@mobilex-care.com

2. Avvisi per la sicurezza

- Ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare le rampe abbiano cura di leggere attentamente questo manuale ed i dati riportati sull'etichetta del prodotto
- Difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia
- Usare le rampe solo per l'uso consentito e solo se sono in perfetto stato. Non apportate modifiche alle rampe, se non esplicitamente autorizzate dal costruttore
- Al momento dello spiegamento delle rampe, chi ne fa uso dovrà porre particolare attenzione a non schiacciarsi dita o altre parti del corpo
- le rampe devono essere usate solo su terreni stabili con piani d'appoggio paralleli

3. Descrizione

Descrizione del prodotto

Le rampe Mobilex SC sono d'alluminio con una superficie zigrinata. Le rampe SC sono disponibili in tre lunghezze diverse.

Funzione

Le rampe Mobilex sono ideate per aiutare persone in carrozzina a superare ostacoli con o senza l'aiuto di una persona accompagnatoria.

Transporto

Le rampe Mobilex SC possono essere ripiegate longitudinalmente ed sono dotate di un comodo maniglione per il trasporto (vedi immagine a destra)



5. Dati tecnici

Rampe Mobilex Alligator SC	SC-090	SC-120	SC-150
lunghezza	90 cm	120 cm	150 cm
larghezza	71 cm	71 cm	71 cm
larghezza canalina	70 cm	70 cm	70 cm
altezza bordi laterali	3,5 cm	3,5 cm	3,5 cm
pendenza massima / dislivello	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm
peso	6,68 kg	9,14 kg	11,43 kg
portata massima	300 kg	300 kg	300 kg

Etichetta del prodotto:

l'etichetta si trova sul esterno del bordo laterale

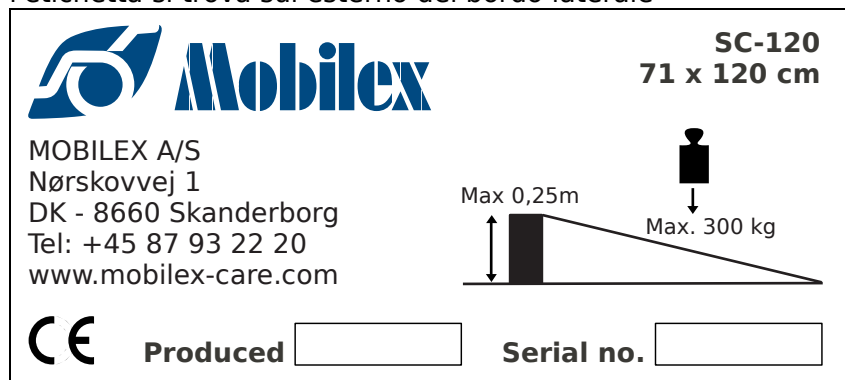


immagine dell'etichetta (esempio non originale)

6. Pulizia e manutenzione

Leggera sporcizia e polvere possono essere rimosse con un panno umido. Una pulizia approfondita può essere effettuata con detergenti neutri usati per pulizia o disinfezione e con panni morbidi e non abrasivi. Controllate comunque attentamente anche le etichette e le indicazioni dei detergenti.

Le rampe Mobilex non necessitano di una particolare manutenzione ma nonostante la stabilità della costruzione e l'uso di materiali durevoli è consigliabile fare controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato.

7. Risoluzione di piccoli guasti

descrizione del problema	possibile causa	possibile risoluzione
la rampa di apre difficilmente o si inceppa (sembra bloccata)	i bordi laterali potrebbero essere piegati	tentare di raddrizzare i bordi
la rampa è difficile da aprire o da chiudere (spiegamento)	sporcizia sulle o nelle cerniere	pulire le cerniere ed oliarle leggermente

8. Smaltimento

Le rampe Mobilex non possono essere smaltite con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle Oasi Ecologiche

9. Garanzia

Mobilex A/S offre per tutti i prodotti commercializzati una garanzia contro difetti di materiale o difetti di costruzione per la durata del periodo di garanzia legale prevista dai rispettivi paesi nei quali è commercializzato il prodotto. Mobilex A/S non può essere responsabilizzata per danni derivanti da un uso improprio o da riparazioni e/o modifiche non professionalmente eseguite nonché per danni causati da negligenza ed usura o da alterazioni di componenti da parte dell'utente o di terzi. In questi casi si estingue la marcatura CE e di conseguenza la responsabilità e garanzia Mobilex per il prodotto.

La garanzia non copre i costi di trasporto nonché crediti per il mancato uso del prodotto durante il periodo di riparazione. Inoltre la garanzia non copre danni derivanti dalla non ottemperanza o mancata comprensione di questo manuale.

Nel caso si riscontrassero difetti di materiale o di fabbricazione contattate immediatamente il vostro rivenditore o direttamente la Mobilex A/S.

10. Dichiarazione di conformità (CE)

La ditta Mobilex A/S con sede in Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danimarca dichiara che il prodotto

Rampe Mobilex Alligator SC

è stato progettato e costruito in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE:

- **direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993
appendice I concernente i dispositivi medici**

Lars Nygaard
Amministratore unico
Mobilex A/S

Skanderborg, lì 29/11/2009



.....
firma