

# Alligator Ramper

## SF-Rampe

Brugsanvisning



**Kontakt:**

**Mobilex A/S**  
**Nørskovvej 1**  
**8660 Skanderborg**  
**Danmark**

<a href="#">SF-Ramper Indholdsfortegnelse.....</a>	<a href="#">2</a>
<a href="#">1 SF-Ramper Indledning.....</a>	<a href="#">3</a>
<a href="#">2 SF-Ramper Sikkerhedshenvisning.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">2.1 Anvendte symboler.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">2.2 Sikkerhed – Generelle henvisninger.....</a>	<a href="#">4</a>
<a href="#">3 SF-Ramper Formålsbeskrivelse .....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">4 SF-Ramper Indikation.....</a>	<a href="#">5</a>
<a href="#">5 SF-Ramper Konformitetserklæring.....</a>	<a href="#">6</a>
<a href="#">6 SF-Ramper Produktaufbau.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">6.1 Produktbeskrivelse.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">7 SF-Ramper Leveringsomfang.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">8 SF-Ramper Anvendelsesbeskrivelse.....</a>	<a href="#">7</a>
<a href="#">9 SF-Ramper Transportbeskrivelse.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">10 SF-Ramper Tekniske data.....</a>	<a href="#">8</a>
<a href="#">11 SF-Ramper Typeskilt.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">12 SF-Ramper Rengøringsbeskrivelse.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">13 SF-Ramper Vedligeholdelse.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">14 SF-Ramper Bortskaffelse ved kassation.....</a>	<a href="#">10</a>
<a href="#">15 SF-Ramper Garanti erklæring.....</a>	<a href="#">11</a>
<a href="#">16 SF-Ramper Egne notater.....</a>	<a href="#">11</a>

Denne brugsanvisning beskriver, hvorledes man anvender og vedligeholder Alligator CH-Ramper.

Ved spørgsmål bedes De kontakte forhandleren eller kontakte Mobilex:

**Mobilex A/S**

**Nørskovvej 1**

**8660 Skanderborg**

**Danmark**

Telefon: +45 87932220

Telefax: +45 87931777

E-mail .: [info@mobilex-care.com](mailto:info@mobilex-care.com)

### 2.1 Anvendte symboler

I brugsanvisningen anvendes følgende symboler:

#### **Advarsel**

Dette symbol kendetegner sikkerhedshenvisninger, der vedrører punkter som kan medføre risiko for skader, hvis anvisningerne ikke følges.

#### **Henvisning**

Dette symbol angiver en henvisning til, hvorledes produktet bør håndteres.

### 2.2 Sikkerhed – Generelle henvisninger

Sørg for, at denne brugervejledning bliver læst af alle personer der anvender rampen.

Skader, der skyldes at brugervejledningen ikke er fulgt, vil ikke blive erstattet.

#### **Begrænsninger for anvendelsen**

- SF-Rampen må ikke belastes med mere end 300 kg.
- Ramperne må maksimalt anvendes ved stigninger på:

**SF-090      20 cm**

**SF-120      25 cm**

**SF-150      30 cm**

#### **Fare for uheld**

- Benyt kun rampen til det formål, den er bestemt til.
- Anvend kun ramper, der er i teknisk god tilstand.
- Undlad at lave konstruktive ændringer på rampen, medmindre producenten skriftligt har godkendt dette.
- Når rampen åbnes må brugeren være opmærksom på ikke at klemme fingre eller andet.
- Rampen må kun anvendes på et stabilt grundlag.

### **3 SF-Ramper**

### **Formålsbeskrivelse**

Mobilex-Ramper er transportable ramper beregnet til at forflytte patienter i kørestole. De muliggør passage af højdeforskelle med eller uden bistand fra hjælper. (F.ex. trapper). Mobilex-Ramperne gør det dermed muligt for patienter, der pga. en invaliditet sidder i kørestol, at entre eller forlade en bygning, og opfylder derved et grundlæggende behov. De kan anvendes såvel indenfor som udendørs. Alligator-Ramperne af typen SF, kan maksimalt belastes med 300 kg.

### **4 SF-Ramper**

### **Indikation**

Mobilex-Ramper finder anvendelse ved patienter, der pga. invaliditet sidder i kørestol. De gør det muligt for patienterne at overvinde højdeforskelle med eller uden bistand fra hjælper.

**Producent:**

Mobilex A/S  
Nørskovvej 1  
8660 Skanderborg  
Danmark

erklærer hermed, at produktet: Alligator Ramper Type SF

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- Retningslinjer 93/42/EWG for medicinalprodukter Del I fra 14 Juni 1993

**Ansvarlig:**

**Firma:** Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark

**Stilling:** Adm. Direktør

**Navn:** Lars Nygaard

Skanderborg 12/8-2004

-----  
Dato




-----  
Underskrift

## 6 SF-Ramper

## Produktaufbau

### 6.1 Produktbeskrivelse

Alligator- Ramper, Type SF er lavet af aluminium.

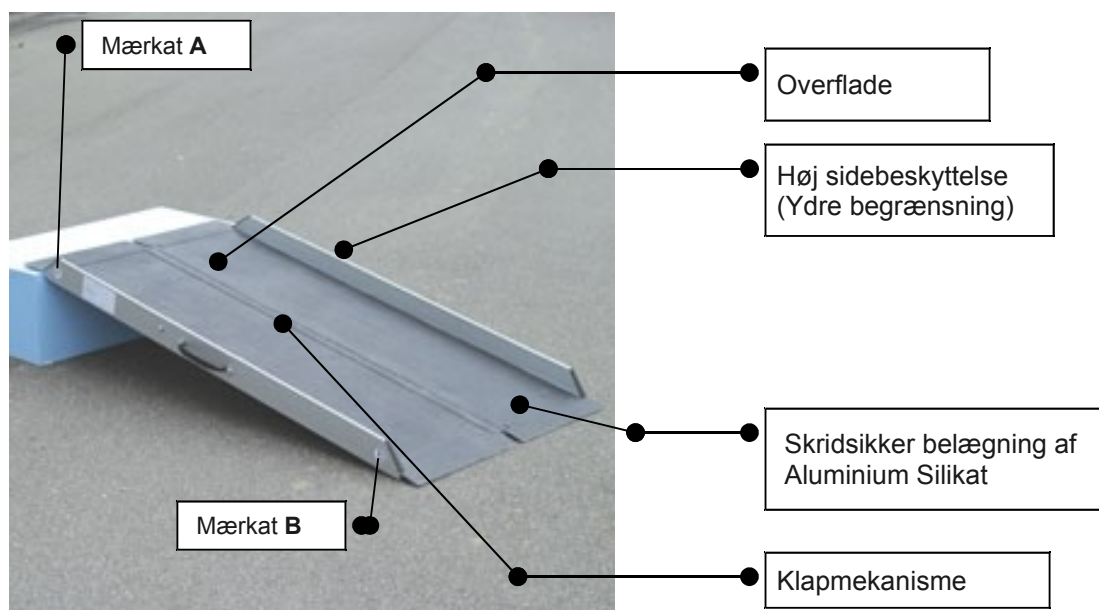

## 7 SF-Ramper

## Leveringsomfang

SF-Rampen leveres monteret i en karton.

Indholdet består af:

- 1 Alligator-Rampe Typ SF
- 1 Brugsanvisning
- 1 Forpakningsemballage

## 8 SF-Ramper

## Anvendelsesbeskrivelse



SF-Rampen er forsynet med en mærkat **A** og en mærkat **B** (se afbildning i afsnit 6).

- Mærkat **A** kendetegner den øverste del af rampen, dvs. den side der placeres på hindringen.
- Mærkat **B** kendetegner den nederste del af rampen dvs. den side der placeres på underlaget.
- Enderne på ramperne skal placeres på et stabilt og lodret underlag.



Kontroller at ramperne står stabilt før der køres på dem.

- Benyt kun ramperne til højdeforskelle op til:

<b>SF-090</b>	<b>20 cm</b>
<b>SF-120</b>	<b>25 cm</b>
<b>SF-150</b>	<b>30 cm</b>

## 9 SF-Ramper

## Transportbeskrivelse

Alligator-Ramper type SF kan for transport foldes sammen på midten, og låses med en strop.

## 10 SF-Ramper

## Tekniske data

<b>Alligator Type SF-090</b>	
Længde:	90 cm
Bredde:	80 cm
Køreflade:	76 cm
Højde af sidebeskyttelse:	Yderkant: 6 cm
Max. Stigning / Højdeforskel:	12° / 20 cm
Vægt ialt:	8 kg
Max. belastning:	300 kg
Bemærkning:	

<b>Alligator Type SF-120</b>	
Længde:	120 cm
Bredde:	80 cm
Køreflade:	76 cm
Højde af sidebeskyttelse:	Yderkant: 6 cm
Max. Stigning / Højdeforskel:	12° / 25 cm
Vægt ialt:	10,5 kg
Max. Belastning:	300 kg
Bemærkning:	

<b>Alligator Type SF-150</b>
------------------------------


Længde:	150 cm
Bredde:	80 cm
Køreflade:	76 cm
Højde på sidebeskyttelse:	Yderkant: 6 cm
Max. Stigning / højdeforskel:	12° / 30 cm
Vægt ialt:	12,5 kg
Max. belastning:	300 kg
Bemærkning:	

## 11 SF-Ramper

## Typeskilt

Typeskiltet befinder sig på ydersiden af rampen:

Afbildning af typeskiltet:

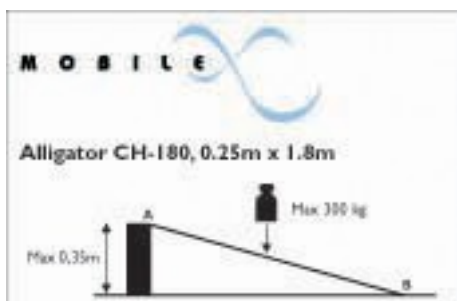

## 12 SF-Ramper

## Rengøringsbeskrivelse

- Let snavs og støv kan tørres af med en fugtig klud.
- Større urenheder kan fjernes med ikke-korroderende, mildt vaskemiddel.

## 13 SF-Ramper

## Vedligeholdelse

Ramperne er vedligeholdelsesfri.

## 14 SF-Ramper

## Bortskaffelse ved kassation

Ramperne må ikke smides i almindeligt husholdningsaffald.

De skal afleveres på den kommunale genbrugsplads.

**15 SF-Ramper****Garantieerklæring**

Producenten giver 2 års garanti ved produktionsfejl. Garantien gælder ikke ved fejlagtig anvendelse af produktet.

**16 SF-Ramper****Egne notater**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---