

Rampe Alligator mod. SF

Manuale d'uso e manutenzione



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

www.mobilex-care.com

Importante!

Leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso. Seguite sempre scrupolosamente le istruzioni contenute, in particolare gli avvisi per la sicurezza.

Per ulteriori chiarimenti potete rivolgerVi al Vs. rivenditore di fiducia oppure direttamente alla Mobilex A/S:

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

telefono: +45 87 93 22 20
telefax: +45 87 93 17 77
e-Mail: info@mobilex-care.com

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto di qualità controllata Mobilex®

1. Avvisi generali

Marchio CE

questo prodotto soddisfa le norme comunitarie della direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici (vedi sezione 8 - dichiarazione di conformità)

Garanzia

il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. La garanzia decade se il prodotto non è usato correttamente e/o in modo improprio. La garanzia non copre la normale usura, se non derivante da un difetto di fabbricazione e non copre i costi di trasporto.

2. Sicherheitshinweise

- Ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare le rampe, abbiano cura di leggere attentamente questo manuale ed i dati riportati sull'etichetta del prodotto
- Difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia
- Usare le rampe solo per l'uso consentito e solo se sono in perfetto stato. Non apportate modifiche alle rampe, se non esplicitamente autorizzate dal costruttore
- Al momento dello spiegamento delle rampe, chi ne fa uso dovrà porre particolare attenzione a non schiacciarsi dita o altre parti del corpo

Finalità d'uso

Le rampe Mobilex sono sistemi di rampe mobili e trasportabili per consentire a persone in carrozzina di superare dislivelli con o senza l'aiuto di terze persone. Le rampe Mobilex permettono a persone costrette all'uso di una carrozzina, di entrare ed uscire in edifici che presentano barriere architettoniche (p.e. gradini), permettendone così il superamento. Poco ingombranti e facili da trasportare rappresentano un valido strumento d'aiuto per la vita quotidiana. Le rampe Mobilex sono adatte all'uso in interni ed esterni.

Indicazione

Le rampe Mobilex sono indicate a persone disabili in carrozzina e sono un aiuto immediato per superare piccoli ostacoli della struttura architettonica con o senza l'aiuto di terzi.

Limitazioni all'uso:

Le rampe Mobilex Alligator SF hanno una portata massima di 300 kg!


Le rampe SF possono essere impiegate per superare un dislivello massimo di:

modello SF-090:	20 cm
modello SF-120:	25 cm
modello SF-150:	30 cm

3. Descrizione e dati tecnici

Descrizione del prodotto

Le rampe Mobilex Alligator SF sono costruite in alluminio.

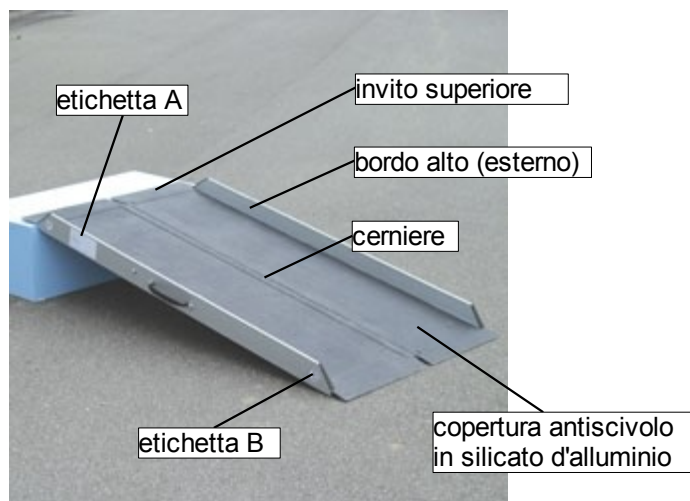

- le rampe mod. SF hanno un' etichetta A ed un'etichetta B (vedi immagine sopra)
- l'etichetta A contraddistingue la parte superiore della rampa, cioè la parte che andrà a posarsi sull'appoggio alto
- l'etichetta B contraddistingue la parte inferiore della rampa, cioè la parte che andrà a posarsi sul terreno
- gli inviti superiori e inferiori devono sempre poggiare su una superficie stabile ed orizzontale
- posare le rampe in modo che le ruote della carrozzina vadano ad infilarsi al centro del binario delle rampe
- prima di passare con la carrozzina sulle rampe assicurarsi che le rampe abbiano un'appoggio stabile
- le rampe Mobilex Alligator SF si possono ripiegare per il trasporto

Etichetta del prodotto:

l'etichetta si trova sul lato esterno del prodotto

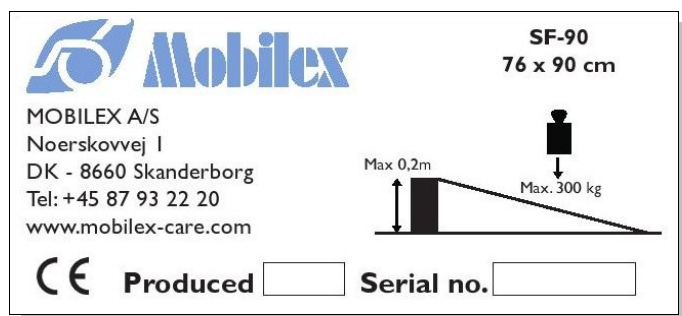


immagine dell'etichetta (esempio)

4. Dati tecnici:

rampa Mobilex Alligator tipo	SF-090	SF-120	SF-150
lunghezza	90 cm	120 cm	150 cm
larghezza	80 cm	80 cm	80 cm
larghezza banda interna (canalina)	76 cm	76 cm	76 cm
altezza bordo esterno	6 cm	6 cm	6 cm
pendenza max. / dislivello superabile	12° / 20 cm	12° / 25 cm	12° / 30 cm
peso totale	8 kg	10,5 kg	12,5 kg
portata massima	300 kg	300 kg	300 kg

5. Pulizia e manutenzione

Leggera sporcizia e polvere possono essere rimosse con un panno umido. Una pulizia approfondita può essere effettuata con detersivi neutri usati per pulizia o disinfezione e con panni morbidi e non abrasivi. Controllate comunque attentamente anche le etichette e le indicazioni dei detersivi.

Manutenzione

Le rampe Mobilex Alligator modello SF non necessitano di una particolare manutenzione, ma nonostante la stabilità della costruzione è consigliabile fare controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato.

6. Smaltimento

Le rampe Mobilex non possono essere smaltite con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle Oasi Ecologiche

7. Dichiarazione di conformità

la ditta

**Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark**

con la presente dichiara che

le rampe Mobilex Alligator modello SF

sono costruite in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE:

**direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
appendice I, concernente i dispositivi medici**

il responsabile:

nome: Lars Nygaard
posizione: amministratore unico
ditta: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Danimarca

Skanderborg, li 12/08/2005

.....
data



.....
firma