

Alligator Koffer-Rampen SR

Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG).

Garantie

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleissteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur wenn es sich in einwandfreiem technischen Zustand befindet
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber.
- Bitte nutzen Sie die Rampen nur für den vorgesehenen Einsatzbereich (*siehe Zweckbestimmung*)
- Wenn die Rampen auseinandergefaltet werden, muss der Benutzer darauf achten, dass die Finger oder andere Körperteile nicht eingequetscht werden
- Die Rampen dürfen nur auf stabilem Boden verwendet werden

Zweckbestimmung:

Mobilex-Rampen sind mobile, transportable Rampensysteme zum Befahren mit dem Rollstuhl. Sie ermöglichen die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe (z.B. Treppenstufen). Die Mobilex-Rampen ermöglichen somit den Patienten, die aufgrund einer Mobilitätseinschränkung auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ein Gebäude zu verlassen bzw. aufzusuchen und tragen somit zur Befriedigung der Grundbedürfnisse bei.

Sie können im Außen- und Innenbereich angewandt werden.

Indikation:

Mobilex-Rampen finden bei Patienten Anwendung, die auf Rollstühle angewiesen sind. Sie sollen den Patienten die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe ermöglichen

Einschränkung der Verwendung:

Die SR-Rampen dürfen nicht mit mehr als insgesamt 300 kg belastet werden.

Die Rampen dürfen maximal auf Steigungen von:


Modell SR-180:	35 cm
Modell SR-240:	50 cm

verwendet werden.

3. Beschreibung und technische Daten

Produkt Beschreibung

Die Alligator- Rampen, Typ SR, bestehen aus Aluminium.

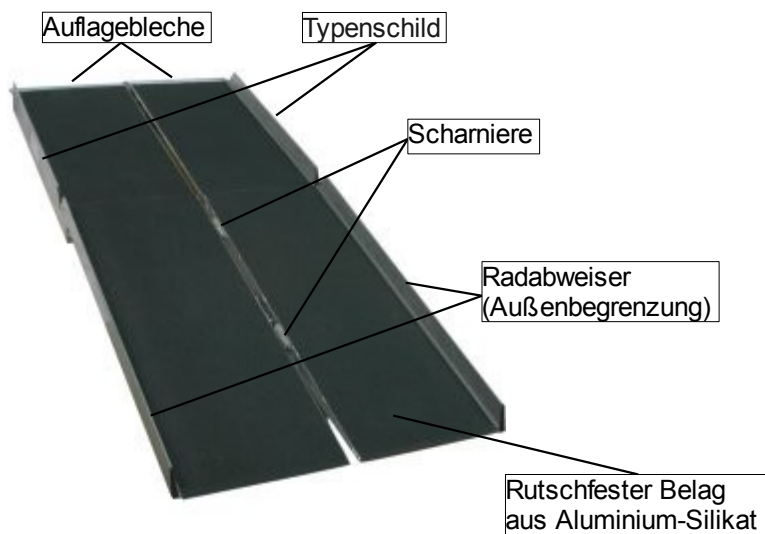

- Die SR-Rampen sind mit einem Typenschild gekennzeichnet (siehe Abbildung oben).
- Die Auflagebleche kennzeichnen die obere Seite der Rampen, die auf dem Hindernis aufliegen und müssen stets auf einem stabilen und waagrechten Untergrund platziert werden.
- Achten Sie darauf, daß die Rampen nur in komplett aufgeklapptem/geöffnetem Zustand verwendet werden dürfen
- Prüfen Sie die Rampen vor jedem Befahren auf eine sichere, stabile Lage

Produkt-Aufkleber:

Das Typenschild befindet sich auf der Außenseite der Rampe

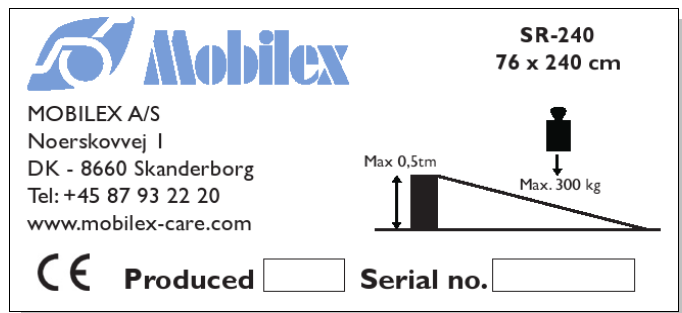


Abbildung des Typenschildes (Beispiel)

4. Technische Daten:

Alligator Rampe Typ	SR-180	SR-240
Länge:	180 cm	240 cm
Breite:	80 cm	80 cm
Lauffläche:	72 cm	72 cm
Höhe der Radabweiser:	Außenkante: 6 cm	Außenkante: 6 cm
Max. Steigung / Höhenunterschied:	12° / 35 cm	12° / 50 cm
Gesamtgewicht:	14,1 kg	18,5 kg
Max. Benutzergewicht (Traglast):	300 kg	300 kg

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiss. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmässigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

6. Entsorgung des Produktes

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

7. Konformitätserklärung

Die Firma

**Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark**

erklärt hiermit, dass das Produkt

Alligator Koffer-Rampen Typ SR

in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte, Anhang I vom 14 Juni 1993**

Der Verantwortliche:

Name: Lars Nygaard
Stellung: Geschäftsführer
Firma: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark

Skanderborg, den 10.09.2007

.....
Datum



.....
Unterschrift