

rampe a valigia Mobilex Alligator SR

Manuale d'uso e manutenzione



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

www.mobilex-care.com

Importante!

Prima dell'uso leggete attentamente questo manuale e seguite sempre scrupolosamente le istruzioni contenute, in particolare gli avvisi per la sicurezza.

Per ulteriori chiarimenti potete rivolgervi al Vs. rivenditore di fiducia oppure direttamente alla Mobilex A/S:

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

telefono: +45 87 93 22 20
telefax: +45 87 93 17 77
e-mail: info@mobilex-care.com
sito: www.mobilex-care.com

Vi ringraziamo per aver scelto un prodotto di qualità controllata Mobilex®

1. Avvisi generali

Marchio CE

questo prodotto soddisfa le norme comunitarie della direttiva 93/42/CEE del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici (vedi sezione 7 - dichiarazione di conformità)

Garanzia

il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni contro difetti di produzione. La garanzia decade se il prodotto non è usato correttamente e/o in modo improprio. La garanzia non copre la normale usura, se non derivante da un difetto di fabbricazione e non copre i costi di trasporto.

2. Avvisi per la sicurezza

- Ponete attenzione affinché tutte le persone che intendono usare le rampe, abbiano cura di leggere attentamente questo manuale ed i dati riportati sull'etichetta del prodotto
- Difetti che possono nascere da un non corretto o improprio uso del prodotto e/o derivanti dall'inosservanza di questo manuale sono esclusi da qualsiasi garanzia
- Usare le rampe solo per l'uso consentito e solo se sono in perfetto stato. Non apportate modifiche alle rampe, se non esplicitamente autorizzate dal costruttore
- Al momento dello spiegamento/piegamento delle rampe chi ne fa uso dovrà porre particolare attenzione a non schiacciarsi dita o altre parti del corpo
- Le rampe dovranno essere usate solo su terreno stabile

Finalità d'uso

Le rampe Mobilex sono sistemi di rampe mobili e trasportabili per consentire a persone in carrozzina di superare dislivelli con o senza l'aiuto di terze persone. Le rampe Mobilex permettono a persone costrette all'uso di una carrozzina, di entrare ed uscire in edifici che presentano barriere architettoniche (p.e. gradini), permettendone così il superamento. Poco ingombranti e facili da trasportare rappresentano un valido strumento d'aiuto per la vita quotidiana. Le rampe Mobilex sono adatte all'uso in interni ed esterni.

Indicazione

Le rampe Mobilex sono indicate a persone disabili in carrozzina e sono un aiuto immediato per superare piccoli ostacoli della struttura architettonica con o senza l'aiuto di terzi.

Limitazioni all'uso:

Le rampe Mobilex Alligator SR hanno una portata massima di 300 kg!


Le rampe SR possono essere impiegate per superare al massimo i seguenti dislivelli:

Modello SR-180: 35 cm
Modello SR-240: 50 cm

1. Descrizione e dati tecnici

Descrizione del prodotto

Le rampe Mobilex SR sono costruite in alluminio

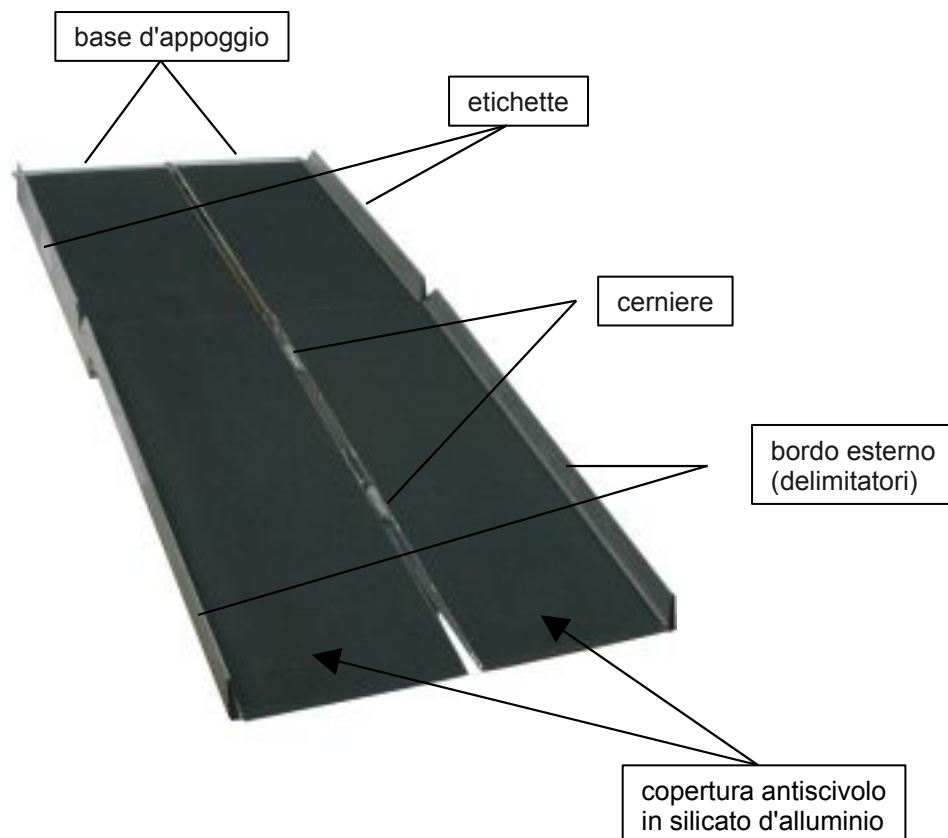

- le rampe mod. SR hanno l'etichetta sul lato (vedi immagine sopra)
- la base d'appoggio deve sempre poggiare su una superficie stabile ed orizzontale
- usare le rampe solo se completamente aperte e posate su superfici piane e stabili
- le rampe Mobilex Alligator SR possono essere ripiegate per il trasporto

Etichetta:

l'etichetta si trova sul lato esterno del prodotto

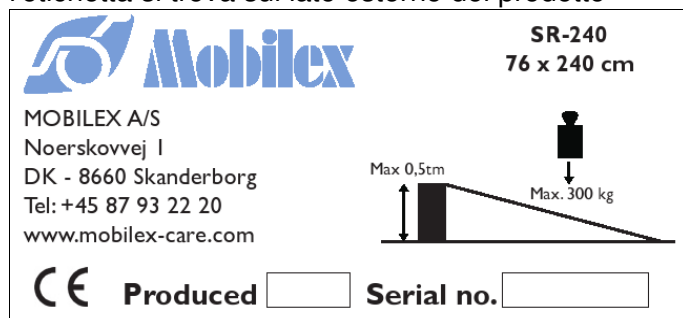


immagine dell'etichetta (esempio)

4. Dati tecnici:

rampa tipo	SR-180	SR-240
lunghezza	180 cm	240 cm
larghezza totale	80 cm	80 cm
larghezza interna	72 cm	72 cm
altezza bordi	bordo esterno: 6 cm	bordo esterno: 6 cm
pendenza max. / dislivello superabile	12° / 35 cm	12° / 50 cm
peso totale	14,1 kg	18,5 kg
portata max.	300 kg	300 kg

5. Pulizia e manutenzione

Leggera sporcizia e polvere possono essere rimosse con un panno umido. Una pulizia approfondita può essere effettuata con detergenti neutri usati per pulizia o disinfezione e con panni morbidi e non abrasivi. Controllate comunque attentamente anche le etichette e le indicazioni dei detergenti.

Manutenzione

Le rampe Mobilex modello SR non necessitano di una particolare manutenzione, ma nonostante la stabilità della costruzione è consigliabile fare controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato.

6. Smaltimento

Le rampe Mobilex non possono essere smaltite con i rifiuti urbani. Per lo smaltimento rivolgersi al proprio comune, ad un'azienda specializzata o alle „oasi ecologiche“.

7. Dichiarazione di conformità

La ditta **Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Danimarca**

dichiara

che le rampe Mobilex **modello SR** sono costruite in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE:

- **direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, appendice I, concernente i dispositivi medici**

Il responsabile:
Lars Nygaard,
amministratore Mobilex A/S



Skanderborg, li 10/02/2005

.....
data

.....
firma