

# **"Alligator" Ramper T- Ramper Montage- og brugervejledning**



**MOBILEX A/S**  
Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark  
www.mobilex-care.com

## 1. Indledning

Kære kunde,

Denne brugervejledning er en beskrivelse af produktet med vigtige henvisninger for at sikre en korrekt anvendelse. Før ibrugtagning er det vigtigt at læse brugervejledningen grundigt igennem. Det er særligt vigtigt at læse sikkerhedshenvisninger og følge disse.

Vi videreudvikler løbende vore produkter, og forbeholder os derfor ret til uden varsel at ændre produkterne.

### Formålsbeskrivelse

Produktet er et medicinsk produkt som anvendes af ældre eller handicappede personer, der har brug for udstyr til at overvinde forhindringer, såsom trin, med eller uden assistance af en hjælper. Anden anvendelse end beskrevet i formålsbeskrivelsen er ikke tilladt.

Ved spørgsmål bedes De henvende dem til forhandleren eller til Mobilex A/S direkte.

### Mobilex A/S

Nørskovvej 1  
DK-8660 Skanderborg  
Danmark

Telefon: +45 87 93 22 20  
Telefax: +45 87 93 17 77  
E-Mail: info@mobilex-care.com

## 2. Sikkerhedshenvisninger

- Benyt kun produktet i fejlfri tilstand.
- Hvis der opdages mangler eller fejl på produktet skal der øjeblikkeligt rettes henvendelse til forhandleren.
- Vær opmærksom på oplysningerne på typeskiltet, specielt angivelsen af max. belastning.
- Benyt kun produktet til det oplyste formål.
- Der må ikke laves konstruktive ændringer på produktet uden producentens skriftlige tilladelse.
- I forbindelse med sammenklapning m.m er der risiko for at klemme fingrene.
- Produktet må kun anvendes på et plant og stabilt underlag
- Ramperne må **med** assistance fra en hjælper maksimalt anvendes til forhindringer på:  
**T80060 9 cm**  
**T80075 13 cm**  
**T80125 28 cm**
- Ramperne må **uden** assistance fra en hjælper maksimalt anvendes til forhindringer på:  
**T80060 6 cm**  
**T80075 8 cm**  
**T80125 13 cm**


## 3. Beskrivelse

### Produkt beskrivelse

T-Ramper er ramper lavet af aluminium. Overfladen er specielt riflet for at sikre mod at skride.

T-Ramperne leveres i kartoner, der indeholder:

- 1 Rampe
- 1 Brugervejledning

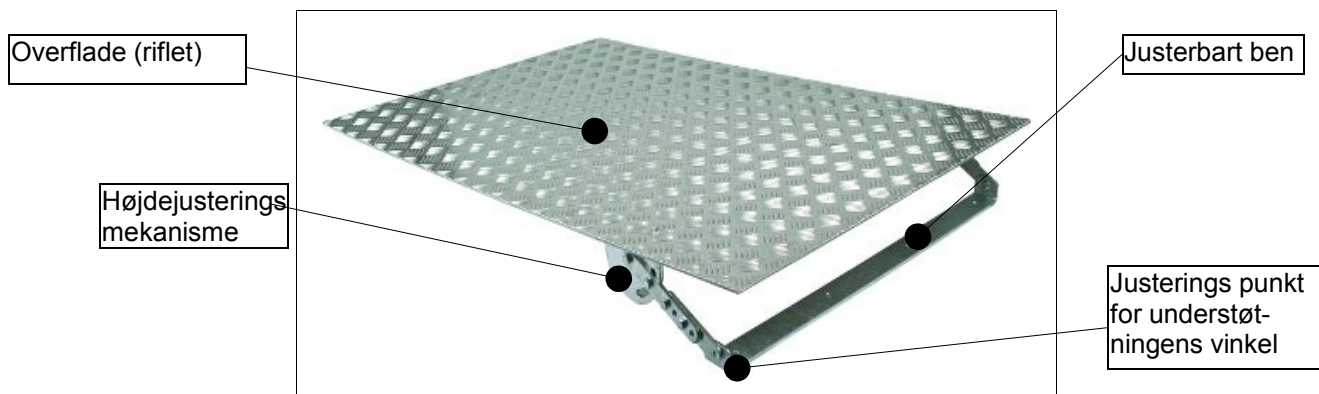

### Monteringsanvisning

- Rampen leveres samlet og klar til brug
- Første justering er højden, der indstilles ved at dreje benet, indtil rampen har den ønskede højde. Herefter strammes møtrikkerne i begge sider.
- Herefter justeres vinklen på understøtningen, således at understøtningsprofilen ligger fladt mod underlaget.
- Rampen placeres sådan at overkanten af rampen flugter med dørtrinnet.
- Rampen skal placeres på et stabilt underlag.
- Kontroller at rampen ligger stabilt før der køres på den

### Funktionsbeskrivelse

T-Ramper er udviklet specielt til terrassedøre, hvor rampen skal nå ind til dørtrinnet overfor fundamentet. T-Ramperne kan af stabilitetshensyn fastgøres til fliser eller fundament. Der er huller i understøtningsprofilen til dette formål.

### Transport beskrivelse

T-Ramperne egner sig ikke til at transportere, men benet kan foldes ind mod rampen for at minimere volumen.

### Tilbehør


Der kan fås sidebeskyttelse til T-ramperne, der kan monteres i den side, hvor det er relevant.

## 4. Tekniske data

T-Ramper	T80060	T80075	T80125
Længde	60 cm	75 cm	125 cm
Bredde	80 cm	80 cm	80 cm
Max. højde der kan overvindes	9 cm	13 cm	28 cm
Vægt	8,00 kg	12,00 kg	21,50 kg
Max. belastning	225 kg	225 kg	225 kg
Højdejusteringsinterval	5 - 9 cm	8 - 13 cm	11 -28 cm

### Produkt label

Typeskiltet befinder sig på bagsiden af produktet

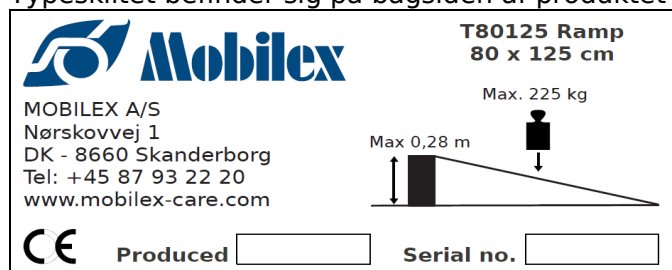

Billede af typeskiltet

## 5. Vedligeholdelse

Snavs kan normalt aftørres med en klud med mild sæbevand. Der må ikke anvendes stærkt basiske rengøringsmidler og der bør ikke anvendes stive børster og skarpe genstande til rengøringen.

Produktet er normalt vedligeholdelsefrit, men skal regelmæssigt gennemgå en kontrol, der foretages af en fagmand.

## 6. Generel problemafhjælpning

Hvad er der sket?	Hvad kan være grunden?	Hvad skal jeg gøre?
Rampen er ikke stabil	Underlaget er ikke stabilt	Kontroller rampens position. Flyt den til et stabilt underlag hvis muligt.
Rampen er ikke stabil	Rampen er monteret omvendt.	Kontroller at anlægsfladen ligger på forhindringen. Vend i givet fald rampen om.

## 7. Bortskaffelse af produktet

Dette produkt skal, når det ikke længere kan anvendes, afleveres på en kommunal genbrugsplads.

## 8. Garanti

Mobilex A/S yder en garanti på 2 år mod materiale- og produktionsfejl. Vi accepterer ikke ansvar for skader, der skyldes dårlig vedligeholdelse, skader som følge af forkert udførte reparationer eller skader, der skyldes normalt slid. Hvis der foretages konstruktive ændringer på produktet uden vores skriftlige accept bortfalder CE-mærkningen og vores produktansvar. Hvis der konstateres materiale- eller produktionsfejl, skal De straks tage kontakt til forhandleren af produktet eller til Mobilex A/S direkte.

Garantien omfatter ikke erstatning for manglende benyttelse under reparation, og der ydes ikke erstatning for skader der skyldes at denne brugervejledning ikke følges.

## 9. Konformitetserklæring

Mobilex A/S, Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danmark, erklærer hermed, at

### T-Ramper

er designet og produceret i overensstemmelse med den tekniske dokumentation og i henhold til de grundlæggende krav i:

- **Retningslinjer 93/42/EWG for medicinalprodukter  
Del I fra 14 Juni 1993**

Lars Nygaard  
Adm. Direktør  
Mobilex A/S

Skanderborg, den 1.12.2009



.....  
Underskrift