

Alligator Rampen TR und LF

Montage- und Gebrauchsanleitung



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

www.mobilex-care.com

Wichtig!

Bitte lesen Sie sich vor Gebrauch des Produktes die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise und folgen Sie diesen jederzeit .

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an Mobilex A/S

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

Telefon: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

1. Allgemeine Hinweise

CE-Kennzeichnung

Dieses Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 93/42/EEC für Medizinprodukte entsprechend dem deutschen Medizinproduktegesetz (MPG).

Garantie

Der Garantieanspruch besteht für 2 Jahre auf Fehler, die durch die Produktion verursacht wurden. Kein Anspruch besteht bei unsachgemäßem Gebrauch. Verschleissteile sind von der Garantie ausgenommen, es sei denn, es handelt sich um Herstellungsfehler. Die Garantie umfasst nicht die Transport-Kosten.

2. Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie das Produkt nur wenn es sich in einwandfreiem technischen Zustand befindet
- Falls Sie irgendwelche Beschädigungen oder Fehler am Produkt vorfinden, kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Händler.
- Beachten Sie die Angaben auf dem Produkt-Aufkleber.
- Bitte nutzen Sie die Rampen nur für den vorgesehenen Einsatzbereich (*siehe Zweckbestimmung*)
- Wenn die Rampen auseinandergefaltet werden, muss der Benutzer darauf achten, dass die Finger oder andere Körperteile nicht eingequetscht werden
- Die Rampen dürfen nur auf stabilen Boden verwendet werden

Zweckbestimmung:

Mobilex-Rampen sind mobile, transportable Rampensysteme zum Befahren mit dem Rollstuhl. Sie ermöglichen die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe (z.B. Treppenstufen). Die Mobilex-Rampen ermöglichen somit den Patienten, die aufgrund einer Mobilitätseinschränkung auf einen Rollstuhl angewiesen sind, ein Gebäude zu verlassen bzw. aufzusuchen und tragen somit zur Befriedigung der Grundbedürfnisse bei.

Sie können im Außen- und Innenbereich angewandt werden.

Indikation:

Mobilex-Rampen finden bei Patienten Anwendung, die auf Rollstühle angewiesen sind. Sie sollen den Patienten die Überwindung von Höhenunterschieden mit oder ohne Fremdhilfe ermöglichen

Einschränkung der Verwendung:

Die TR-Rampen dürfen nicht mit mehr als insgesamt 225 kg belastet werden,
Die LR-Rampen dürfen nicht mit mehr als insgesamt 180 kg belastet werden,

Die Rampen dürfen maximal auf Steigungen von:


TR-150/LR-150:	30 cm
TR-210/LR-210:	40 cm
TR-300:	50 cm

verwendet werden.

3. Beschreibung und technische Daten

Produkt Beschreibung

Die Alligator- Rampen Typ TR und Typ LR bestehen aus Aluminium.

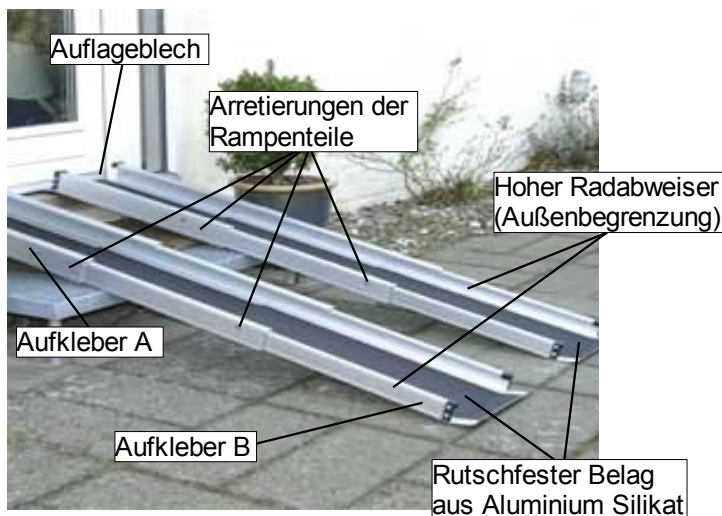

- Die Alligator-Rampen TR und LR sind mit einem Aufkleber **A** und einem Aufkleber **B** gekennzeichnet (siehe Abbildung oben).
- Der Aufkleber **A** kennzeichnet die obere Seite der Rampen, d.h. die Seite, die auf dem Hindernis aufliegt.
- Der Aufkleber **B** kennzeichnet die untere Seite der Rampen, d.h. die Seite, die auf dem Fußboden aufliegt.
- Die Auflagebleche der Rampen müssen stets auf einem stabilen und senkrechten Untergrund platziert werden.
- Ordnen Sie beide Rampen so zueinander an, dass die Räder des Rollstuhls mittig auf die Spur der Rampen treffen.
- Prüfen Sie die Rampen vor jedem Befahren auf eine sichere, stabile Lage
- Die Alligator-Rampen TR und LR können für den Transport **zusammengeschoben und fixiert** werden (Teleskop-Rampen)

Produkt-Aufkleber:

Das Typenschild befindet sich auf der Außenseite der Rampe



Abbildung des Typenschildes (Beispiel)

4. Technische Daten:

Alligator Rampe Typ	TR-150	TR-210	TR-300
Länge:	150 cm	210 cm	300 cm
Breite:	26 cm	26 cm	26 cm
Lauffläche:	19 cm	19 cm	19 cm
Höhe der Radabweiser:	Außenkante: 5 cm	Außenkante: 5 cm	Außenkante: 5 cm
Max. Steigung / Höhenunterschied:	12° / 30 cm	12° / 40 cm	12° / 50 cm
Gesamtgewicht:	2 x 5,5 kg	2 x 7,5 kg	2 x 9,5 kg
Max. Benutzergewicht (Traglast):	225 kg	225 kg	225 kg
Bemerkung:	Paarweise zu verwenden		

Alligator Rampe Typ	LR-150	LR-210
Länge:	150 cm	210 cm
Breite:	16 cm	16 cm
Lauffläche:	11 cm	11 cm
Höhe der Radabweiser:	Außenkante: 5 cm	Außenkante: 5 cm
Max. Steigung / Höhenunterschied:	12° / 30 cm	12° / 40 cm
Gesamtgewicht:	2 x 3 kg	2 x 4 kg
Max. Benutzergewicht (Traglast):	180 kg	180 kg
Bemerkung:	Paarweise zu verwenden	

5. Wartung und Pflege

Normale Verschmutzungen an Metall- und Kunststoffteilen lassen sich mit handelsüblichen Reinigungsmitteln entfernen. Beachten Sie deren spezielle Produktinformation und verwenden Sie ausschließlich handelsübliche Reinigungsmittel, die für die Reinigung bzw. Desinfektion geeignet sind (keine Lösungs- oder Scheuermittel).

Trotz der stabilen Bauweise und der Verwendung von widerstandsfähigen Materialien unterliegt das Produkt einem gewissen Verschleiss. Es wird daher empfohlen, das Produkt in regelmässigen Abständen von einem Fachmann kontrollieren zu lassen.

6. Entsorgung des Produktes

Das Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden, sondern muss zur lokalen Müllentsorgungsstelle gebracht werden.

7. Konformitätserklärung

Die Firma

Mobilex A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Dänemark

erklärt hiermit, dass das Produkt **Alligator Rampen Typ TR und Typ LR** in Übereinstimmung mit der technischen Dokumentation entworfen und hergestellt wurde und folgende grundlegenden Anforderungen erfüllt:

- **Richtlinie des Rates 93/42/EWG für Medizinprodukte, Anhang I vom 14 Juni 1993**

Der Verantwortliche:

Name: Lars Nygaard
Stellung: Geschäftsführer
Firma: Mobilex A/S, Nørskovvej 1, DK-8660 Skanderborg, Dänemark

Skanderborg, den 10.02.2005

.....
Datum



.....
Unterschrift