

Rampe basculante per soglie TSR-130 e TSR-140 Manuale d'uso e manutenzione



MOBILEX A/S
Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca
www.mobilex-care.com

1. Introduzione

Gentile cliente,

ha acquistato un prodotto di qualità Mobilex e ne siamo particolarmente felici. Questo manuale contiene una descrizione dettagliata del prodotto nonché informazioni importanti per il suo corretto utilizzo. Prima di utilizzare il prodotto si prega di leggere attentamente questo manuale e di osservare scrupolosamente tutte le istruzioni contenute, in particolare le note relative alla sicurezza per poter garantire sempre un uso sicuro ed efficiente del prodotto.

Nota: Nell'intento di migliorare sviluppiamo continuamente i nostri prodotti e pertanto ci riserviamo il diritto di modificare i prodotti senza ulteriore preavviso.

Destinazione d'uso

Le rampe Mobilex sono sistemi di rampe mobili e trasportabili per consentire a persone in carrozzina di superare dislivelli con o senza l'aiuto di terze persone. Le rampe Mobilex permettono a persone costrette all'uso di una carrozzina, di entrare ed uscire in edifici che presentano barriere architettoniche (p.e. gradini), permettendone così il superamento. Poco ingombranti e facili da trasportare rappresentano un valido strumento d'aiuto per la vita quotidiana. Le rampe Mobilex sono adatte all'uso in interni ed esterni.

In caso di ulteriori domande La preghiamo di rivolgersi al Suo rivenditore o direttamente a Mobilex:

Mobilex A/S

Nørskovvej 1
DK-8660 Skanderborg
Danimarca

Telefono: +45 87 93 22 20
Telefax: +45 87 93 17 77
E-Mail: info@mobilex-care.com

2. Note per la sicurezza

- utilizzate il prodotto solo se in perfetto stato
- se il prodotto presenta un qualsiasi danno o difetto contattate immediatamente il Vostro rivenditore di fiducia
- annotare le informazioni sull'etichetta del prodotto
- utilizzare il prodotto solo per l'uso consentito
- al momento dello spiegamento delle rampe chi ne fa uso dovrà porre particolare attenzione a non schiacciarsi dita o altre parti del corpo

3. Descrizioni generali

Descrizione del prodotto

Le rampe Mobilex TSR sono prodotte in alluminio con una speciale superficie antiscivolo. Il modello TSR è disponibile in 2 diverse misure.

Assemblaggio

Le rampe TSR sono fornite con i piedini regolabili. I piedini vanno applicati alla rampa fissandoli con le 3 viti a brugola in dotazione. Regolare quindi i piedini all'altezza desiderata ponendo attenzione che siano regolati in ugual misura.

Descrizione di funzionamento

Le rampe TSR sono costituite da una parte fissa e da una parte basculante, sono ideate per il superamento di barriere architettoniche (p.e. soglie e piccoli dislivelli ecc.). La parte basculante richiudibile sulla parte fissa permette l'utilizzo normale della porta dando la possibilità di lasciare la rampa in loco. La regolazione in altezza da 15 a 22,5 cm permette di adattare la rampa alla soglia.

Indicazioni per il trasporto

Per facilitarne il trasporto si può ripiegare la parte basculante ed ev. svitare i due piedini.

Accessori opzionali

Per questo modello di rampa non sono disponibili ulteriori accessori

4. Dati tecnici

rampe TSR	TSR-130	TSR-140
lunghezza (con parte basculante aperta)	130 cm	140 cm
larghezza totale	80 cm	80 cm
larghezza della parte basculante	75 cm	75 cm
misura della parte basculante	30 x 65 cm	40 x 65 cm
dislivello max. superabile	20 cm	20 cm
peso totale	14,70 kg	15,60 kg
portata massima	225 kg	225 kg
possibilità di regolazione in altezza	15 - 22,5 cm	15 - 22,5 cm

Targhetta di identificazione

L'etichetta identificativa si trova sulla parte inferiore della rampa

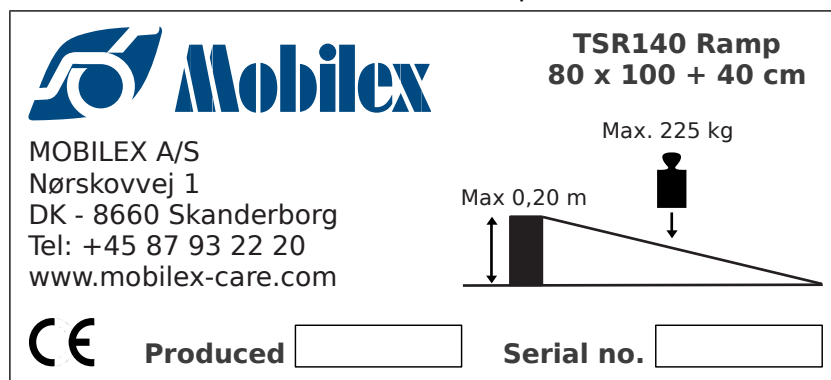


immagine dell'etichetta (esempio non originale)

5. Manutenzione

Normale sporcizia sulle parti metalliche ed in plastica possono essere rimosse con detergenti convenzionali. Osservate le indicazioni del detergente ed usate solo prodotti adatti alla pulizia o la disinfezione (detergenti privi di solventi o abrasivi).

Nonostante la costruzione solida e l'uso di materiali durevoli anche il prodotto Mobilex è soggetto ad usura. Si raccomanda quindi di fare controllare il prodotto ad intervalli regolari da un tecnico specializzato.

6. Risoluzione di piccoli guasti

cosa succede?	quale può essere la causa?	cosa fare?
la rampa non poggia bene sul terreno	i piedini potrebbero essere regolati su altezze diverse	regolare i piedini alla stessa altezza
la parte basculante è difficile da ripiegare	sporcizia nelle cerniere	pulire le cerniere ed eventualmente lubrificarle con della grafite

7. Smaltimento del prodotto

Il prodotto non può essere smaltito insieme ai rifiuti domestici ma deve essere portato al centro comunale per la raccolta dei rifiuti.

8. Garanzia

Mobilex A/S offre per tutti i prodotti commercializzati una garanzia contro difetti di materiale o difetti di costruzione per la durata del periodo di garanzia legale prevista dai rispettivi paesi nei quali è commercializzato il prodotto. Mobilex A/S non può essere responsabilizzata per danni derivanti da un uso improprio o da riparazioni e/o modifiche non professionalmente eseguite nonché per danni causati da negligenza ed usura o da alterazioni di componenti da parte dell'utente o di terzi. In questi casi si estingue la marcatura CE e di conseguenza la responsabilità e garanzia Mobilex per il prodotto.

La garanzia non copre i costi di trasporto nonché crediti per il mancato uso del prodotto durante il periodo di riparazione. Inoltre la garanzia non copre danni derivanti dalla non ottemperanza o mancata comprensione di questo manuale.

Nel caso si riscontrassero difetti di materiale o di fabbricazione contattate immediatamente il vostro rivenditore o direttamente la Mobilex A/S.

9. Dichiarazione di conformità (CE)

La ditta Mobilex A/S con sede in Nørskovvej 1, 8660 Skanderborg, Danimarca dichiara che il prodotto

Rampe basculante per soglie TSR-130 e TSR-140

è stato progettato e costruito in conformità alla documentazione tecnica ed alla seguente normativa CEE:

- **direttiva 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993
appendice I concernente i dispositivi medici**

Lars Nygaard
Amministratore unico
Mobilex A/S

Skanderborg, lì 01/12/2009



.....
firma